

ErgoPC 13 AIR

Manual do Usuário



©2020 Micromed Biotecnologia Ltda. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida de qualquer forma sem a permissão escrita do detentor dos direitos de autor.

Dados de Contato

MICROMED Biotecnologia Ltda
Rua 3 Lotes 15/17 – Polo de Modas
CEP: 71070-503 – Guará II
Brasília/DF
CNPJ Nº. 38.048.013/0001-03
Tel.: +55 11 4005-1899
Responsável Técnico: Francisco Duarte Moreira Neto – CREA-DF: 7933/D

Apoio Técnico

Contate o representante local da Micromed para obter apoio técnico.

Assistência Técnica Micromed

Tel.:
Grandes Capitais: +55 11 4005-1899
Demais Estados: 0800 5910-178

Parabéns, por sua compra!

Ao adquirir um produto Micromed, além de alto desempenho, qualidade e design inovador, você também passa a contar com uma ampla rede de atendimento pós-venda.

Contamos com a [Rede Credenciada Micromed](#), responsável por um atendimento ágil e criterioso com condições de oferecer preços justos e profissionais treinados para realizar o melhor serviço dentro e fora de garantia.

Com ampla cobertura de atendimento, você pode contar com nossa Rede para realizar instalação e configuração de equipamentos, além de serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e calibração.

Conte com nosso apoio sempre que precisar.

Sumário

1.	Visão Geral do Equipamento.....	6
2.	Descrição da Simbologia	9
3.	Normas Técnicas aplicáveis.....	10
4.	Classificação e Restrições de Uso.....	11
5.	O Ambiente do paciente	14
6.	Descrição Técnica	15
6.1.	Princípios de funcionamento	15
6.2.	O ErgoPC 13 Air	16
6.3.	Detalhamento das partes e funções	16
6.4.	Manutenção Preventiva	19
6.5.	Manutenção Corretiva	19
6.6.	Ensaio Regulares.....	19
6.7.	Check List para garantir a boa instalação do produto	19
6.8.	Calibração e Aferição.....	20
7.	Instalando o ErgoPC 13 Air.....	21
7.1.	Instalação do Hardware	21
7.2.	Instalando o Software ErgoPC 13.....	24
8.	Configurando o ErgoPC 13 Air.....	30
8.1.	Estrutura do Software ErgoPC 13 Air	32
8.2.	Configurando o sistema	37
8.3.	Funções do Sistema.....	56
8.4.	Preparando o Paciente.....	62
9.	Fazendo o Exame.....	68
9.1.	ECG de Repouso	68
9.2.	Teste de Esforço	69
9.3.	Definindo a aparência da Tela.....	77
9.4.	Identificando os Parâmetros do Paciente	81
9.5.	Pré-Esforço	82
9.6.	Controles	83
9.7.	Pressão Arterial	85
9.8.	Registros eletrocardiográficos	86
9.9.	Pontos Fiduciais.....	87
9.10.	Cronômetro	88
9.11.	Salvando o Exame	88
9.12.	Analisando os Resultados do exame	88
9.13.	Tabela de Resultados	89
9.14.	Analisando os Cálculos	90
9.15.	Registros	100
9.16.	Ritmo	106
9.17.	Laudo	111
9.18.	Imprimindo os Resultados.....	119

10. Módulo DICOM.....	121
Apêndice A – Termo de Garantia	127
Apêndice B - Uso Avançado do ERGOPC 13	130
Apêndice C - Fórmulas.....	134
Apêndice D – Medidas do nível do segmento ST e da amplitude da onda R	138
Apêndice E – Filtros	140
Apêndice F – Backup	141
Apêndice G - Solução de Problemas	143
Apêndice H – Especificações Técnicas e Compatibilidade Eletromagnética	145
Apêndice I – Certificação ANATEL.....	149
Apêndice J – Suporte.....	150

1. Visão Geral do Equipamento



Painel Lateral

1. **Botão Liga/Desliga:** Para este botão existem duas funções:
 - Ao apertar o botão por 3 segundos ele liga ou desliga o aparelho. Ao ligar deve esperar os 3 LEDs acenderem na seguinte ordem: Verde, Azul e Vermelho. Ao desligar deve apagar no sentido inverso: Vermelho, Azul e Verde.
 - Quando estiver ligando o aparelho e for mantido pressionado o botão por mais 15 segundos, o ErgoPC 13 Air entra no modo RESET (esta função leva o eletrocardiógrafo para o estado de configuração de fábrica). Neste modo os 3 LEDs ficarão piscando enquanto ocorre a reconfiguração.
2. **LED Vermelho.**
3. **LED Azul.**
4. **LED Verde.**

Os LEDs Laterais têm a função de indicar o estado da carga de bateria, além do estado de funcionamento do aparelho. Os estados são os seguintes:

- a. ErgoPC 13 Air ligado: LED verde piscando.
- b. Bateria fraca: Quando aparelho está ligado e a bateria está abaixo de 5%, o LED vermelho irá ficar piscando de modo intermitente.
- c. Bateria recarregando: Ao conectar o ErgoPC 13 Air ao seu carregador, os LEDs irão piscar ou se manter acesos de acordo com o nível de carga da bateria.
 - i. Bateria entre 0 e 30%, LED vermelho piscando;
 - ii. Bateria entre 30% e 60%, LED vermelho aceso e LED azul piscando;
 - iii. Bateria entre 60% e 90%, LEDs vermelho e azul acesos e LED verde piscando;

- iv. Bateria entre 90% e 99%, todos os LEDs acesos;
 - v. Bateria a 100%, todos LEDs se apagam.
- d. ErgoPC 13 Air ativo, transmitindo dados: LED azul piscando lento e LED verde piscando rápido.
- e. Bateria insuficiente: ao ligar aparelho LED vermelho pisca 5 vezes e apaga.
5. **Botões para destravar o Cabo de Paciente:** Pressione os dois botões que existem de cada lado lateral do ErgoPC 13 Air, e puxe suavemente o Cabo de Paciente.
6. **Local de encaixe do cabo de paciente:** Conector padrão do Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air destinado à conexão com o cabo de paciente. Este conector é a entrada de sinal vindo do paciente.

Partes componentes do produto e acessórios


O ErgoPC 13 Air é composto por um eletrocardiógrafo com conexão via Bluetooth, cabo de paciente, e seus acessórios. A tabela abaixo é a relação dos itens que compõem o produto:

Quantidade	Descrição	Exclusivo
1	Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air	Sim
1	Cabo de paciente MEBT-100 – 13 derivações	Sim
1	Carregador Wireless MEWD-100	Sim
1	Cabo Micro USB	Não
1	Adaptador Bluetooth USB	Não
1	Belt Clip	Sim
1	Cabo Extensor USB Blindado	Não

ErgoPC 13 Air



Cabo de Paciente: Cabo de 11 vias destinado a conectar o paciente ao eletrocardiógrafo.

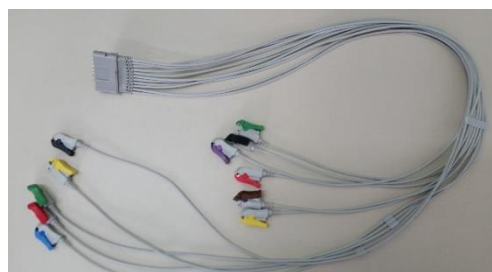

Wireless Dock: Carregador de bateria sem fio MEWD-100.



Cabo Micro USB: Cabo de comunicação padrão USB.



Adaptador Bluetooth USB: Adaptador para computadores que não possuem comunicação Bluetooth nativa.



Belt Clip: Suporte para prender o ErgoPC 13 Air à roupa do paciente.



Cabo Extensor USB Blindado: Suporte para facilitar o posicionamento do adaptador Bluetooth/USB.



2. Descrição da Simbologia

A tabela a seguir apresenta os símbolos constantes deste manual e da rotulagem do Eletrocardiógrafo e seus acessórios, juntamente com seu significado.

Símbolo	Significado
	Atenção! Siga as instruções contidas ao lado deste símbolo, ou leia este manual, para garantir a operação correta do equipamento.
	Parte Aplicada Tipo CF - Equipamento com isolamento reforçada para aplicação cardíaca direta e protegido contra descargas de desfibriladores cardíacos.
	Indica a orientação correta para transporte e armazenagem do equipamento embalado.
	Indica que o conteúdo da embalagem é frágil e, portanto, deve ser manuseada com cuidado.
	Indica que a embalagem e seu conteúdo devem ser mantidos fora da chuva.
	Indica que a temperatura de transporte e de armazenagem deve estar entre -5 e 55 graus Celsius.
	Indica que a umidade de transporte e de armazenagem deve estar entre 10 e 95%, sem condensação.
	Indica que o equipamento aplica energia eletromagnética de RF para diagnóstico.

3. Normas Técnicas aplicáveis

O ErgoPC 13 Air foi projetado observando-se as seguintes normas de desempenho e segurança:

1. Norma ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Equipamento eletromédico - Parte 1 – Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial;
2. Norma ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 – Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética - Requisito e ensaio;
3. Norma ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 – Equipamento eletromédico - Parte 2-25: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de eletrocardiógrafos;
4. ATO Nº 1120/2018 – Anatel – Regulamento para a certificação de equipamentos de telecomunicações quanto aos aspectos de compatibilidade eletromagnética;
5. Resolução 680 e ATO Nº 14448/17 – Regulamento sobre equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita;
6. Ato 950 de 2018 – Regulamento para Certificação de Equipamentos de Telecomunicações quanto aos Aspectos de Segurança Elétrica.

4. Classificação e Restrições de Uso

Classificação

Quanto ao tipo de proteção contra choque elétrico: EQUIPAMENTO CLASSE II – A proteção contra choques elétricos não depende de um terminal de aterramento.

Obs.: Enquanto está sendo carregado o equipamento não é conectado ao paciente.

Quanto ao grau de proteção contra choques elétricos: PARTE APLICADA TIPO CF – Equipamento com isolamento reforçada para aplicação cardíaca direta e protegido contra descarga de desfibriladores cardíacos.

Equipamento de operação contínua.



ATENÇÃO: Este equipamento é destinado à aplicação cardíaca direta.



ATENÇÃO: Este equipamento **não** deve ser utilizado na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

Classificação do Equipamento segundo a norma IEC-529: Equipamento de uso normal (IPX0) - Equipamento fechado sem proteção contra penetração nociva de água.

Restrições ao uso e avisos importantes:



O ErgoPC 13 Air é um equipamento eletromédico e deve ser utilizado somente por profissionais capacitados e treinados (também no uso do Software ErgoPC 13).



Ao utilizar o desfibrilador cardíaco não posicione suas pás sob ou perto dos eletrodos de ECG, pois isto pode provocar danos ao paciente. O eletrocardiógrafo pode permanecer ligado e conectado ao paciente durante a utilização de desfibriladores cardíacos. Antes de usar qualquer desfibrilador, consulte as instruções de operação para aquele equipamento.



A proteção contra desfibrilação somente é eficaz se o cabo de paciente utilizado for o fornecido pela MICROMED.



Este equipamento não é indicado para a utilização próxima a equipamentos de imagem por ressonância magnética (MRI) ou de terapias por ondas curtas.



As partes condutivas do cabo do paciente e dos eletrodos de ECG não deverão estar em contato com outros condutores elétricos e nem com o aterramento elétrico durante a operação. Caso este contato ocorra, a isolamento do paciente estará comprometida e existe o risco de choque elétrico.



Não existe risco associado ao uso do eletrocardiógrafo juntamente com marca-passos ou estimuladores cardíacos.



Somente utilize o cabo de paciente fornecido pela MICROMED. O cabo do paciente é componente importante para a proteção do paciente e do eletrocardiógrafo quando o paciente for submetido a um desfibrilador cardíaco. Além disso, o material usado no cabo é hipoalergênico.



O eletrocardiógrafo, assim como suas partes acessórias, deve ser descartado apropriadamente ao final de sua vida útil, de acordo com as normas vigentes para descarte de produtos eletrônicos.



Todos os equipamentos de tecnologia de informação (monitores de vídeo, impressoras e computadores) que servem de apoio ao ErgoPC 13 Air devem possuir a Certificação IEC 60950-1 – Ed. 2.0b, ou sua norma similar brasileira, para garantir a segurança elétrica do paciente e do operador.



Todos os equipamentos médicos que possam ser ligados ao paciente em uso concomitante com o ErgoPC 13 Air devem possuir a Certificação NBR IEC 60601-1. O uso concomitante de outros equipamentos pode fazer com que a soma da corrente de fuga supere os limites especificados.



O estabilizador de tensão utilizado para ligação de todos os equipamentos de tecnologia de informação deve respeitar o disposto na Norma NBR 14373:2006 Versão Corrigida 2010 - Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potências até 3 kVA/3 kW. O estabilizador deve possuir um número de tomadas que supra a quantidade de equipamentos a serem ligados.



Tomadas múltiplas não devem ser usadas juntamente com os equipamentos de tecnologia de informação, a não ser aquelas fornecidas pelo estabilizador de tensão.



Cordões de extensão de tomadas não devem ser utilizados para ligar os componentes de tecnologia de informação.



Não conecte outro equipamento a não ser o computador e seus periféricos ou outro equipamento homologado pela MICROMED no estabilizador de tensão.



Antes do uso do equipamento verifique cuidadosamente todas as conexões do eletrocardiógrafo (Cabo de paciente). Não use o equipamento caso seja notada alguma anormalidade ou dano visível.



Os conectores do eletrocardiógrafo e de seus acessórios não podem ser mergulhados em nenhum tipo de líquido.



Não derrame líquido de qualquer natureza no eletrocardiógrafo.



Não use abrasivos no eletrocardiógrafo e nem em seus acessórios.



Limpe o cabo de paciente com gaze umedecida em água e com sabão neutro. Seque em seguida. Limpe o gabinete do Eletrocardiógrafo com tecido macio umedecido em água e com sabão neutro, tomando cuidado para que não haja penetração de líquido em seu interior. Seque em seguida.



O equipamento é destinado para o uso supervisionado, não sendo indicado para o manuseio por crianças ou pessoas leigas.



Evite deixar o equipamento exposto a altas temperaturas. Temperaturas excessivas podem reduzir a capacidade de carga de bateria e em situações extremas (acima de 70°C) levar até mesmo a explosão da mesma.




As baterias de Lithium-ion recarregáveis apresentam degradação de sua capacidade energética após vários ciclos de carga. Quando for observado redução de sua capacidade, deve ser solicitada sua substituição à MICROMED. As baterias danificadas substituídas pela MICROMED são descartadas de forma segura de acordo com a legislação ambiental vigente.



O uso do equipamento em ambientes com alto nível de interferência eletromagnética pode comprometer a transmissão de dados pela conexão Bluetooth.

5. O Ambiente do paciente

Define-se como ambiente do paciente o volume, definido conforme figura abaixo, no qual possa ocorrer um contato intencional ou não entre o paciente e as partes do sistema, ou outras pessoas tocando partes do sistema.

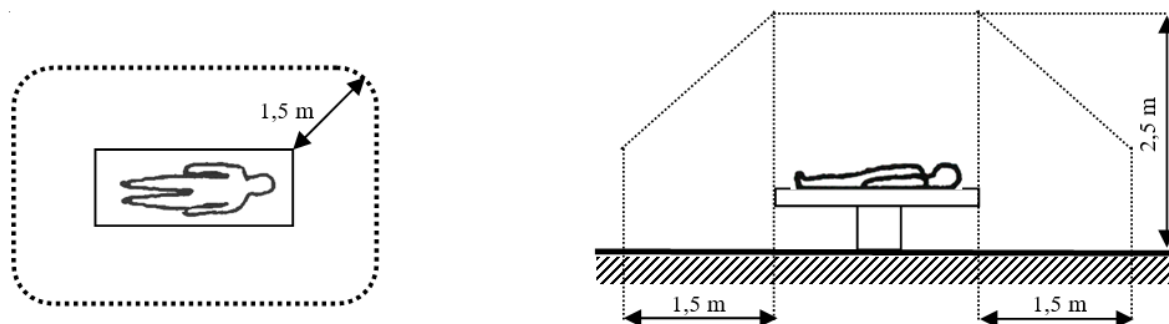

Ambiente do Paciente

O eletrocardiógrafo irá permanecer dentro do ambiente do paciente.



O microcomputador, seus acessórios e o estabilizador de tensão devem ficar fora do ambiente do paciente.



O operador do sistema não deve tocar simultaneamente o paciente ou uma pessoa que esteja tocando o paciente e o gabinete do microcomputador ou qualquer parte metálica ou condutiva de eletricidade conectada a este.



Em condições normais de uso ErgoPC 13 Air não compromete ou altera o estado clínico e a segurança dos pacientes e dos operadores do sistema.



O uso do equipamento em ambientes com alto nível de interferência eletromagnética pode comprometer a transmissão de dados pela conexão Bluetooth.

6. Descrição Técnica


6.1. Princípios de funcionamento

Os músculos que compõem o coração, como qualquer músculo, são estimulados por impulsos elétricos e também geram atividade elétrica no seu movimento de contração e relaxamento.

Esta atividade elétrica pode ser detectada, amplificada e registrada em papel, fornecendo assim uma forma de acompanhar a própria atividade cardíaca. A este registro em papel chamamos eletrocardiograma.

O equipamento responsável por captar o sinal elétrico resultante da atividade do músculo cardíaco, amplificá-lo e registrá-lo em papel é chamado de Eletrocardiógrafo.

O eletrocardiograma convencional (ECG) é feito em uma tira de papel milimetrado de 4 centímetros de largura, como exemplificado abaixo:

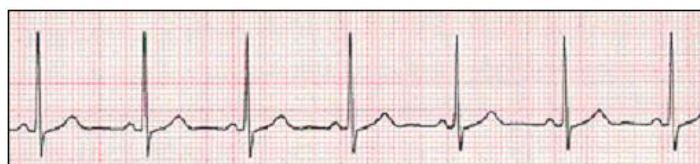

Registro de ECG Convencional

Cada ciclo do ECG representa um batimento cardíaco. Existem padrões de normalidade de morfologia e ritmo de modo que é possível diagnosticar alterações no comportamento cardíaco pela análise visual do ECG. Para captar o sinal cardíaco são utilizados eletrodos que são encostados sobre a pele do paciente, dispostos de maneira padrão. Podem-se combinar, eletricamente, estes eletrodos para captar o sinal cardíaco de diferentes ângulos, podendo, assim, avaliar todas as partes componentes do coração. Cada combinação de eletrodos é chamada de “derivação” e produz um registro eletrocardiográfico diferente.

Observou-se, empiricamente, entre 1918 e 1928, que o registro eletrocardiográfico de um paciente com determinados problemas cardíacos apresentava, quando submetido a esforço físico, variações de morfologia e/ou ritmo que não eram fisiológicas. Esta foi a pedra angular do que conhecemos hoje como teste de esforço, também denominado ergometria.

O princípio básico do teste de esforço ou ergometria consiste em submeter o paciente a exercício físico induzido, segundo um protocolo padrão, para observar as variações de frequência cardíaca, pressão arterial, morfologia e ritmo do sinal eletrocardiográfico e avaliar se as alterações ocorridas são ou não fisiológicas. É possível assim diagnosticar vários tipos de doenças cardíacas. O protocolo especifica em que intensidade e frequência a carga do exercício variará.

Os equipamentos essenciais à realização do teste de esforço são: um ergômetro para a realização do exercício físico, um aparelho para medir a pressão arterial e um eletrocardiógrafo para o registro do sinal cardíaco. Hoje em dia, os ergômetros mais usados são as esteiras rolantes e bicicletas ergométricas. O eletrocardiógrafo computadorizado oferece várias vantagens sobre o convencional e por isso tem sido o mais utilizado atualmente.



O diagnóstico quando da utilização do Software ErgoPC 13 e seu respectivo eletrocardiógrafo deve ser dado por médico qualificado para tal.

6.2. O ErgoPC 13 Air

O ErgoPC 13 Air é um equipamento eletromédico, que capta os sinais elétricos provenientes do coração, os amplifica, os converte em sinais digitais e então os envia para um microcomputador padrão IBM-PC via conexão Bluetooth.

No microcomputador o *software* ErgoPC 13 recebe os sinais cardíacos digitalizados e executa as funções necessárias à realização de testes ergométricos.

Utilizando as mais avançadas técnicas da engenharia biomédica o ErgoPC 13 Air possibilita ao ergometrista a realização de exames com qualidade elevada sem, no entanto, aumentar o tempo necessário para a execução do teste. Isto é possível pela filosofia de delegar ao computador todas as tarefas repetitivas do teste de esforço.

O ErgoPC 13 Air é um sistema completo para a monitorização e registro de sinais cardíacos captados durante o repouso e a prova de esforço. Constituído por um eletrocardiógrafo de treze canais e um programa, o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução (1024 x 768 pontos ou superior).

Fazendo uso do Windows, uma moderna interface gráfica, do teclado e do mouse, o aprendizado do sistema é acelerado. O ergometrista utiliza na tela botões e chaves seletoras, de maneira similar aos eletrocardiógrafos convencionais. Todos os comandos de operação do ErgoPC 13 estão visíveis na tela.

Sobrecarga dos Amplificadores

O eletrocardiógrafo retira o sinal da tela quando ocorre uma condição de sobrecarga dos amplificadores de entrada, que pode ser devido a potenciais presentes nos eletrodos ou descargas de desfibriladores. Isto é caracterizado por um traço contínuo na tela, quando o filtro de 60Hz e Linha de Base está acionado, ou a ausência do traço quando este estiver desligado. Caso isto ocorra, verifique a colocação dos eletrodos ou aguarde alguns segundos para a estabilização do traço.

6.3. Detalhamento das partes e funções

Avisos Sonoros

O Buzzer (dispositivo de áudio) é utilizado para indicação sonora por beeps. Ele tem dois estados:

- **Beep único:** Ocorre na conexão com o dispositivo Bluetooth, ou ao início da recarga de bateria;
- **Beep a cada 2 segundos por 5 minutos:** Ocorre quando o aparelho está ligado, sem conexão ao software por 15 minutos, e não está sendo recarregado. O aviso sonoro ocorre por 5 minutos, caso não seja cancelado apertando o botão Liga/Desliga. Após esse tempo, o aparelho se desliga para economizar bateria.

Capacidade de Bateria

Alimentado por uma bateria de Lithium-Ion com 1 célula de 1250mAh, o eletrocardiógrafo tem estimativa de 10 horas de duração em uso contínuo. A informação do nível de carga da bateria pode ser visualizada na barra de detalhes do Software.



Para a redução do consumo de bateria o eletrocardiógrafo possui o modo Sleep, que faz com que o equipamento desligue. Existem quatro formas de entrar no modo Sleep:

- Ao apertar o botão Liga/Desliga por 3 segundos.
- Ao acabar completamente a carga;
- Ao completar a recarga da bateria;
- Ou após 20 minutos de inatividade.

O tempo de recarga da bateria é de aproximadamente 1 hora e 20 minutos.



OBS: Caso a bateria esteja com uma duração média em uso contínuo inferior a 6 horas, a MICROMED deve ser contatada para agendamento de avaliação e substituição da bateria.

Comunicação de Dados

Os dados do Eletrocardiógrafo são transmitidos via Bluetooth para o computador que está com o software ErgoPC 13 instalado. A distância máxima de alcance é de até 10 metros (sem obstáculos). O dispositivo Bluetooth no ECG suporta as versões 2.1, 2.0, 1.2 e 1.1 da tecnologia.



OBS: Evite interpor obstáculos, inclusive o corpo do paciente, entre o eletrocardiógrafo e o Bluetooth do computador de forma a não prejudicar a transmissão de dados.

Durante a primeira varredura do equipamento pelas portas COM possíveis, o software demorará um pouco, mas se a conexão for bem-sucedida o software gravará a porta para que na próxima busca ele vá diretamente a ela, e conecte-se rapidamente.

Carregador Wireless MEWD-100

Um Carregador sem Fio destinado à alimentação do Eletrocardiógrafo através de um campo eletromagnético. É um carregador padrão Qi (maiores detalhes consulte o Consórcio WPC em – <http://www.wirelesspowerconsortium.com/>).

Para a alimentação do Carregador Wireless é necessário utilizar o cabo Micro USB conectado ao computador via porta USB. Para iniciar a recarga, coloque o eletrocardiógrafo sobre o Carregador Wireless.

Verificação dos LEDs do Carregador Wireless:

- **LED Verde constante:** Tem a função de indicar que o Carregador Wireless está energizado e pronto para uso;

-
- **LED Vermelho intermitente:** Tem a função de indicar que o Eletrocardiógrafo está carregando;
 - **LED Amarelo constante:** Tem a função de indicar que ocorreu algum erro no Carregador Wireless. Um erro possível seria a baixa alimentação na porta USB (tensão menor do que 5 Volts).
 - **LED Azul acende e apaga:** Indica que houve conexão com o ErgoPC 13 Air e ele iniciará a recarga.

Cabo de paciente

Cabo destinado a conectar o paciente ao eletrocardiógrafo. É um cabo de 11 vias. As vias R (Braço direito), L (Braço esquerdo), RF (Perna direita), F (Perna esquerda) e MA (Manúbrio) possuem 1 metro. As vias C1, C2, C3, C4, C5 e C6 possuem 0.75 centímetros.

1. **Garras tipo Grubber:** São acopladas aos eletrodos. Suas cores e marcações são: R (Braço direito – Vermelho), L (Braço esquerdo – Amarelo), RF (Perna direita – Preto), F (Perna esquerda – Verde) e MA (Manúbrio – Azul). As vias precordiais são C1 (Vermelho), C2 (Amarelo), C3 (Verde), C4 (Marrom), C5 (Preto) e C6 (Roxo).
2. **Conector do Cabo de Paciente:** é o conector que será plugado diretamente ao eletrocardiógrafo.

Encaixe / Desencaixe do Cabo de paciente

- Para encaixar o novo cabo no conector do eletrocardiógrafo, insira o conector no local correspondente e empurre até ouvir um pequeno estalo. Certifique-se que o cabo está colocado corretamente observando ainda se os botões laterais não estão “para dentro”.
- Para desencaixar o cabo, aperte os 2 botões laterais simultaneamente e puxe suavemente o cabo para trás até que ele se solte do conector;

Software ErgoPC 13

É um *software* compatível com microcomputadores padrão IBM-PC e sistemas operacionais Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro (32 ou 64 bits) e Windows 10 Pro (32 ou 64 Bits). O software ErgoPC 13 recebe o sinal do eletrocardiógrafo comunicado via Conexão Bluetooth e dá as ferramentas necessárias para que o usuário proceda à realização do eletrocardiograma.

IMPORTANTE: O ERGOPC 13 AIR foi homologado para uso nos seguintes sistemas operacionais: Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro (32 e 64 bits) e Windows 10 Pro (32 e 64 bits). Não recomendamos o uso com outros sistemas operacionais ou ainda com versões diferentes das listadas acima, sejam elas quais forem.

6.4. Manutenção Preventiva

O propósito da manutenção preventiva é evitar futuros problemas e manter o equipamento em condições de proporcionar segurança completa e funcionamento satisfatório. A manutenção preventiva deve ser feita pelo menos uma vez por mês.

Faça pelo menos uma vez ao mês:

- Inspeção visual do cabo de paciente e seus conectores, buscando quebras do cabo ou sinais de infiltração no isolamento;
- Limpeza do cabo de paciente com gaze levemente umedecida em água e com sabão neutro. Seque em seguida;
- Limpeza do gabinete do Eletrocardiógrafo com tecido macio levemente umedecido em água e com sabão neutro. Seque em seguida.
- Verificação da conexão entre o eletrocardiógrafo e o cabo de paciente.

6.5. Manutenção Corretiva

Em caso de necessidade de manutenção corretiva, encaminhe o eletrocardiógrafo e suas partes acessórias para a Micromed. Não existem manutenções corretivas passíveis de serem efetuadas pelo usuário além dessa. A substituição da bateria do equipamento deverá ser feita exclusivamente pela Micromed.

6.6. Ensaios Regulares

O eletrocardiógrafo é ensaiado automaticamente a cada reinício de transmissão para o *software*. Qualquer problema encontrado durante a fase inicial será reportado ao usuário e a operação será abortada. Além destes ensaios, é aconselhável que o eletrocardiógrafo seja aferido anualmente ou a qualquer momento, caso haja dúvidas quanto à sua exatidão.

O cabo de paciente deve ser ensaiado a cada 6 (seis) meses utilizando-se um simulador de sinais cardíacos, com o objetivo de se detectar possíveis distorções no sinal capturado pelo mesmo. Estes ensaios devem ser realizados a qualquer tempo, caso sejam detectadas alterações no sinal capturado que coloque em dúvida a integridade do cabo de paciente.

A cada utilização, uma inspeção visual deve ser feita no cabo de paciente, buscando identificar possíveis quebras ou comprometimento da isolação.

6.7. Check List para garantir a boa instalação do produto

Para garantir que o Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air tenha sido instalado com sucesso e de acordo com as normas da segurança o usuário deve checar ao final da instalação e durante o uso normal os seguintes pontos:

1. Se o cabo de paciente está bem conectado ao eletrocardiógrafo;
2. Se o Eletrocardiógrafo está ligado, com bateria suficiente e pareado com o Bluetooth do computador.
3. Se o software está bem instalado e funcionando;

-
4. Se o eletrocardiógrafo executa a auto calibração inicial corretamente e o software NÃO apresenta a mensagem “Eletro ausente ou não configurado”.

6.8. Calibração e Aferição

Todo eletrocardiógrafo quando terminada a sua fase de montagem, calibração, testes e aferições pode ter seus relatórios e certificados emitidos. Para adquirir essa documentação basta entrar em contato com o Suporte Técnico da MICROMED solicitando esses certificados de Calibração e/ou Aferição. No momento do contato forneça o número de série de seu aparelho.

Equipamentos já em uso que são enviados para a MICROMED para alguma manutenção ou detecção de erros, também podem ter seus certificados adquiridos mediante acordo com o Suporte Técnico da MICROMED.

7. Instalando o ErgoPC 13 Air

A instalação do ErgoPC 13 Air é dividida em duas etapas: **instalação do Hardware** e **instalação do software**. A instalação do Hardware implica na conexão do ECG Digital ao computador e ao cabo de paciente enquanto a do software será a instalação do programa no computador.

Ao receber o equipamento, desembale-o verificando os seguintes pontos:

- Se a embalagem não contém sinais de avaria;
- Se a embalagem contém sinais de ter sido violada;
- Se a embalagem está seca;

Após desembalar proceda a uma conferência do conteúdo da embalagem, verifique se a mesma possui os seguintes itens:


- Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air;
- Cabo de Paciente;
- Carregador de Bateria Wireless MEWD-100;
- Cabo Micro USB;
- Adaptador USB Bluetooth;
- Belt Clip
- Cabo Extensor.

7.1. Instalação do Hardware


Verifique no computador se há o dispositivo Bluetooth para o pareamento do ECG.

Se o seu computador não possuir nenhum dispositivo de comunicação Bluetooth disponível será necessário fazer o uso do Adaptador USB Bluetooth, fornecido pela Micromed, para localização do Eletrocardiógrafo. Para instalá-lo, antes de mais nada desabilite o adaptador de seu micro (siga as instruções do fabricante) e proceda com os passos mostrados abaixo (telas capturadas do Sistema Operacional Windows 10 Pro):


1. Conecte o adaptador Bluetooth fornecido pela Micromed a uma porta USB e aguarde que o Windows instale o driver. Pode ser necessário que o micro esteja conectado à Internet.
2. Certifique-se que o ErgoPC 13 Air esteja ligado e que o LED verde esteja piscando. Se o LED vermelho estiver piscando, deve-se primeiro carregar a bateria do eletrocardiógrafo. **OBS:** O Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air sai da Micromed com um pouco de carga. Porém, dependendo do tempo entre a chegada do equipamento no cliente e a sua instalação, pode ser necessária nova carga.
3. Clique no ícone do Windows, no canto inferior esquerdo de seu monitor principal e aguarde que a tela abaixo seja mostrada. Depois clique em CONFIGURAÇÕES:

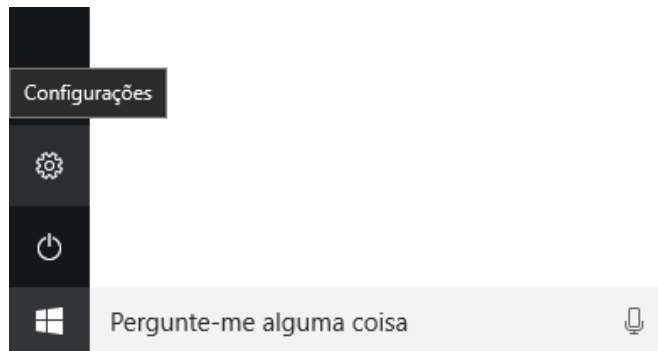


4. Na tela abaixo clique em “Dispositivos”:

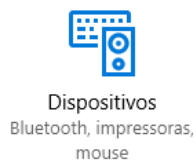


5. Na tela abaixo clique sobre “Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo”:

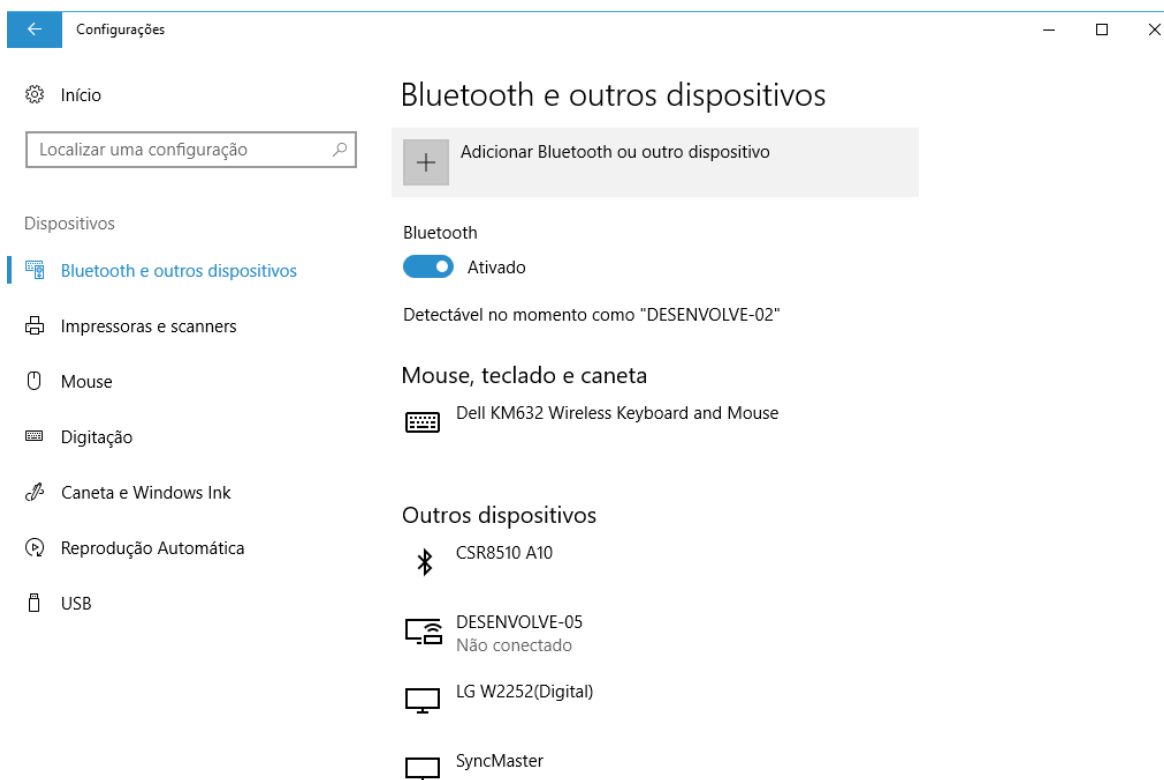


6. Na tela abaixo clique sobre “Bluetooth”:

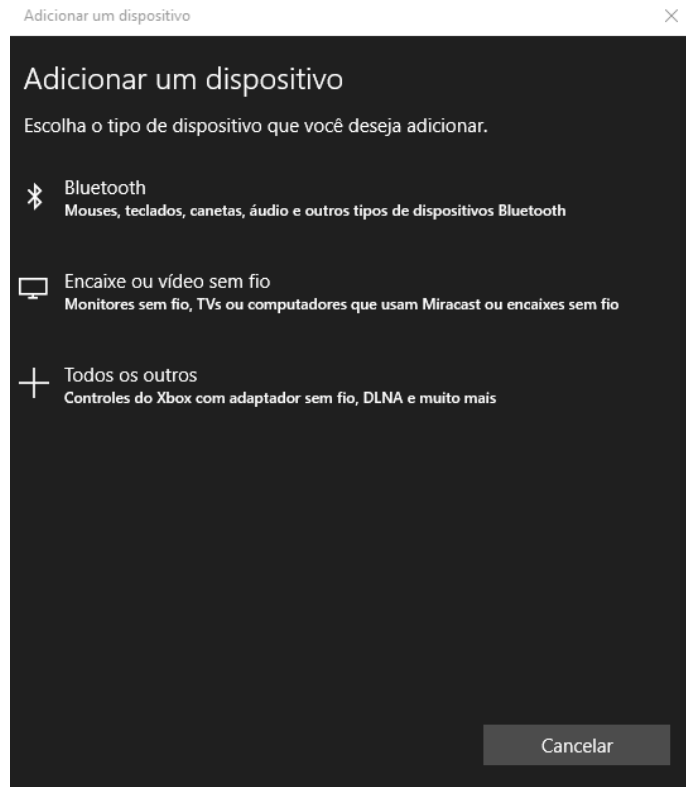

7. Dê um clique no dispositivo MEBT-100 e depois no botão “CONECTAR”. OBS: pode levar alguns minutos até que o nome do dispositivo apareça.

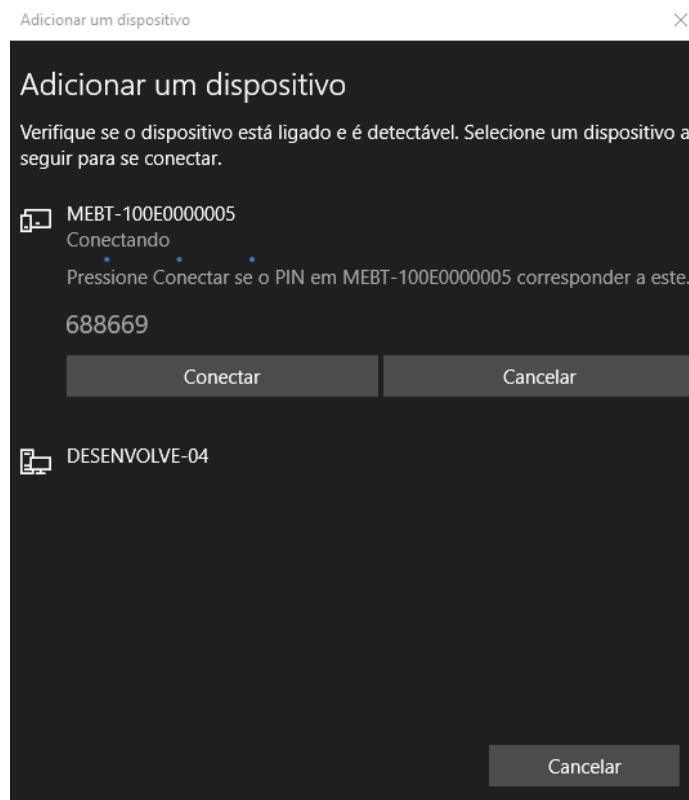

8. O Windows mostrará a tela seguinte, informando que o dispositivo está conectado. Espere um instante para que o Windows configure o dispositivo.

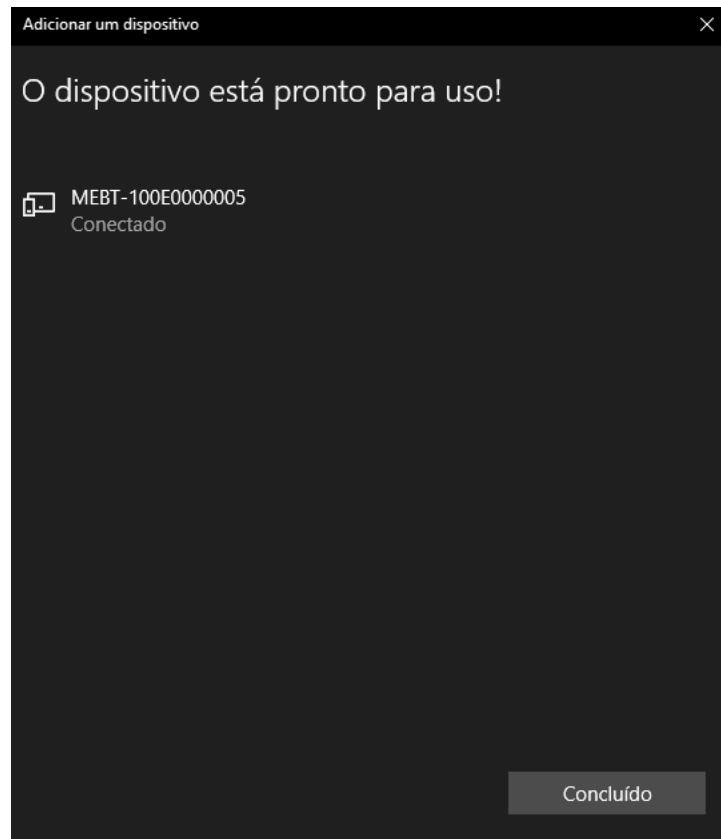

9. Clique em “Concluir” para finalizar o pareamento e feche a tela de Gerenciamento Bluetooth. Neste momento, o eletrocardiógrafo ErgoPC AIR está instalado e a configuração do Software ERGO PC poderá ser feita

7.2. Instalando o Software ErgoPC 13


A instalação do Software do ERGOPC E segue a mesma maneira convencional de um software do Windows. Feche todos os programas abertos.

Nota 1: Descubra manuais e atualizações de software para os produtos Micromed. Para obter mais informações sobre a disponibilidade da atualização do software de seu equipamento consulte <https://micromed.ind.br/site/contato/>.


Nota 2: O software ErgoPC Elite é um software compatível com computadores padrão IBM-PC e sistema operacional Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro e Windows 10 Pro.

Para obter mais informações sobre os requisitos mínimos para utilização de equipamentos da linha Air, consulte <https://micromed.ind.br/site/solucoes/ergopc-air/>


1. Execute o instalador fornecido. A janela abaixo irá abrir. Clique em AVANÇAR, para dar continuidade à instalação.

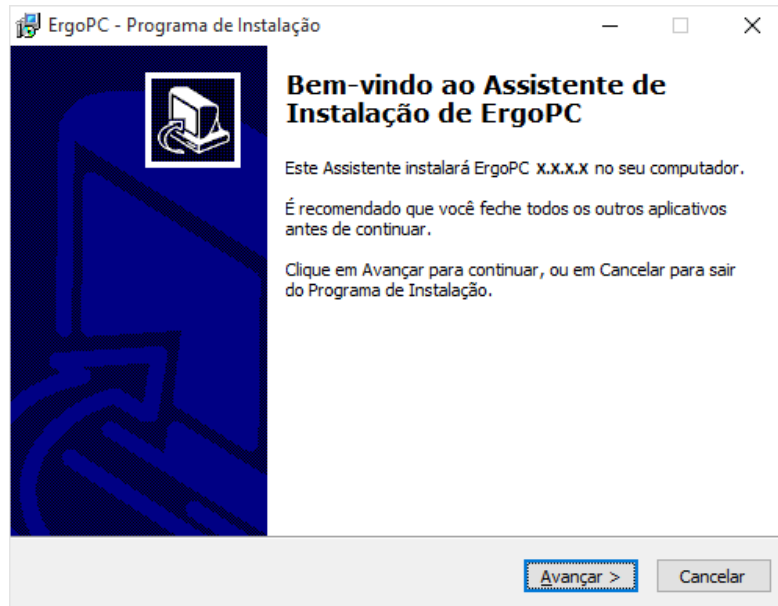


2. Leia o Contrato de Licença de Uso e, para aceitá-lo clique em “Eu aceito os termos do Contrato”. Depois sobre o botão AVANÇAR.

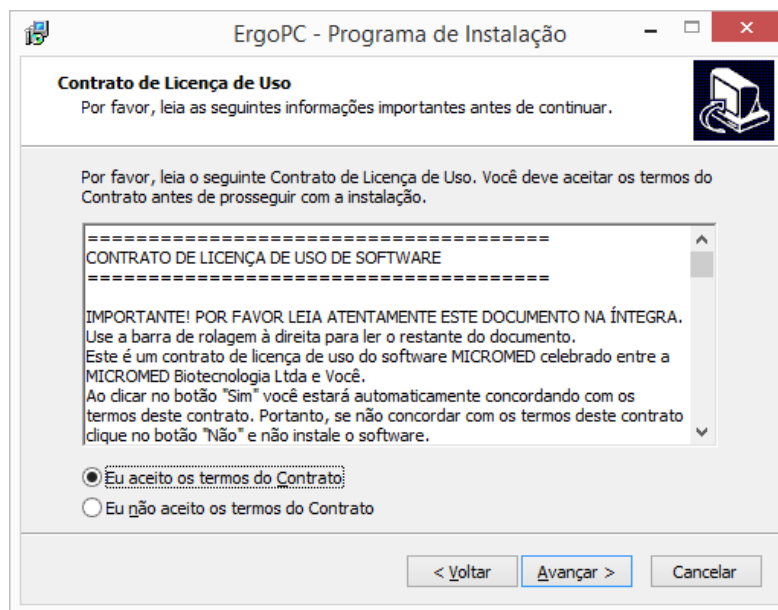


3. Escolha o local de destino clicando em PROCURAR, caso o local já sugerido não seja o desejado. Clique em AVANÇAR, para dar continuidade à instalação.

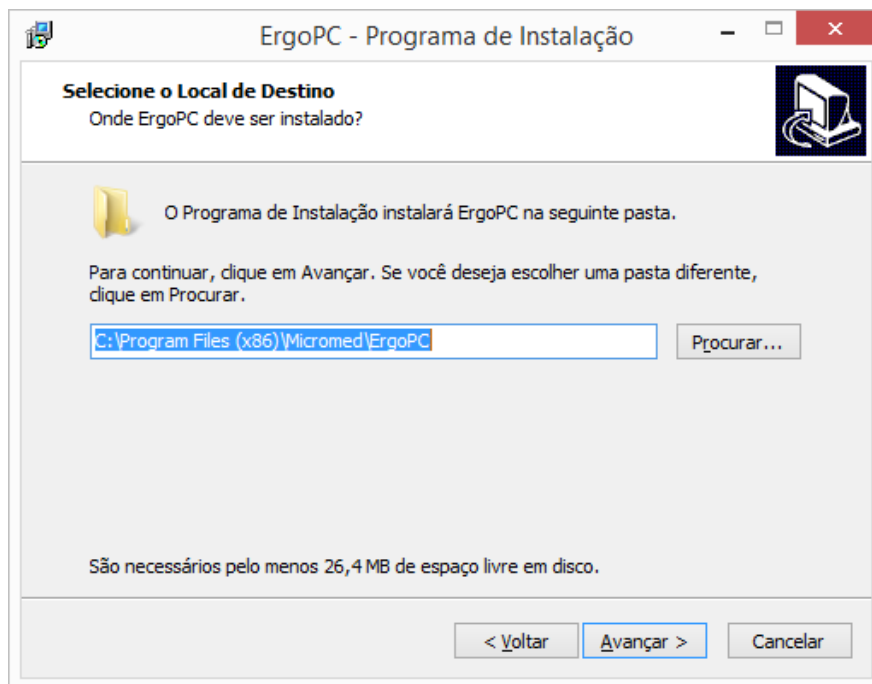


4. Na tela mostrada abaixo clique em AVANÇAR para dar continuidade à instalação.

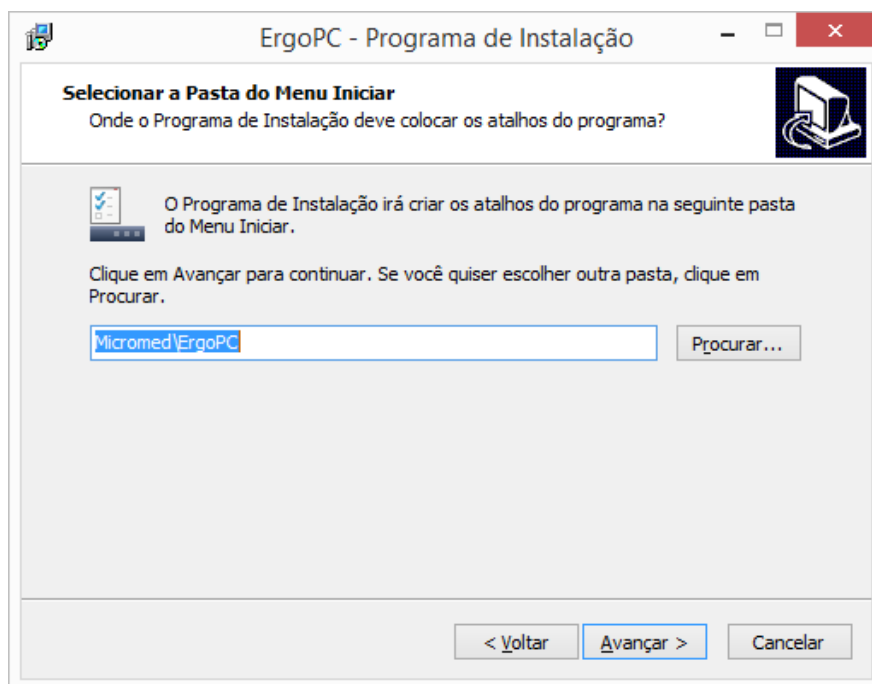


-
5. Se desejar criar um ícone na Área de Trabalho deixe a marcação mostrada abaixo e clique em AVANÇAR

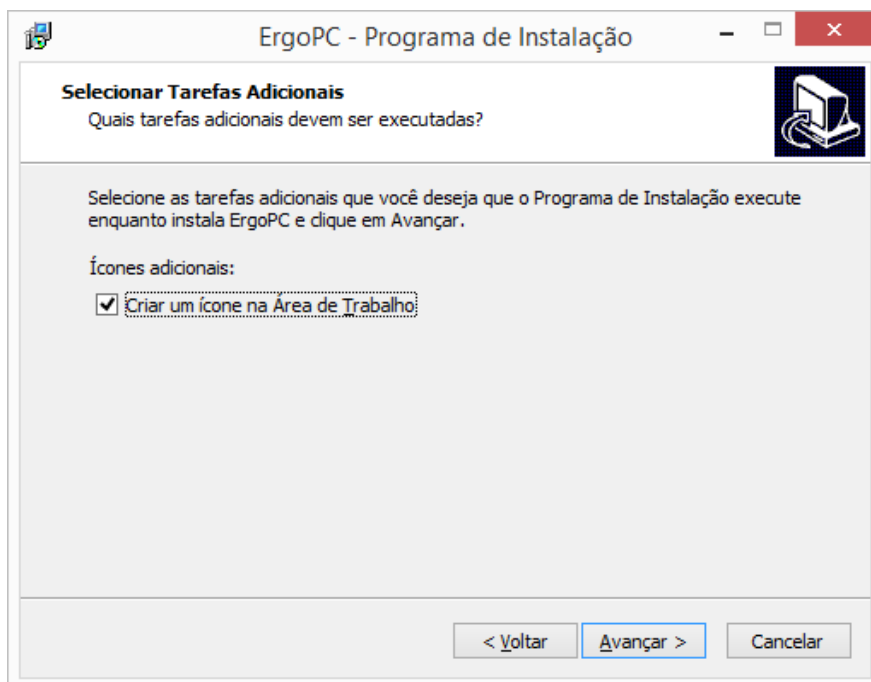


6. Veja a tela com o resumo de suas escolhas e clique no botão INSTALAR.

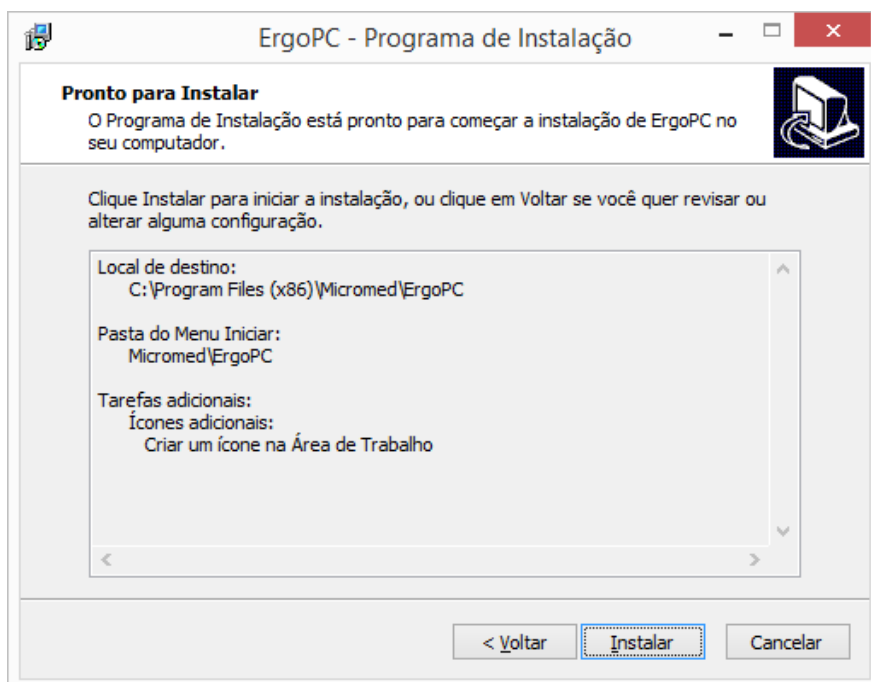


7. Aguarde enquanto o programa está sendo instalado.

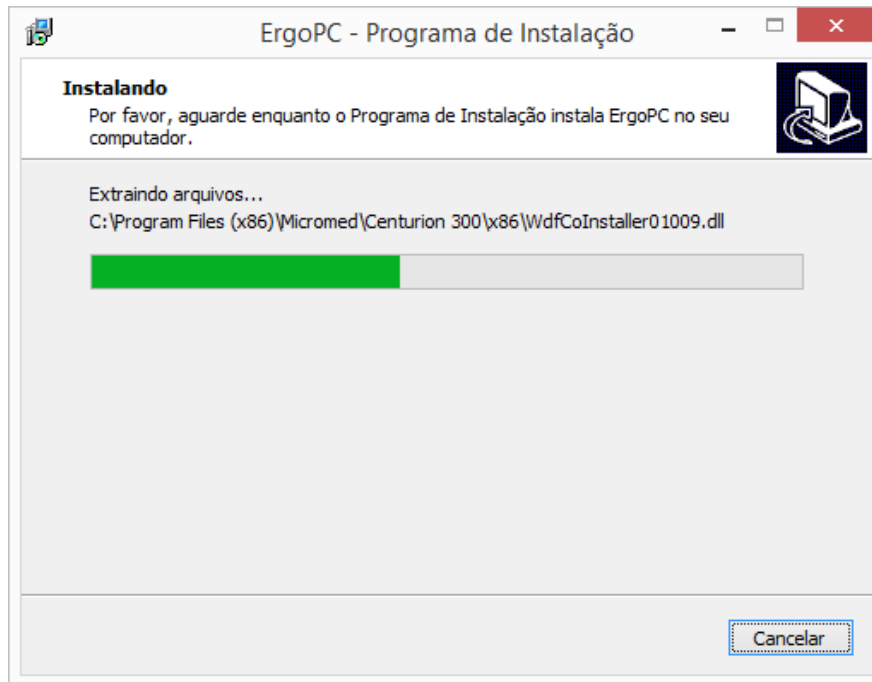

8. Após o passo acima, será aberta a tela para instalação do Driver do Adaptador Bluetooth BlueAir. Clique em AVANÇAR.

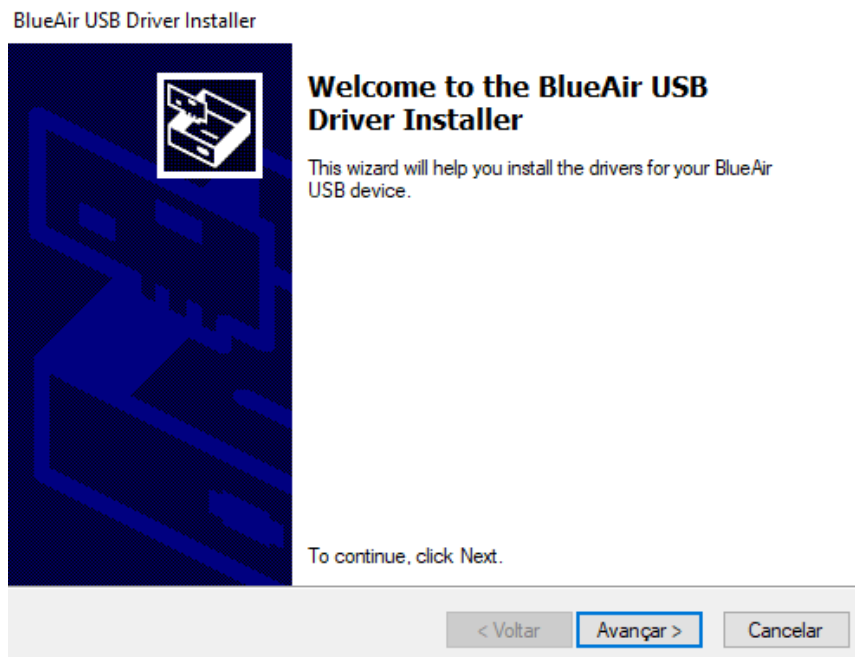


9. Aguarde a instalação e clique em CONCLUIR para finalizar a instalação do Driver

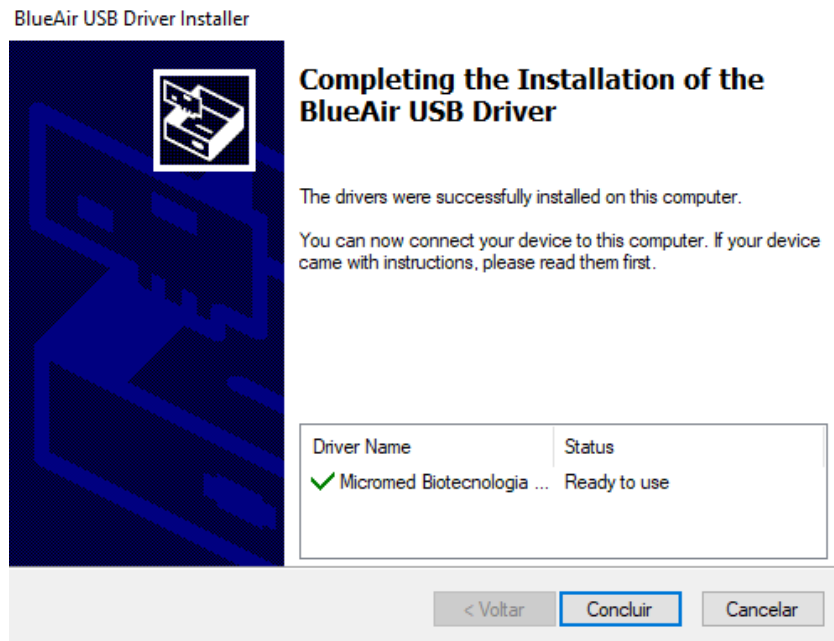

10. O programa

11. foi instalado. Selecione o procedimento que deseja clicando no seu botão de referência e, em seguida, clique em CONCLUIR.

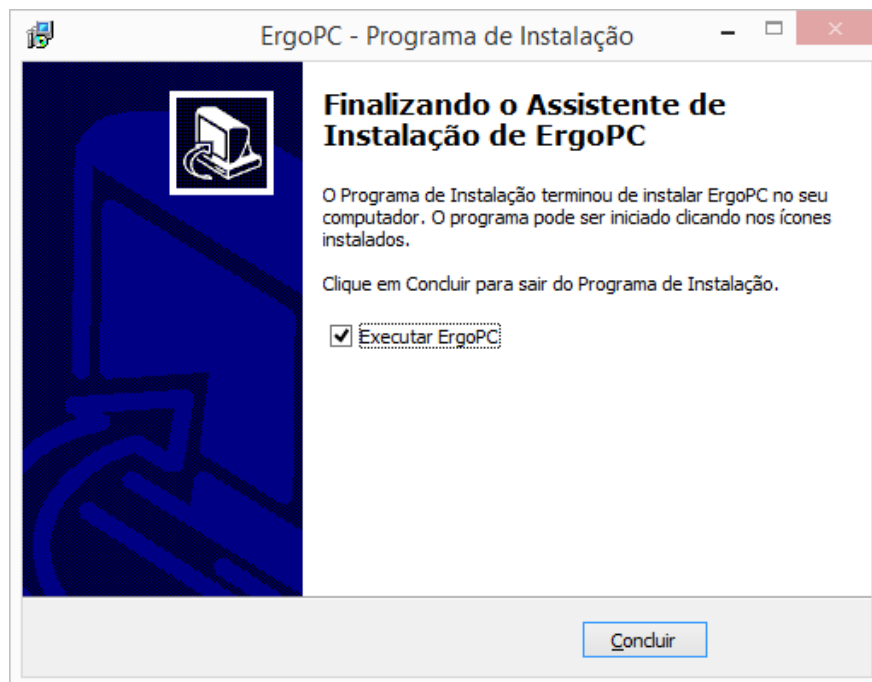


O programa já está pronto para ser utilizado.

8. Configurando o ErgoPC 13 Air


Abra o programa, a partir do local e pasta definidos durante a instalação e aguarde o final da barra de porcentagem:




Caso o Eletrocardiógrafo não esteja conectado ((via Bluetooth) ou ligado), a caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Clique em OK e conecte-o, segundo as instruções a seguir.

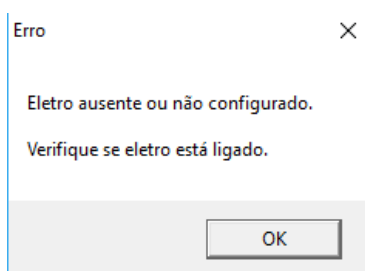


Clique no menu CONFIGURAÇÃO e escolha o subitem AMBIENTE e selecione o tipo de eletrocardiógrafo utilizado. No caso “**Bluetooth**”.

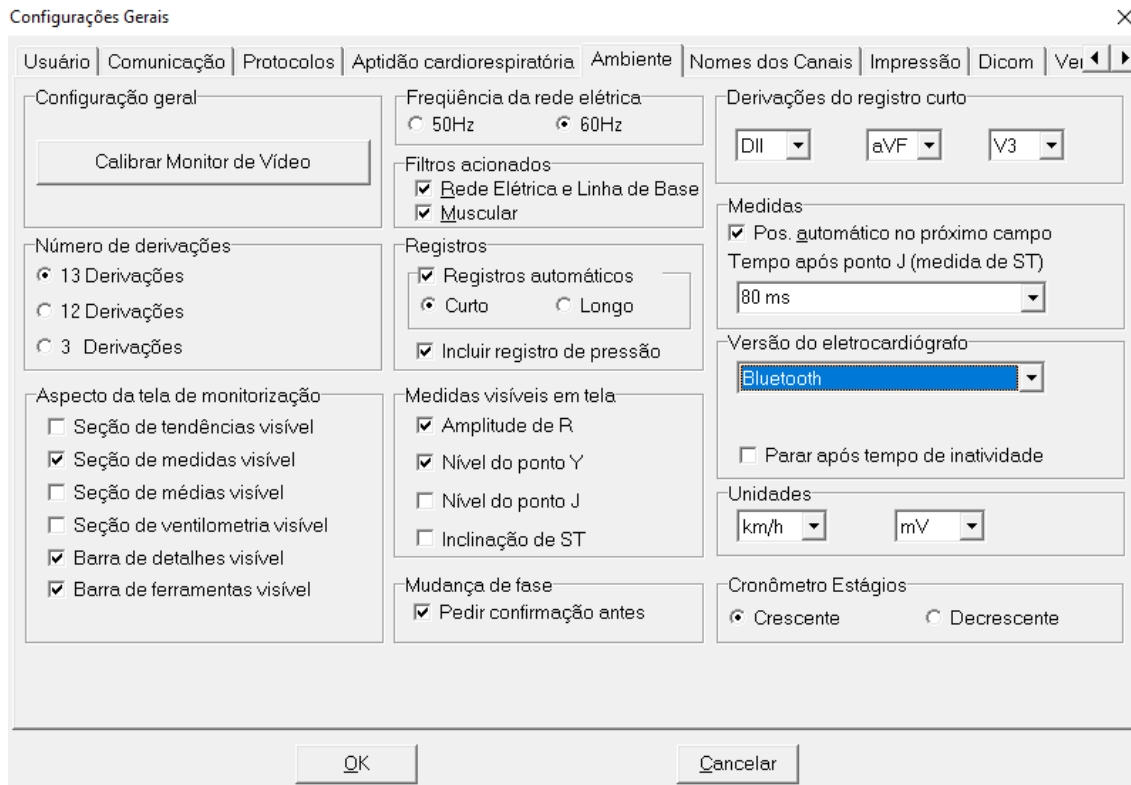


Caso o Eletrocardiógrafo esteja sobre a base de recarga, a caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Clique em OK, retire o eletrocardiógrafo da base de carregamento, feche e abra o software do ErgoPC novamente.

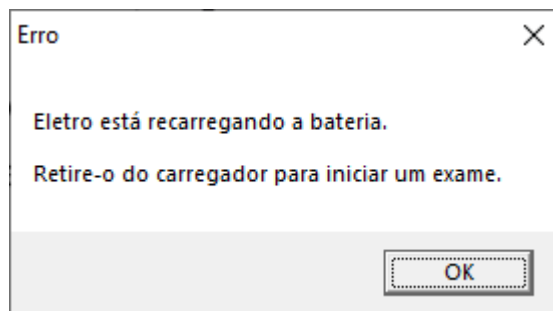

Caso apareça a mensagem abaixo, significa que seu eletrocardiógrafo necessita de uma atualização de Firmware. Para atualizar clique em SIM e será iniciada a atualização de Firmware.

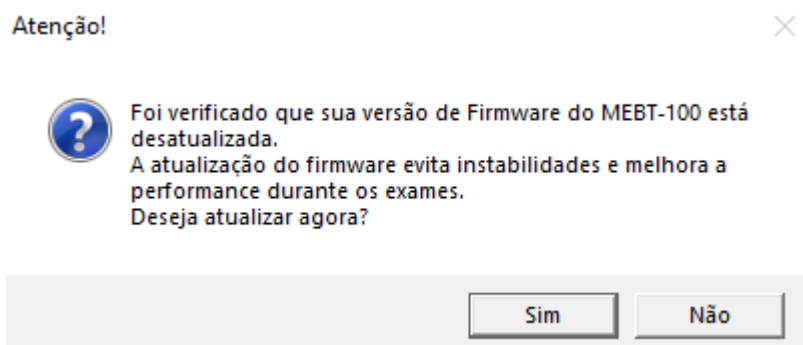

Aguarde até o final do processo de atualização de Firmware, quando finalizar a atualização surgirá a seguinte mensagem em tela:

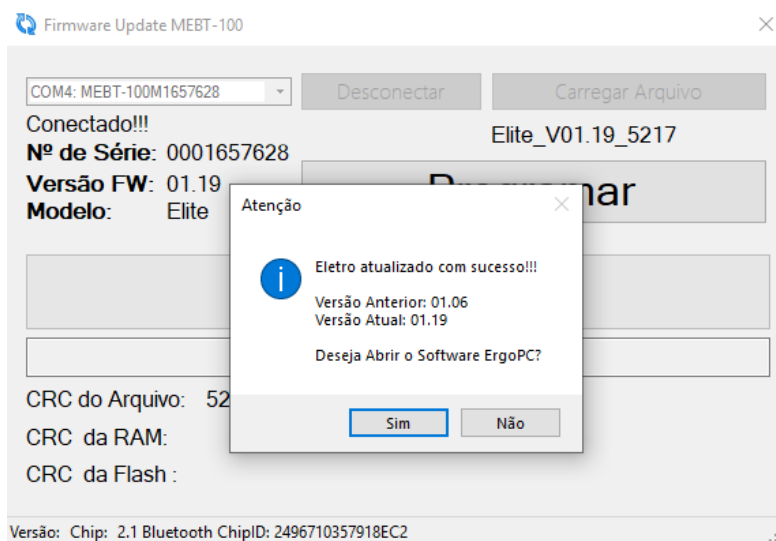

8.1. Estrutura do Software ErgoPC 13 Air


Barra de Título

Quando aberto o exame, o nome do paciente que está sendo examinado fica visível na barra de título.


Barra de Menu

Mostra os menus para prover as funcionalidades a janelas específicas ou à aplicação. Elas estão descritas abaixo:


Paciente

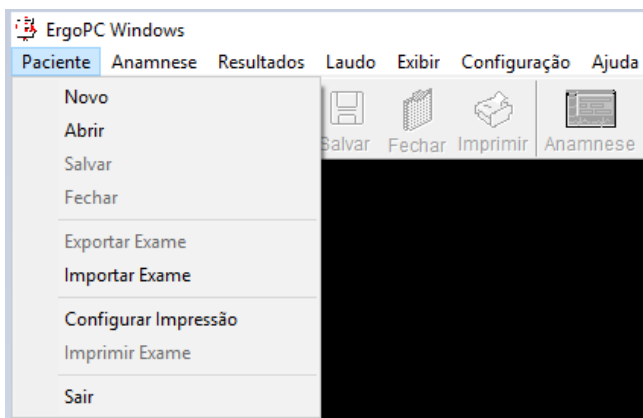


Anamnese

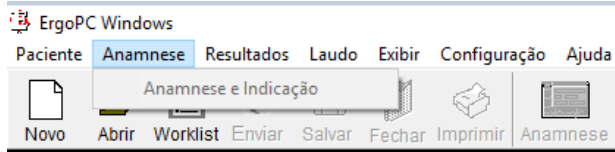


Resultados

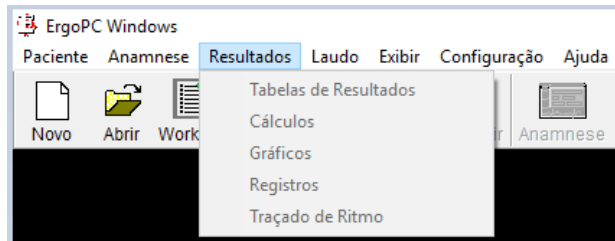


Laudo

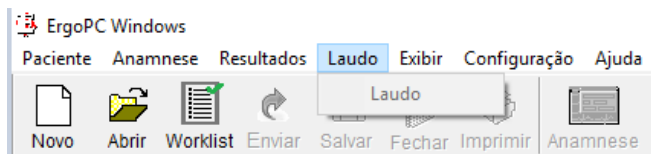


Exibir

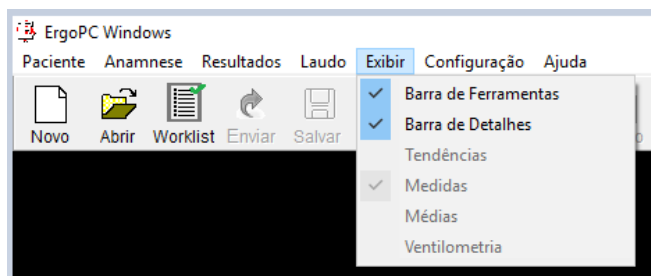


Configuração

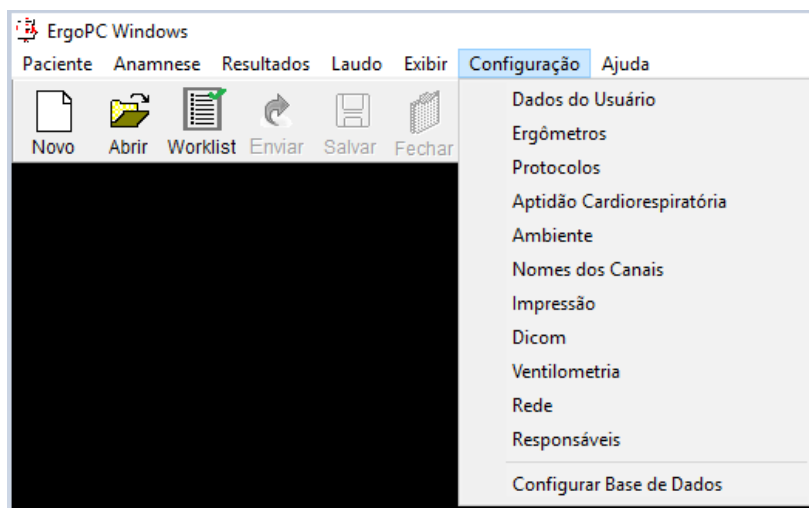


Ajuda

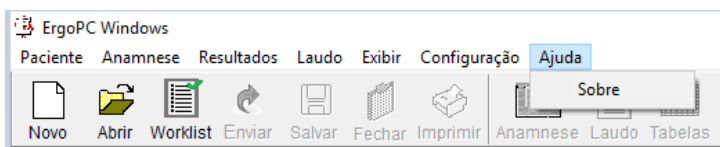


Barra de Ferramentas

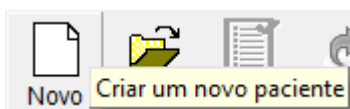


→ Criar um novo paciente.

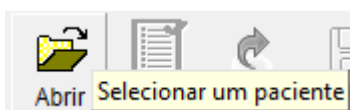


→ Selecionar um paciente.

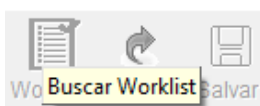


→ Buscar Worklist.

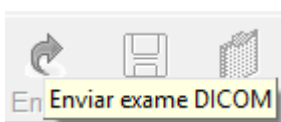


→ Enviar exame DICOM.

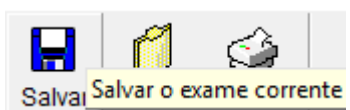


→ Salvar o exame corrente.

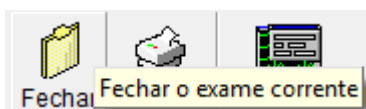


→ Fechar o exame corrente.

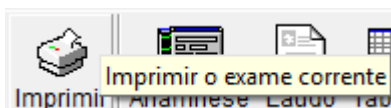


→ Imprimir o exame corrente.

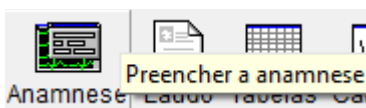


→ Preencher a anamnese.

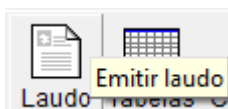


→ Emitir laudo.

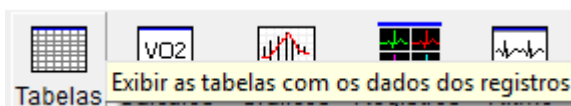


→ Exibir as tabelas com os dados dos registros.

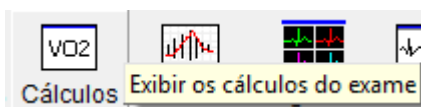


→ Exibir os cálculos do exame.

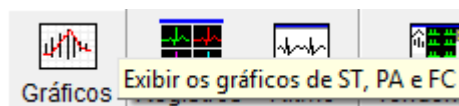


→ Exibir os gráficos de ST, PA e FC.

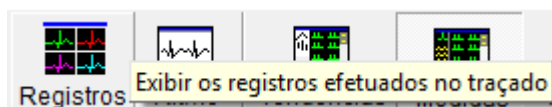


→ Exibir os registros efetuados no traçado.

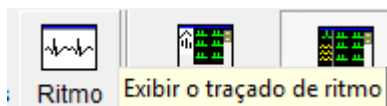


→ Exibir o traçado do ritmo em uma ou em todas as derivações.

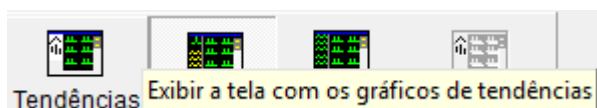


→ Exibir a tela com os gráficos de tendências.

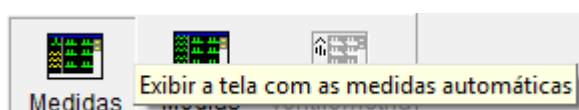

→ Exibir a tela com as medidas automáticas.

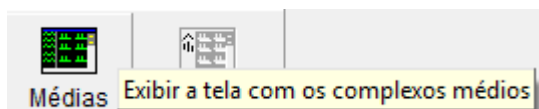

→ Exibir a tela com os complexos médios.

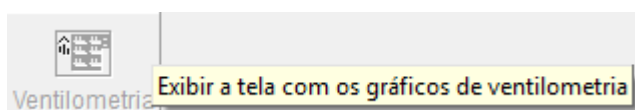


→ Exibir a tela com os gráficos de ventilometria (opcional).

Barra de Detalhes

	Frequência Cardíaca
	<p>Frequência Cardíaca Máxima</p> <p>Frequência Cardíaca Submáxima</p>
	Canal de Frequência Cardíaca
	Editor de cor do traçado
	Filtros
	Mostrador de saturação do sinal
	Indicação da qualidade de Sinal Bluetooth
	Monitorização
	Bateria – mostra o percentual da carga da bateria do Eletrocardiógrafo
	<p>Indica se um eletrodo está solto, eletrodo conectado ao paciente ficará na cor verde, se um eletrodo soltar ficará na cor vermelha.</p> <p>Obs.: Se cair o eletrodo da Perna Direita, todas derivações ficarão isoelétricas.</p> <p>Obs.: Se cair algum eletrodo de membro, todas as derivações precordiais ficarão isoelétricas.</p>



Cronômetro: Permite iniciar e parar o cronômetro.

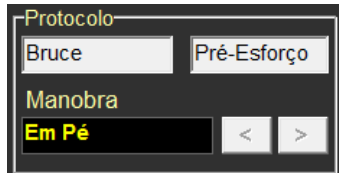

Protocolo: Este campo permite visualizar o tipo de protocolo que está sendo utilizado e a manobra que está sendo realizada.



Controles: Este campo permite Ajustar rampa, Escolher protocolo, ativar o beep de batimento acionado e finalizar o exame.



Pressão: Permite informar e registrar a pressão do Paciente no gráfico PAS/PAD.



Registros: Este campo permite registrar o traçado como curto ou longo e permite visualizar a quantidade de registros efetuada. Outra possibilidade do controle é a emissão de notas a serem impressas no registro.

8.2. Configurando o sistema

Para personalizar o sistema ErgoPC 13 é necessário realizar a configuração antes da execução do primeiro exame. Na configuração o usuário deverá informar quais as suas preferências com relação ao uso de tabelas e protocolos, os dados da clínica, o tipo de ergômetro, o tipo de ambiente e forma de impressão. Siga o procedimento a seguir para entrar na tela de configuração:

A partir da Barra de Menu, clicar em CONFIGURAÇÃO. Em seguida, clicar no item desejado para efetuar a configuração. Em qualquer item que for clicado, a caixa de configuração irá abrir com todos os itens presentes em forma de guias.

Caso o usuário não faça nenhuma escolha o programa irá utilizar a configuração de fábrica.

Usuário

Incluindo Usuários

Nesta janela o usuário pode preencher o nome da sua clínica, seu endereço e telefone. Além disso é possível também selecionar um logotipo da clínica para que possa ser impresso no cabeçalho do laudo e do traçado.

Configurações Gerais

Usuário | Comunicação | Protocolos | Aptidão cardiorespiratória | Ambiente | Nomes dos Canais | Impressão | Dicom | Ver

Nome da clínica
Nome da sua Clínica

Endereço
Endereço da sua Clínica

Telefone
Seu Telefone

Alterar logotipo

Novo usuário

Deletar usuário

Logotipo (708 x 283 pontos)

Seu Logo

Obs: dimensões ideais = 1417 x 566 pontos


OK Cancelar

Para cadastrar os dados do usuário basta clicar no campo e digitar. Você poderá cadastrar mais de um usuário. Para isto clique na opção NOVO USUÁRIO e preencha os dados do novo usuário e selecione o logotipo correspondente. Selecione o usuário que deseja clicando na seta ao lado da opção nome da clínica.

Excluindo Usuários

Para excluir um usuário siga estes passos:

1. Selecione o usuário que deseja excluir;
2. Clique no botão Deletar Usuário;
3. Será apresentado o texto:

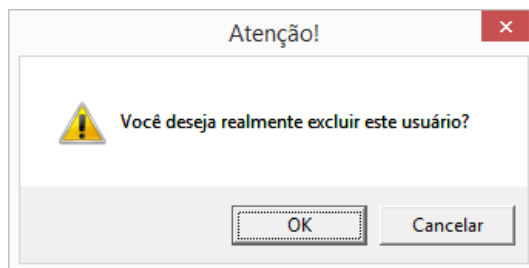

4. Clique em OK para confirmar a exclusão do usuário ou clique em CANCELAR para cancelar a operação.


Inserindo a Logotipo

Caso você ainda não possua um arquivo BMP com a imagem do seu logotipo, pode criar um, por meio de programas utilitários gráficos, tal como o Paint.


Abaixo do campo Logotipo, é mostrada a dimensão ideal (1417x566 pixels) da imagem dada em pontos na horizontal por pontos na vertical (ambos em pixels).

Para inserir um logotipo siga os procedimentos:

1. Clique na opção Configuração na Barra de Menu;
2. Clique na opção Dados do Usuário;
3. Clique no botão Alterar Logotipo;
4. Selecione o arquivo de imagem do tipo BMP que corresponde ao logotipo do usuário;
5. Clique sobre o botão Abrir;

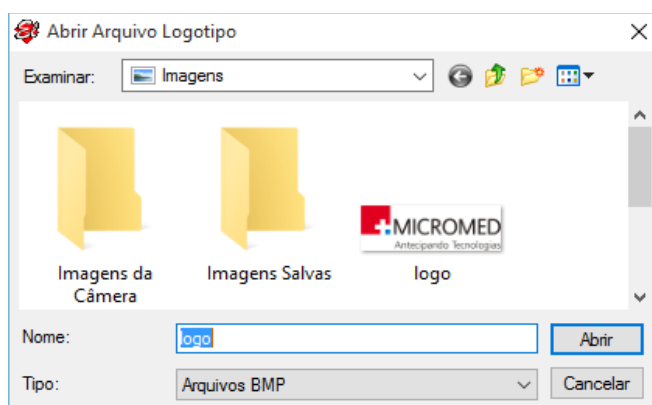


Para que não seja mostrado nenhum logotipo nos relatórios do ErgoPC 13 (caso você já tenha selecionado um), clique sobre a imagem do logotipo e aperte a tecla Del (ou Delete). Responda SIM para a pergunta que é apresentada:

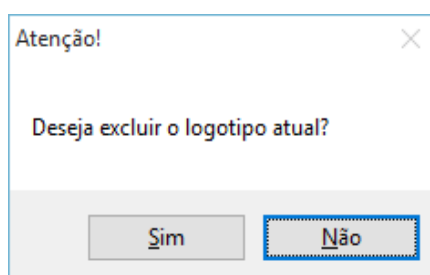

Comunicação

Para configurar o ERGÔMETRO, clicar na guia Comunicação. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada:

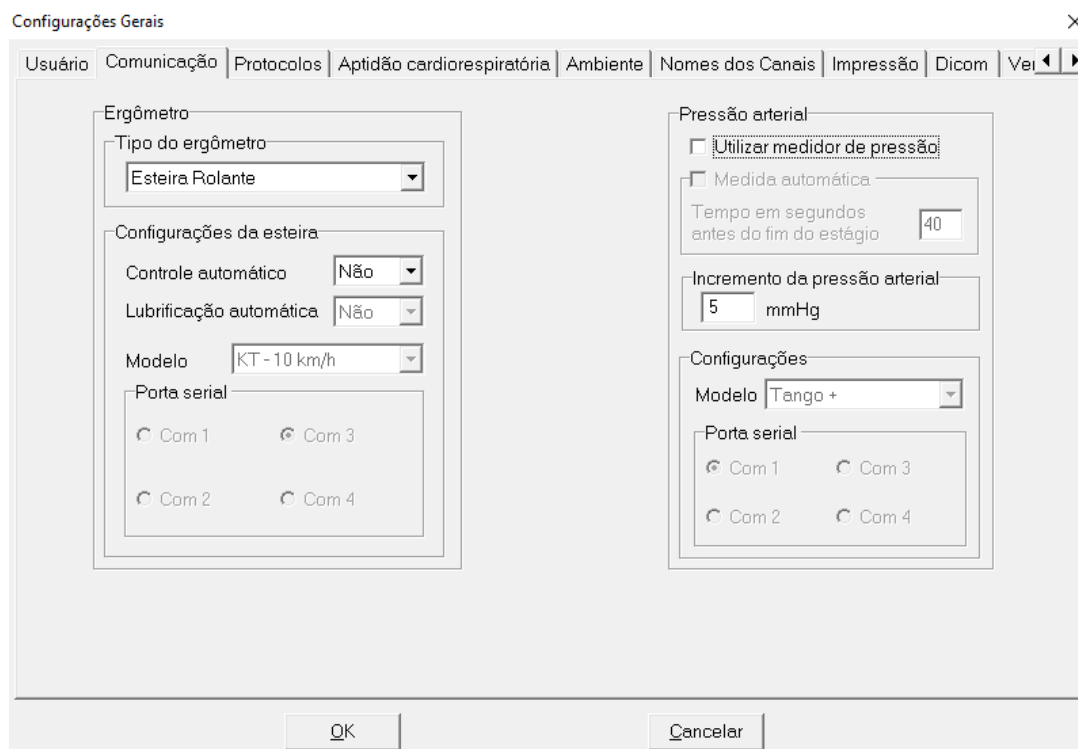


Esta tela permite a seleção do tipo de ergômetro que será utilizado para a realização da Prova de Esforço.

Para fazer a seleção basta clicar com o mouse sobre a seta para baixo na opção Ergômetro:

Tipo do Ergômetro	Campo para a escolha do tipo de ergômetro utilizado na prova. Se a escolha for cicloergômetro os campos de controle automático da esteira e porta serial não estarão disponíveis.
Controle Automático	Esta opção indica se a esteira será automaticamente controlada pelo ERGOPC 13 ou terá controle manual. O controle automático somente está disponível para esteiras homologadas pela MICROMED.
Lubrificação Automática	Esta opção permite habilitar ou não a lubrificação automática da esteira;
Modelo	Esta opção mostra os tipos de esteiras que são compatíveis com o ErgoPC para o controle automático. Se a escolha for não para controle automático o campo Modelo não estará disponível.
Porta Serial	Permite escolher em qual Porta a esteira selecionada está conectada;
Incremento da Pressão Arterial	Para escolher o incremento da Pressão Arterial durante o exame preencha o campo "Incremento da Pressão Arterial". O padrão é de 5 em 5 mmHg.

Caso o CONTROLE AUTOMÁTICO esteja para NÃO e o Protocolo em RAMPA seja o protocolo ativo do sistema, a caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Clique em OK para voltar à CONFIGURAÇÕES GERAIS. Através da guia PROTOCOLOS, defina outro protocolo, que não seja o de RAMPA, para que se possa acionar o controle manual da esteira. Siga as instruções do próximo item, 8.2.3. PROTOCOLOS.

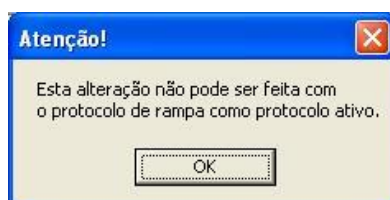

PROTOCOLOS

Para configurar os PROTOCOLOS, clicar na guia de sua referência. Esta tela permite a configuração do tipo de protocolo a ser adotado na prova de Esforço. No ErgoPC 13 o médico poderá modificar os protocolos existentes, bem como inserir o número de protocolos que desejar. Usando o mouse basta clicar sobre o nome correspondente ao protocolo para selecioná-lo.



Após a configuração, clicar em OK, para salvar as alterações e fechar a caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS, ou em CANCELAR, para cancelar a ação. Escolha o protocolo desejado, a partir da caixa de PROTOCOLOS DISPONÍVEIS, clicando no nome de referência do protocolo.

Adicionando Protocolo


Para adicionar um protocolo, clicar em ADICIONAR PROTOCOLO e inserir os dados no campo de referência, que abrirá na última linha. Ao adicionar um novo protocolo, escolha o TIPO clicando na célula deste campo para que a seta de seleção seja aberta. Clique na seta escolha entre as 3 opções: ESTÁGIOS, RAMPA, MANUAL. O mesmo procedimento cabe ao campo VELOCIDADE, que pode ser escolhido entre: mph ou km/h.

O sistema ERGOPC 13 terá como configuração inicial os protocolos a seguir:

PROTOCOLOS DE ESTEIRAS	PROTOCOLOS DE BICICLETAS
ASTRAND	ASTRAND
BALKE	BALKE (Feminino)
BALKE – WARE	BALKE (Masculino)
BRUCE	
BRUCE MODIFICADO	
COOPER	
ELLESTAD	
KATTUS	
MADER FEMININO	
MADER MASCULINO	
MINI BRUCE	
NAUGHTON	
RAMPA	
STANFORD	
STANFORD MODIFICADO	

Excluindo Protocolos

Para excluir um protocolo, clicar em DELETAR PROTOCOLO. A caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para excluir, ou em NÃO, para cancelar a ação.

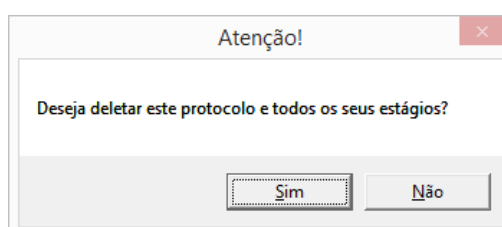

Para escolher o ESTÁGIO, clique na linha de referência desejada. Para adicionar um estágio, clicar em ADICIONAR ESTÁGIO e inserir os dados no campo de referência, que abrirá na última linha. Para excluir um estágio, clicar em DELETAR ESTÁGIO. Cuidado ao clicar em DELETAR ESTÁGIO,

pois não aparecerá uma caixa de confirmação, ou seja, o estágio será deletado instantaneamente.


A tabela do campo ESTÁGIOS, muda de acordo com o TIPO de protocolo selecionado no campo PROTOCOLOS DISPONÍVEIS. Veja as alterações:

ESTÁGIOS ou MANUAL: Tempo; Velocidade (mph ou km/h) e Elevação (%).


RAMPA: velocidade Inicial (mph ou km/h), Elevação Inicial (%), Tempo entre registros (pois a RAMPA não tem estágios) e Tempo médio de Prova.

Restaurando a configuração de Fábrica

O ERGOPC 13 permite a restauração dos protocolos configurados em fábrica, caso qualquer um dos protocolos tenha sido alterado ou excluído, basta clicar no botão:

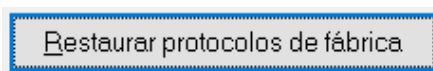


Será apresentada a mensagem:

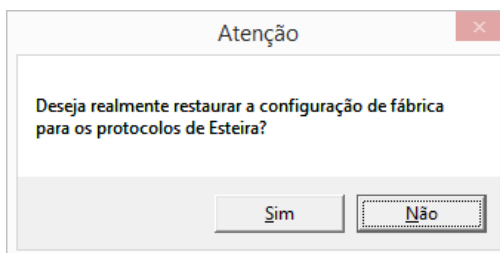

Clicar em SIM, para confirmar, ou em NÃO, para cancelar a ação. Ao clicar em Sim o sistema irá retornar a configuração original. Este procedimento permite a recuperação da configuração inicial. Todos os protocolos criados pelo usuário serão perdidos.

Selecionando Protocolo como padrão


O sistema ERGOPC 13 permite a configuração do protocolo mais utilizado, ou seja, o protocolo padrão. Para definir o protocolo que será ativo ao iniciar o exame clique sobre o protocolo desejado e clique no botão:

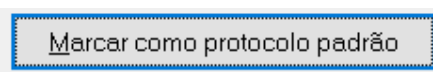

Ao entrar para fazer o exame o protocolo será ativado automaticamente. Por exemplo se na maioria dos exames for utilizado o protocolo Bruce, clique sobre ele e clique na opção marcar como Protocolo Padrão.

Utilizando Treinamento

Para utilizar treinamento, clicar no botão de referência. Para CONFIGURAR RECUPERAÇÃO, clicar neste botão de referência. A caixa de configuração, abaixo, irá abrir. Selecione e insira as informações desejadas. Clicar em OK, para salvar esta configuração, ou clicar em CANCELAR, para cancelar a ação.

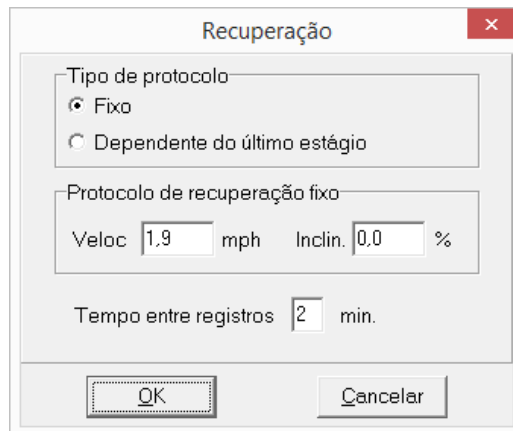

Recuperação

Tipo de protocolo


Fixo
 Dependente do último estágio


Protocolo de recuperação fixo

Veloc. 1,9 mph Incl. 0,0 %

Tempo entre registros 2 min.

OK Cancelar

Para configurar a FÓRMULA PARA CÁLCULO DE VO₂MAX, clicar no ícone . A janela de configuração, abaixo, irá abrir (protocolo dependente, isto é, para cada protocolo é aberta uma tela diferente). Selecione a fórmula desejada clicando no seu botão de referência. Para salvar as alterações e fechar a caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS, clicar em OK. Para cancelar a ação, clicar em CANCELAR.

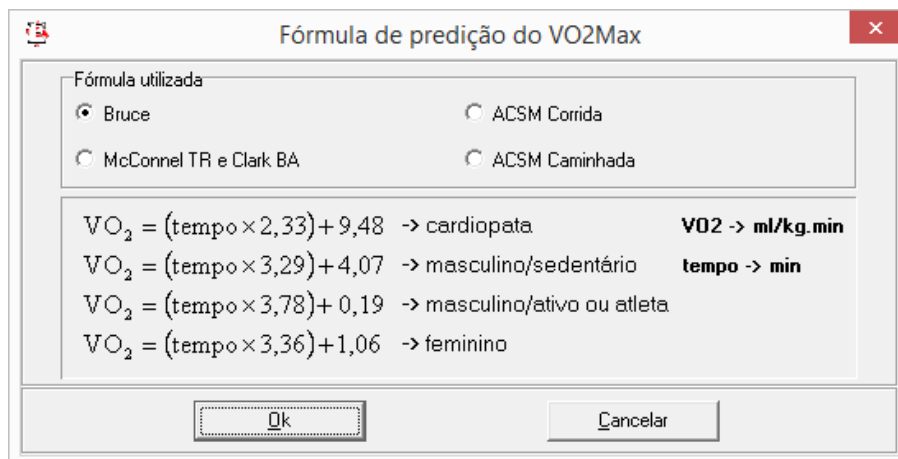

Fórmula de predição do VO₂Max

Fórmula utilizada


Bruce ACSM Corrida
 McConnel TR e Clark BA ACSM Caminhada

$VO_2 = (\text{tempo} \times 2,33) + 9,48$ -> cardiopata **VO₂ -> ml/kg.min**
 $VO_2 = (\text{tempo} \times 3,29) + 4,07$ -> masculino/sedentário **tempo -> min**
 $VO_2 = (\text{tempo} \times 3,78) + 0,19$ -> masculino/ativo ou atleta
 $VO_2 = (\text{tempo} \times 3,36) + 1,06$ -> feminino

Ok Cancelar


Aptidão Cardiorrespiratória

Para configurar a APTIDÃO CARDIORESPIRATÓRIA, clicar na guia de sua referência. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada. Clicar no botão referente à tabela a ser utilizada. Para salvar as alterações e fechar a caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS, clicar em OK. Para cancelar a ação, clicar em CANCELAR.

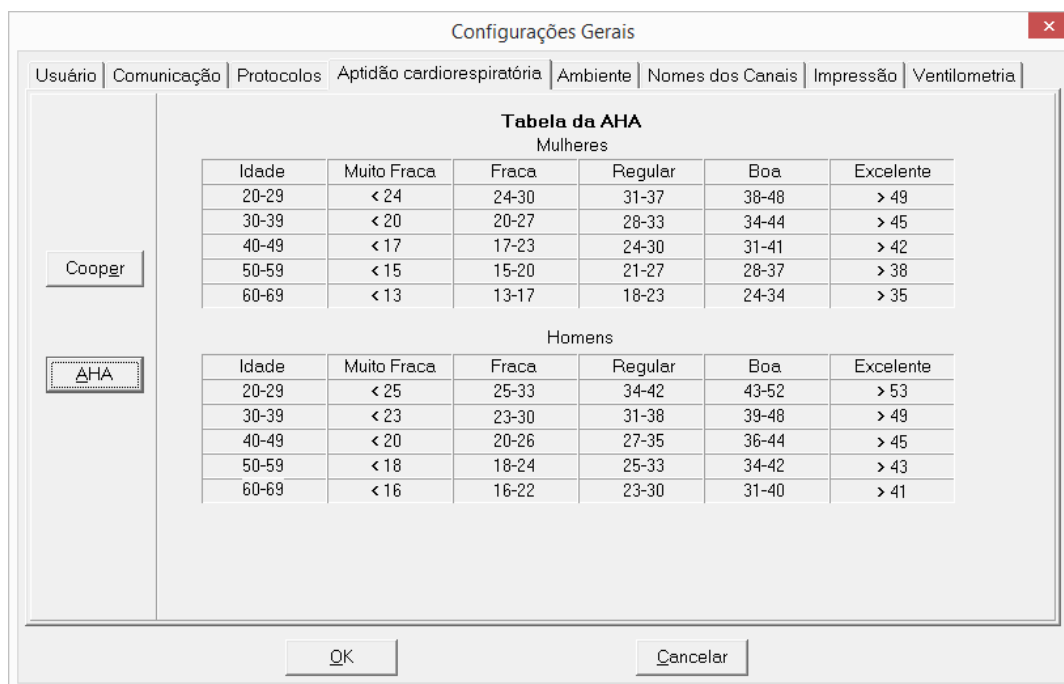

Ambiente

Para configurar o AMBIENTE, clicar na guia de sua referência. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada.

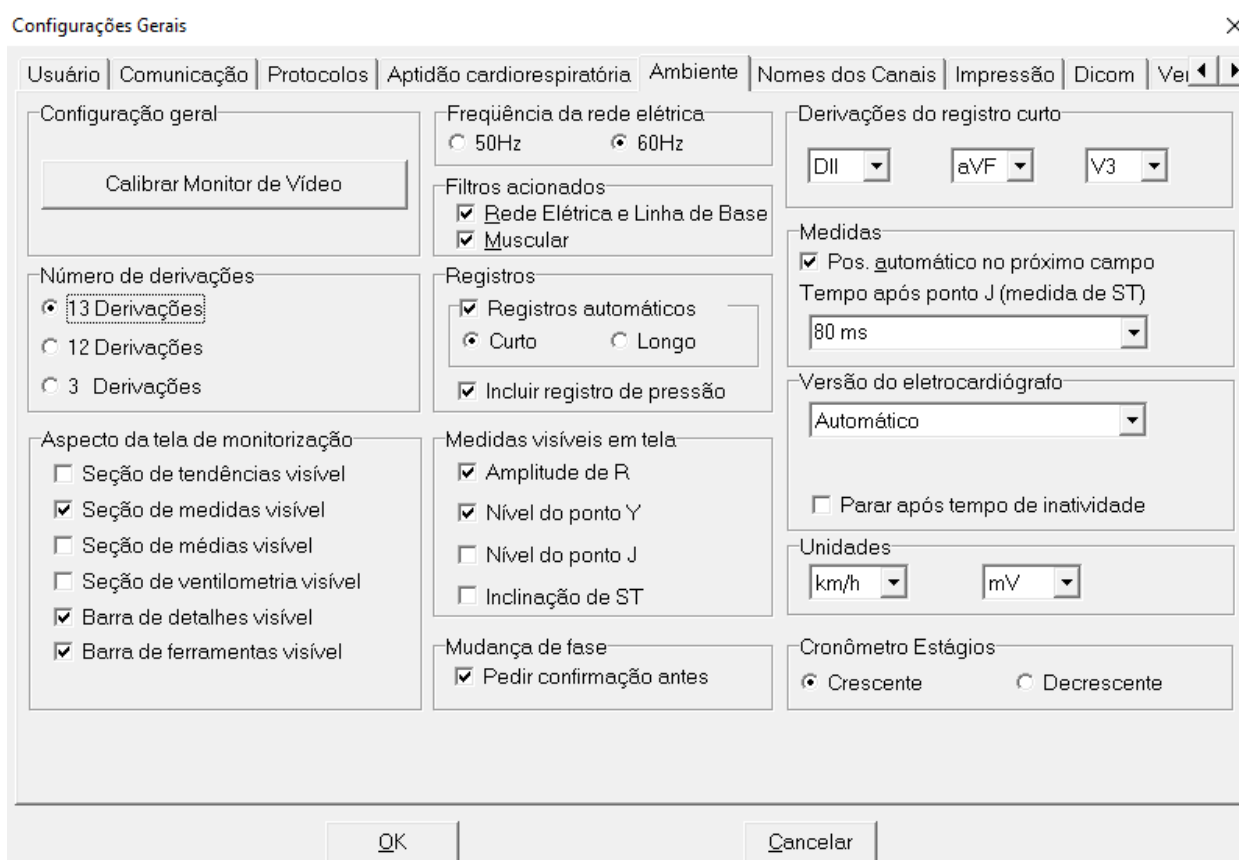

Número de Derivações

Nesta opção deverá ser indicada a quantidade de canais da prova de esforço. As escolhas possíveis são 3, 12 ou 13 derivações. O padrão é 13 derivações. Clique sobre o botão de opção ao lado do número de derivações que deseja e ele será acionado. Isso não impede que um exame seja realizado com outro número de derivações. A cada exame o usuário poderá escolher quantas derivações deseja utilizar.

Definindo Aspecto da Tela de Monitorização

O sistema ERGOPC 13 permite a configuração da tela de monitorização onde poderá ser escolhido o tipo de tela e as barras que serão exibidas:

Seção de Tendências visível
Seção de Medidas visível
Seção de Médias visível (opcional)
Seção de Ventilometria visível
Barra de Detalhes visível
Barra de ferramentas visível

Frequência de Rede Elétrica

Permite a seleção da frequência de Rede Elétrica em 50Hz ou 60Hz.

Filtros Acionados

Esta opção permite o acionamento prévio dos filtros, para que o sistema inicialize com o sinal limpo. Nada impede que os filtros sejam acionados no decorrer do exame, mas caso queira que o exame seja inicializado com os filtros clique os botões de opção ao lado do filtro e ele será acionado.

Registros automáticos

Consiste em definir a forma como os registros serão impressos. Permite a seleção do tipo de registros automáticos, onde:

Tipo Curto – Quando esta opção é selecionada o registro automático gerará registros curtos. Neste caso apenas as derivações selecionadas no campo Derivações do Registro Curto e o CM5(ou canal de ritmo quando em 12 derivações).

Tipo Longo – Quando esta opção é selecionada o registro automático gerará registros com todas as derivações.

Pode-se ainda marcar para incluir o registro de pressão.

Incluindo registro de pressão


Permite incluir no registro os valores das pressões no momento do registro. Caso esta opção não seja habilitada o sistema fará a impressão dos registros sem incluir os valores de pressão.

Determinando as medidas visíveis em Tela

O menu de configuração de Ambiente permite a determinação de vários aspectos da apresentação do exame na tela e uma dessas opções são as medidas que podem ser selecionadas na lista.

- Amplitude de R
- Nível do ponto Y
- Nível do Ponto J
- Inclinação de ST


Em MEDIDAS VISÍVEIS EM TELAS, deve-se marcar duas opções. Caso mais de uma opção ou somente uma seja marcada, a caixa de alerta, abaixo, irá abrir. Clique em OK e marque as opções desejadas.

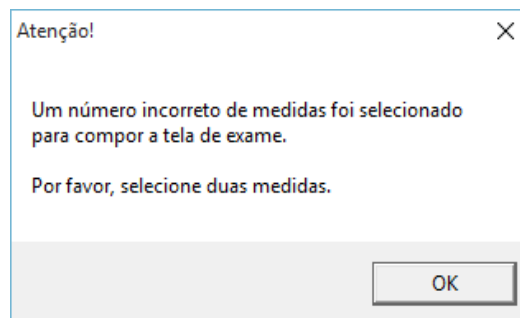

Para acionar a medida clique sobre o seu nome e para desativar clique novamente sobre ela, observe que ao lado do nome da medida é apresentada o quadro marcado indicando que a medida será apresentada na tela do exame. É possível selecionar dois tipos de medidas, caso seja selecionado um número maior o sistema irá emitir uma mensagem informando que não é possível.

Determinando a forma de mudança de fase

Caso esteja habilitada a opção pedir confirmação antes da mudança de fase, o sistema irá questionar se realmente se deseja mudar de fase. Caso esta opção esteja desabilitada ao pressionar F5 para mudança de fase o sistema irá mudar automaticamente sem questionar.

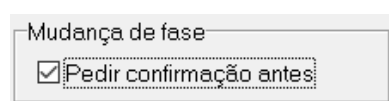


Determinando as derivações do Registro Curto

Na parte de impressão veremos que existe a possibilidade de selecionar a impressão de registros com as médias e neste caso o sistema irá mostrar apenas 3 derivações que devem ser selecionadas na opção Derivações do Registro Curto.

OBS: No registro curto serão impressas as 3 (três) derivações escolhidas na próxima imagem, mais o CM5. No caso de exames executados em 12 (doze) derivações. Quando for selecionada a opção de Impressão de registro curto com médias somente estas derivações e o canal de ritmo serão impressos ao se realizar um registro curto.


Para selecionar as derivações que devem ser apresentadas no registro curto clique na seta ao lado do nome da derivação e será apresentada uma lista conforme a figura:

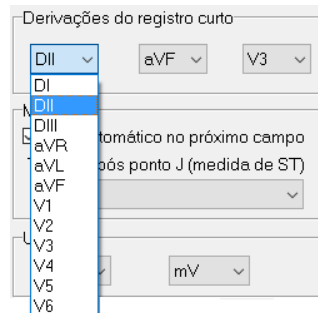

Medidas

Na opção de medidas pode ser definido a forma utilizada para a medida de ST, o usuário tem a opção de realizar a medida automaticamente ou manualmente. As opções são: 80 ms, (R-R)/16 e (R-R)/8.

Ao selecionar o Pos. Automático no Próximo Campo, clique na seta para selecionar a forma para a realização da medida.

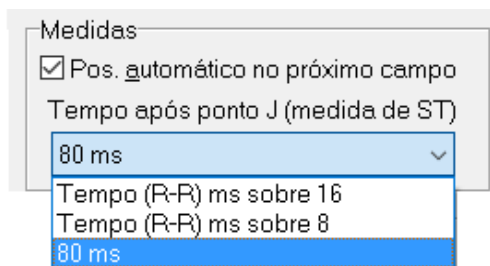


Versão do Eletrocardiógrafo

Há 2 modelos de eletrocardiógrafos da Micromed que funcionam com o software Wincardio. O Eletrocardiógrafo USB e o Eletrocardiógrafo MEBT-100.

As opções para seleção do tipo de Eletrocardiógrafo são:

- **Automático:** Identifica o eletrocardiógrafo compatível com o Software automaticamente.
- **USB:** Identifica somente os Eletrocardiógrafos USB em sua revisão 1.
- **USB R2:** Identifica somente os Eletrocardiógrafos USB em sua revisão 2.
- **Bluetooth:** Identifica somente os Eletrocardiógrafos MEBT-100.
- **BlueAir:** Identifica os Eletrocardiógrafos que são utilizados com o adaptador Bluetooth BlueAir.

Existe também a opção de parar transmissão de sinal do eletrocardiógrafo após tempo de inatividade, a fim de conservar a bateria do aparelho. Para retornar, basta clicar no botão MONITORIZAÇÃO.

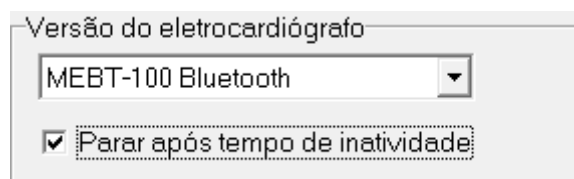


Determinando as unidades de medidas

Neste campo o usuário seleciona a unidade de medida a ser apresentada nas telas e impressos do ERGOPC 13.

Unidade de Velocidade - O usuário escolhe entre mph ou km/h. Clique na seta para definir a velocidade:



Unidade de Amplitude - O usuário escolhe se quer que as medidas de amplitudes na tela de medidas sejam feitas em mV (milivolt) ou mm (milímetro).

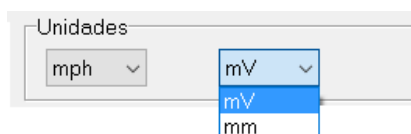


Cronômetro Estágios

Organiza os Estágios em ordem crescente ou decrescente.


Nomes dos Canais

Para configurar os NOMES DOS CANAIS, clicar na guia de sua referência. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada. Clicar e digitar os nomes, conforme desejado, nos campos referentes à sua configuração em: NOMES DOS CANAIS (12 E 13 DERIVAÇÕES); NOMES DOS CANAIS (3 DERIVAÇÕES). Para voltar à configuração padrão do sistema, clicar em DEFAULT. Para salvar as alterações e fechar a caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS, clicar em OK. Para cancelar a ação, clicar em CANCELAR.

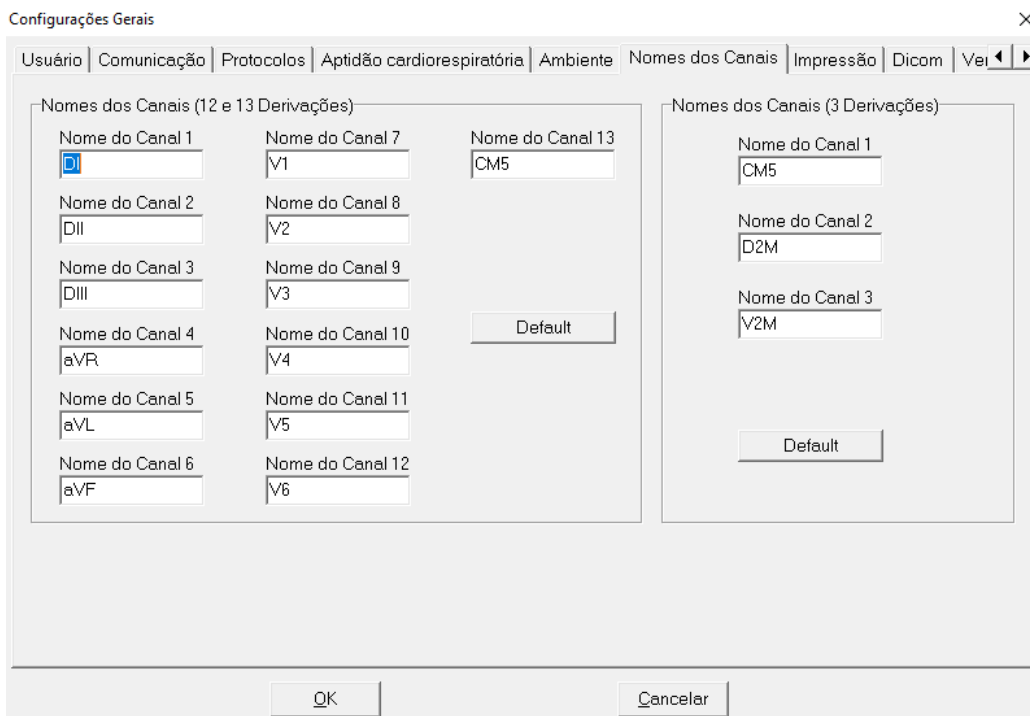


Impressão

Para configurar a IMPRESSÃO, clicar na guia de sua referência. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada.

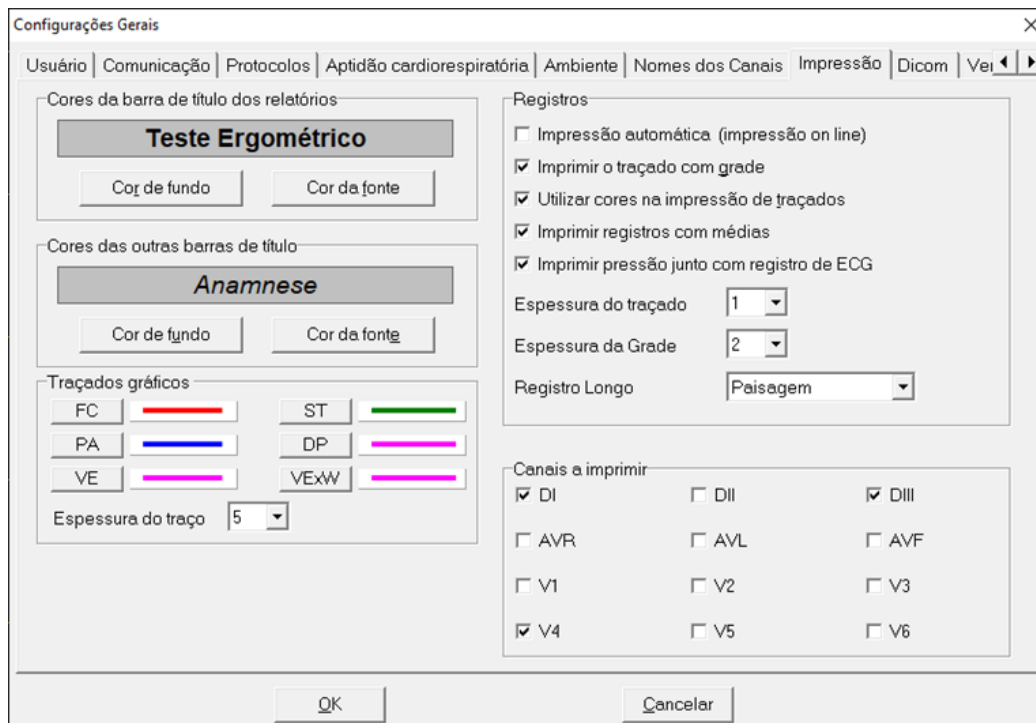

Cores da barra de título dos relatórios

Para modificar a cor da barra de título dos relatórios clique no botão cor do Fundo e será apresentada a paleta de cores:

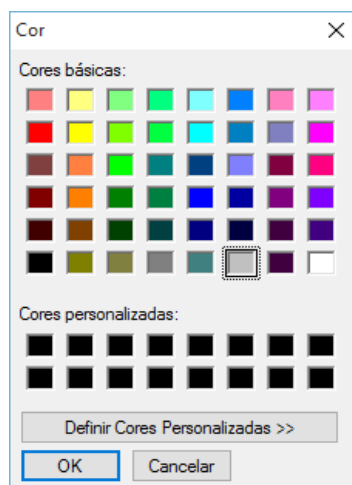

Clique sobre a cor desejada e clique em OK para alterar a cor, ou em Cancelar para cancelar a ação.

Para modificar a cor das letras, ou seja, da fonte, clique sobre o botão Cor da Fonte, selecione a cor desejada e finalize clicando em OK, ou em Cancelar para cancelar a ação.

Cores das Barras de subtítulo

Para modificar a cor das Barras de Títulos clique sobre o botão cor do fundo e será apresentada a paleta de cores.

Clique sobre a cor desejada e clique em OK, ou em Cancelar para cancelar a ação.

Para modificar a cor das letras ou seja da fonte clique sobre o botão Cor da Fonte, selecione a cor desejada e finalize clicando em OK, ou em Cancelar para cancelar a ação.

Cores dos Gráficos do TE

O sistema permite a configuração das cores e a espessura do traçado para os gráficos de FC, ST, PA, DP, VE, VExW. Para isto basta clicar nos botões respectivos e fazer a seleção da cor. O valor da espessura será aplicado a todos os gráficos.

Configurando os registros

Impressão automática (Impressão On Line)	Quando esta opção é selecionada a cada registro é feita a impressão automaticamente. Caso durante a execução do exame esta opção esteja desabilitada os traçados poderão ser impressos no final do exame.
Imprimir o Traçado com Grade	Quando ativo coloca um grid milimetrado no fundo do ECG no momento da impressão.
Utilizar cores na Impressão do traçado	O traçado será impresso com a cor selecionada para a impressão. Caso esta opção esteja desabilitada o sistema irá imprimir os traçados em preto independente da cor selecionada em tela. Aconselhamos que essa opção seja desligada para aumentar a velocidade de impressão dos traçados.

Imprimir registros com médias	Ao selecionar esta opção o sistema irá imprimir os registros com as médias.
Imprimir Pressão junto com registro de ECG.	Esta opção permite que ao selecionar a impressão do ECG será impresso os valores de pressão.
Espessura do Traçado	Permite que o usuário corrija a espessura da impressão do traçado em função da resolução da impressora usada no momento.
Espessura da Grade	Permite que o usuário corrija a espessura da impressão da grade milimetrada em função da resolução da impressora usada no momento.
Registro Longo	Permite que o usuário escolha entre os formatos de impressão Retrato ou Paisagem

Selecionando derivações para impressão

As opções selecionadas dentro de “Canais a imprimir” farão parte da impressão dos registros.

Canais a imprimir

<input checked="" type="checkbox"/> DI	<input checked="" type="checkbox"/> DII	<input checked="" type="checkbox"/> DIII
<input checked="" type="checkbox"/> AVR	<input checked="" type="checkbox"/> AVL	<input checked="" type="checkbox"/> AVF
<input checked="" type="checkbox"/> V1	<input checked="" type="checkbox"/> V2	<input checked="" type="checkbox"/> V3
<input checked="" type="checkbox"/> V4	<input checked="" type="checkbox"/> V5	<input checked="" type="checkbox"/> V6

DICOM

A partir das versões 5 do ErgoPC 13, já existe a possibilidade de uso de recursos de gestão de imagem via Protocolo DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Os Servidores de Worklist e de Envio podem ser configurados nessa guia:

Obter ou Renovar Licença:

Botão para obter ou renovar a licença DICOM de seu eletrocardiógrafo. A licença é obtida através da leitura do Número de Série do Eletrocardiógrafo. Ver **Item 10 – Módulo Dicom**.

Servidor Worklist

Local onde é configurado o Servidor para solicitação da Worklist, a Porta de comunicação da Worklist, o nome do Local da Aplicação e o nome de Destino da Aplicação. É possível ainda, verificar o Status do Servidor de Worklist (Offline ou Online);

Servidor de Envio:

Local onde é configurado o Servidor para envio dos Dados, a Porta de comunicação do Servidor de Envio, o nome do Local da Aplicação e o nome de Destino da Aplicação. É possível ainda, verificar o Status do Servidor de Envio de Dados (Offline ou Online) e escolher o formato da imagem que será exportada JPEG ou PDF;

Pode-se configurar se deseja apagar os **Arquivos DCM** (padrão DICOM) e **JPG/PDF** na pasta “C:\Users\Public\Micromed\ErgoPc\DICOM\Temp” após o envio.

VENTILOMETRIA



ATENÇÃO!

Para a utilização do módulo VENTILOMETRIA, é necessário que se tenha um Ventilômetro FlowMET (veja figura abaixo) conectado ao computador.

Para informações sobre o Ventilômetro FlowMET, favor consultar a Micromed Biotecnologia.

Para mais detalhes sobre a funcionalidade e utilização do Ventilômetro FlowMET, favor consultar suas Instruções de Uso.



Para configurar a VENTILOMETRIA, clicar na guia de sua referência. A caixa de configuração, abaixo, será apresentada. Para configurar: Utilizar VENTILOMETRIA; MONITORAR DURANTE A RECUPERAÇÃO e GRÁFICO ALTERNATIVO, basta clicar em seus botões de referência. Clicar nos campos referentes à FATOR DE CORREÇÃO e INTERVALO DE CAPTURA e inserir os dados desejados.

The screenshot shows the 'Configurações Gerais' (General Settings) window with the 'Ventilometria' (Ventilometry) tab selected. The window has a title bar with a close button (X) and a menu bar with options: 'Usuário', 'Comunicação', 'Protocolos', 'Aptidão cardiorespiratória', 'Ambiente', 'Nomes dos Canais', 'Impressão', and 'Ventilometria'. The 'Ventilometria' section contains the following controls:

- Utilizar Ventilometria
- Fator de Correção: 1,00
- Monitorar durante recuperação
- Calibrar FlowMET
- Intervalo de Captura: 15 segundos
- Gráfico alternativo: VE x Carga, VE x FC

The 'Zonas de Treinamento' (Training Zones) section includes a 'Padrões de Prescrição' (Prescription Patterns) list on the left with buttons 'Adicionar', 'Remover', and 'Renomear'. The main area is a table with columns for 'Zona', 'Interior', and 'Superior', each with sub-columns for '%' and 'Referência'. Below the table are buttons: 'Mover para cima', 'Mover para baixo', 'Adicionar linha', and 'Remover linha'. At the bottom of the window are 'OK' and 'Cancelar' buttons.


Zona	Interior		Superior	
	%	Referência	%	Referência




ATENÇÃO!

Consulte as Instruções de Uso do Ventilômetro FlowMET para orientação quanto à calibração do sistema.

Em ZONAS DE TREINAMENTO você poderá adicionar um PADRÃO DE PRESCRIÇÃO clicando em ADICIONAR. A caixa para inserção do nome do padrão, abaixo, abrirá. Digite o nome e clique em OK para salvar a informação, ou em CANCELAR para cancelar a ação.

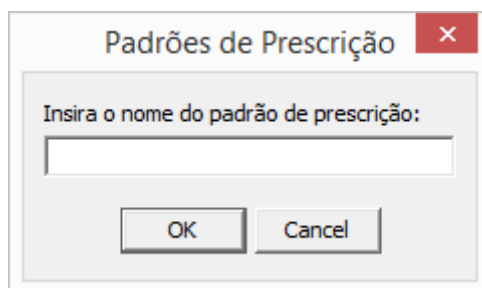

Para excluir um PADRÃO DE PRESCRIÇÃO, selecione o nome, clicando em cima dele e, em seguida, clique em REMOVE. CUIDADO! A remoção é instantânea, ou seja, nenhuma caixa de confirmação irá abrir. Para renomear um PADRÃO DE PRESCRIÇÃO, selecione-o na lista clicando sobre seu nome e, em seguida, em RENAMEAR. A caixa para alteração do nome, abaixo, irá abrir. Insira o novo nome e clique em OK, para confirmar a alteração, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

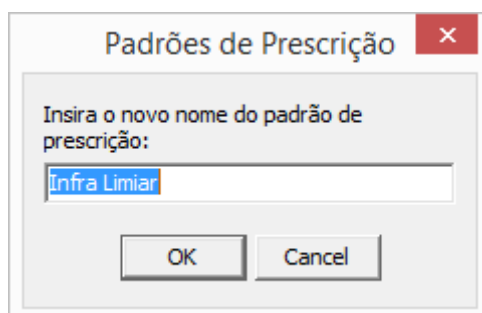


Na caixa de demonstração da ZONA DE TREINAMENTO, abaixo, você poderá ordenar as linhas da tabela selecionando a desejada e clicando em MOVER PARA CIMA ou MOVER PARA BAIXO. A linha, automaticamente, será mudada de posição conforme o comando dado. Para adicionar uma linha, clicar em ADICIONAR LINHA. Ela surgirá na última posição da tabela. Para preencher os dados, basta clicar dentro de cada célula e digitar as informações. Nas células de REFERÊNCIA, clicar duas vezes e uma seta lateral abrirá. Selecione entre as 4 opções existentes – LVI; LVII; FC PICO; FC MAX – clicando sobre o seu nome. Para remover uma linha, clicar em REMOVE LINHA. Para salvar as alterações e fechar a caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS, clicar em OK. Para cancelar a ação, clicar em CANCELAR.

Zona	Inferior		Superior	
	%	Referência	%	Referência
Aquecimento 5 minutos	70,0%	LVII	80,0%	LVII
Caminhada 10 minutos	80,0%	LVII	90,0%	LVII
Corrida 10 minutos	90,0%	LVII	110,0%	LVII
* Recuperação 5 minutos	70,0%	LVII	80,0%	LVII

Rede

Caso haja necessidade de configurar proxy para uso em modo de DICOM, configurar nesta guia:

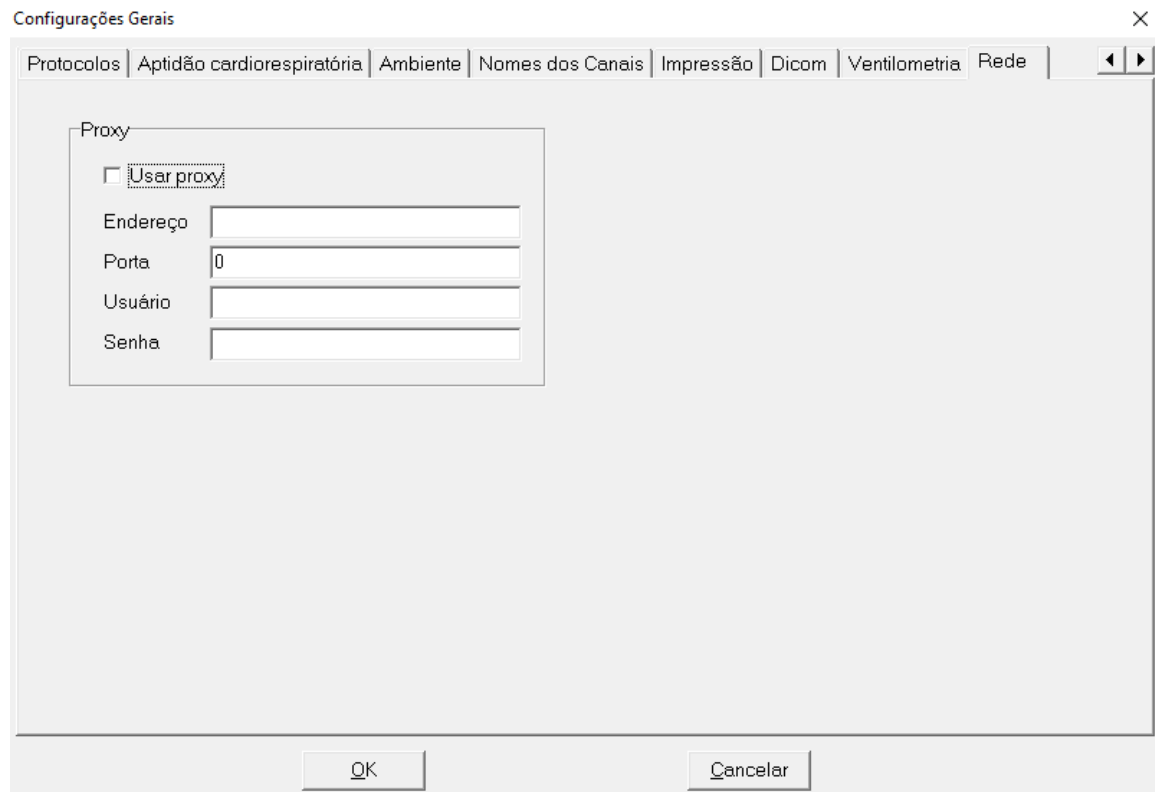

8.3. Funções do Sistema


Cadastrando um paciente

O sistema ERGOPC 13 permite o cadastramento de paciente antes mesmo do exame ser realizado. Isso permite criar uma rotina onde a secretária digita os dados do paciente e, posteriormente, o médico realiza o exame. O paciente deve ser cadastrado antes de iniciar a prova de esforço.

Siga os procedimentos a seguir para entrar com os dados do Paciente.

1. Clique na opção Paciente;
2. Clique em Novo;
3. A caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Insira os dados do paciente nos campos de referência. Pressione a tecla TAB para mudar de campo;

Observações: Os dados Nome, Sexo e data de Nascimento devem ser informados obrigatoriamente para evitar homônimos. Caso estes dados não sejam informados o sistema apresentará a imagem a seguir e não passará para a próxima tela.

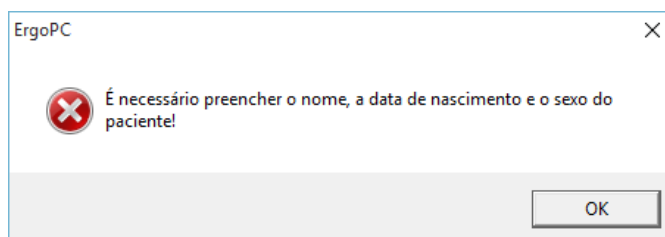

4. Clique sobre o botão Salvar;

5. Clique sobre o botão OK.

A Janela de cadastro de Paciente permite iniciar um novo exame ou ECG em Repouso.

Quando se desejar que o Teste de Esforço seja feito imediatamente após o cadastramento do paciente, deve-se clicar na opção “Novo Exame” e será apresentada a tela de Anamnese.



Quando se desejar iniciar um ECG de Repouso deve-se clicar no botão “ECG de Repouso” e automaticamente será apresentada a tela de exame de ECG Repouso.


Esta opção permite que seja realizado apenas o exame de ECG em Repouso, portanto será inabilitada a opção de mudança de fase. A manobra será configurada automaticamente para “Deitado”, existindo ainda a possibilidade de alterar para: “Em pé”, “Apnéia inspiratória”, “Apnéia Expiratória” ou “Hiperpnéia”. Consulte o Apêndice B para maiores detalhes com relação à execução de um exame de ECG em repouso.

Clique em “Salvar”, para salvar os dados. Clique em “Novo Exame” para salvar os dados e ir para tela de “Anamnese”. Clique em “ECG de Repouso” para salvar os dados e ir para a tela de exame. Clicar em OK, para salvar os dados e fechar a tela “Paciente”, ou em “Cancelar”, para cancelar a ação.


Deletar um paciente.

Siga os procedimentos a seguir para deletar um Paciente:

1. Na Barra de Menu, clicar em PACIENTE → ABRIR ou no ícone , na barra de Ferramentas.
2. A tela PACIENTE irá abrir;
3. Selecionar o paciente que deseja excluir digitando as iniciais do nome ou o nome completo no campo PACIENTE SELECIONADO ou, ainda, pela barra de rolagem lateral da lista;
4. Clicar em ;
5. A caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM para excluir ou em NÃO, para cancelar a ação.

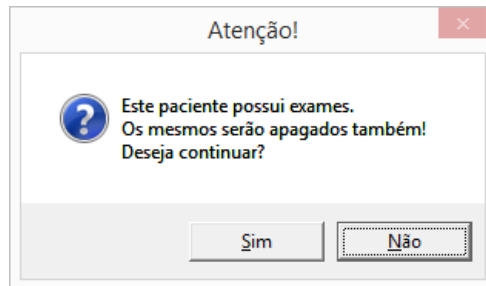

6. Clicar em OK para salvar as alterações e sair da tela PACIENTE, ou em CANCELAR, para cancelar a ação;

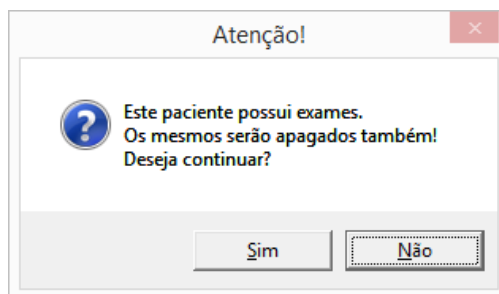

Alterando dados de um paciente

Caso você queira alterar algum dado do paciente como por exemplo a data de nascimento, ou qualquer outro dado basta seguir os passos abaixo:

1. Clique no menu Paciente e depois na opção Abrir;

Ao clicar na opção abrir será apresentada a tela de cadastro que permite visualizar todos os pacientes cadastrados. Esta tela permite a seleção do paciente que se deseja fazer o exame. Para selecionar o paciente cadastrado utilize a barra de rolagem vertical localizada ao lado da data de nascimento.

The screenshot shows a software window titled "Paciente" with two tabs: "Abrir" and "Dados". The "Abrir" tab is active. It contains a "Pacientes" section with a "Paciente selecionado" field containing "Francisco Dantas da Silva" and a "Data de nascimento" field containing "13/12/1978". Below this is a table listing patients:

Nome	Data de nasc.
Clive O'Á'mally	12/12/1980
Dayse Margarida	01/01/1980
FÁ'bi GuimarÃ'es	12/12/1974
FÁ'bi Teixeira	17/12/1968
Francisco Dantas da Silva	13/12/1978

To the right of the table are buttons for "Novo paciente" and "Deletar paciente". Below the patient list is an "Exames" section with a table:

Número	DATA
766	07/02/2017

Buttons for "Abrir exame", "Novo exame", "Deletar exame", and "ECG de repouso" are located to the right of the exams table. At the bottom of the window are "OK" and "Cancelar" buttons.

2. Clique sobre o Nome do Paciente que deseja alterar os dados;
3. Clique sobre a Guia "Dados";
4. Será apresentada a tela com os dados do avaliado selecionado. Faça as alterações necessárias;

The screenshot shows the "Paciente" window with the "Dados" tab active. It displays various fields for patient information:

- Nome: Teste 9
- Sexo: Masculino (dropdown menu)
- Data de nasc.: 17/12/1968
- Prontuário: 656556454
- RG: (empty field)
- CPF: (empty field)
- Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Cidade: wwww
- Telefone (res.): 33333333
- Estado: to
- Telefone (trab.): 11111111
- CEP: 11111111

Buttons for "Salvar", "Novo exame", "ECG de repouso", "OK", and "Cancelar" are visible at the bottom of the form.

5. Clique sobre o botão Salvar;
6. Clique sobre o botão OK;

Abrindo Exame

1. Clique na opção PACIENTE;
2. Clique em Abrir;

Nome	Data de nasc.
ANTONIO MANSO PACÍFICO DE OLIVEIRA	10/01/1948
MARIA SOARES LIMA	15/06/1955

Número	Data

3. Clique sobre o nome do paciente que deseja abrir o exame

Observações: Para localizar facilmente o nome do paciente digite a letra inicial do nome no campo Paciente Selecionado e o sistema mudará automaticamente para o primeiro nome que iniciar com a letra.

Observe que na parte inferior da tela são mostrados todos os exames realizados pelo paciente selecionado

4. Clique sobre o exame que deseja analisar;
5. Clique em ABRIR EXAME;

Criando um Novo Exame Ergométrico

Para que seja iniciado um novo exame Ergométrico, é necessário que o paciente já esteja cadastrado, conforme descrito anteriormente. Siga os passos para iniciar uma avaliação.

1. Clique no menu Paciente e depois na opção Abrir;
2. Aparecerá a Janela "Paciente";
3. Selecione o paciente pela tabela de avaliados. Basta clicar sobre o nome do avaliado e ele ficará marcado com uma tarja;
4. Clique sobre o botão Novo Exame.
5. Aparecerá a tela de Anamnese:

Anamnese

Dados do exame
Antecedentes

Dados do paciente

Nome

Prontuário

Data de nascimento

Sexo

RG

CPF

Idade anos

Peso kg

Estatura cm

IMC

Condicionamento

FCmáx bpm

FCsub bpm

VVM l/min

Dados do exame

Data Hora Número Convênio Responsável

CRM Solicitante Numero de Acesso

Indicação clínica

A Anamnese consiste em uma pré-avaliação do paciente onde devem ser informados os dados como Peso, altura, condicionamento, bem como os dados cadastrais como convênio, Responsável, CRM, solicitante e indicação clínica.

Após preencher os campos de Anamnese clique na GUIA ANTECEDENTES e preencha os dados do paciente. Ao finalizar o preenchimento, clicar em OK, para salvar as alterações e fechar a tela de ANAMNESE, ou em CANCELAR para cancelar a ação. Em ANTECEDENTES, devem ser selecionados os dados:

Assintomático	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Revasc. Miocard.	Revascularização Miocárdica. Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Infarto do Miocárdio	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Valvopatia	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Precordialgia	Permite a escolha entre NENHUMA, ATÍPICA ou TÍPICA apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Cinecoronariografia	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Avaliação Clínica Inicial	Campo para a entrada da avaliação clínica inicial. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo.
Medicamentos em uso	Permite a escolha de uma frase pré-gravada de medicamentos. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo.
Diabete	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.

Hipertensão	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Obesidade	Permite a escolha entre as opções OBESIDADE, SOBREPESO e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Tabagismo	Permite a escolha entre as opções TABAGISTA, EX-TABAGISTA e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Dislipidemia	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Estresse	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Risco Familiar	Permite a escolha de uma frase pré-gravada de risco familiar. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo.

8.4. Preparando o Paciente

Após fazer as configurações no sistema conforme explicações do capítulo anterior, poderemos iniciar um exame. Observe que ao entrar na tela do ERGOPC 13 a monitorização dos sinais cardíacos é iniciada automaticamente.

A variação da linha de base do sinal cardíaco ocorre devido à diferença de potencial elétrico existente entre a pele do paciente e o eletrodo. Com esta diferença de potencial ocorre o efeito pilha, que faz com que a linha de base varie. Apesar da existência do Filtro de variação de linha de base e 60 Hz, que reduz quase totalmente a variação da linha de base, o preparo da pele do paciente é de fundamental importância para a aquisição de um bom traçado. A seguir serão descritas algumas indicações de como fazer um bom preparo de pele.

1. Remova a camada oleosa da pele do paciente utilizando um solvente. Os solventes mais comuns são: éter, acetona e álcool.
2. Remova a camada córnea da pele do paciente utilizando uma esponja áspera, gaze ou lixa fina. A camada córnea da pele é um isolante do sinal cardíaco e a sua remoção melhora muito a qualidade do sinal adquirido.
3. Utilize um gel condutor nos eletrodos de maneira a aumentar o contato elétrico. Outras substâncias, tais como soluções salinas, têm sido também empregadas, mas o uso do gel é mais prático. Fique atento, pois alguns eletrodos, como os de carbono, exigem procedimentos diferentes.
4. Mantenha os eletrodos em perfeitas condições, sempre livres de gel condutor ou outras impurezas. Tenha em mente que o material de que é feito o eletrodo influencia fortemente na geração de uma diferença de potencial entre ele e a pele. Isto ocorre devido à natureza dos potenciais inerentes aos diferentes materiais. Um eletrodo de metal tem uma diferença de potencial muito maior do que um eletrodo de carbono. Isto, no entanto, não significa que os eletrodos de metal não possam ser usados, mas sim que trabalhando com estes eletrodos os cuidados com o preparo devem ser maiores do que os cuidados utilizando eletrodos de carbono.

-
5. Nunca utilize ao mesmo tempo eletrodos de tipos diferentes. Procure utilizar um jogo de eletrodos que tenham o mesmo tempo de uso e condições similares.
 6. Fixe o eletrodo com uma fita adesiva de boa qualidade exatamente sobre os locais preparados.
 7. Na presença de pelos faça a tricotomia da região onde serão aplicados os eletrodos.

O sistema ERGOPC 13 possibilita a execução de eletrocardiogramas de esforço monitorizando 3, 12 e 13 derivações simultaneamente, clique na opção CONFIGURAÇÃO e na guia AMBIENTE e defina o Número de Derivações.

Escolha dos Eletrodos



Para a execução do eletrocardiograma podem ser utilizados eletrodos descartáveis, próprios para a execução de eletrocardiogramas, ou eletrodos reutilizáveis. Os eletrodos devem ser utilizados juntamente com gel condutivo próprio para a execução de eletrocardiogramas.



Não misture eletrodos de fabricantes ou materiais diferentes e também não misture eletrodos descartáveis com eletrodos reutilizáveis.



A escolha dos eletrodos a serem utilizados juntamente com o Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air deve recair sobre aqueles que tenham registro válido na ANVISA sob pena de causar riscos ao paciente ou ao operador.




Após selecionado os eletrodos, coloque-os no paciente de acordo com as tabelas indicadas. Em seguida, posicione o paciente na esteira e conecte os cabos de sinal aos eletrodos.

Limpeza dos Eletrodos Reutilizáveis

Os eletrodos reutilizáveis devem ser higienizados após cada procedimento utilizando-se gaze embebida em água destilada, pois o gel reage com a superfície de detecção de forma a danificar os eletrodos.


Preparo para 13 Derivações

POSIÇÃO	CÓDIGO	COR
Braço Direito	R – Braço direito	Vermelha
Braço Esquerdo	L – Braço esquerdo	Amarela
Perna Esquerda	F – Perna esquerda	Verde
Perna Direita	RF – Perna Direita	Preta
Manúbrio	MA	Azul
V1	C1	Vermelha
V2	C2	Amarelo
V3	C3	Verde
V4	C4	Marrom
V5	C5	Preto
V6	C6	Roxo

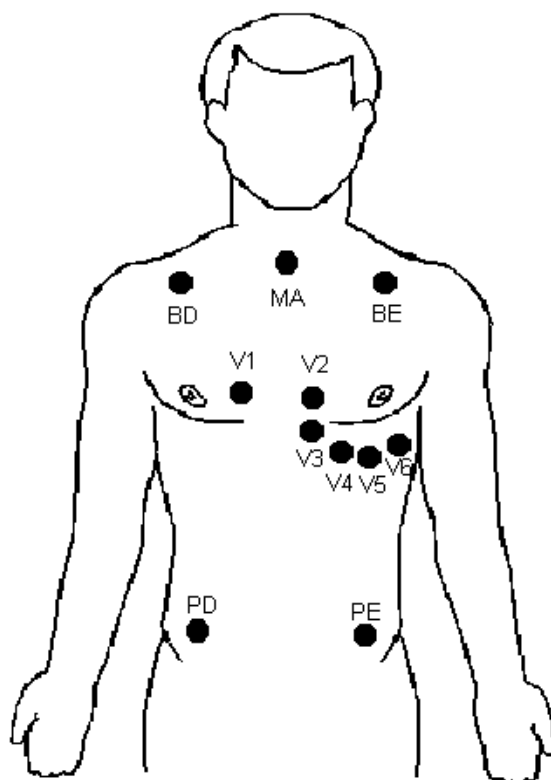


Preparo para 12 Derivações

POSIÇÃO	CÓDIGO	COR
Braço Direito	R – Braço direito	Vermelha
Braço Esquerdo	L – Braço esquerdo	Amarela
Perna Esquerda	F – Perna esquerda	Verde
Perna Direita	RF – Perna Direita	Preta
V1	C1	Vermelha
V2	C2	Amarelo
V3	C3	Verde
V4	C4	Marrom
V5	C5	Preto
V6	C6	Roxo

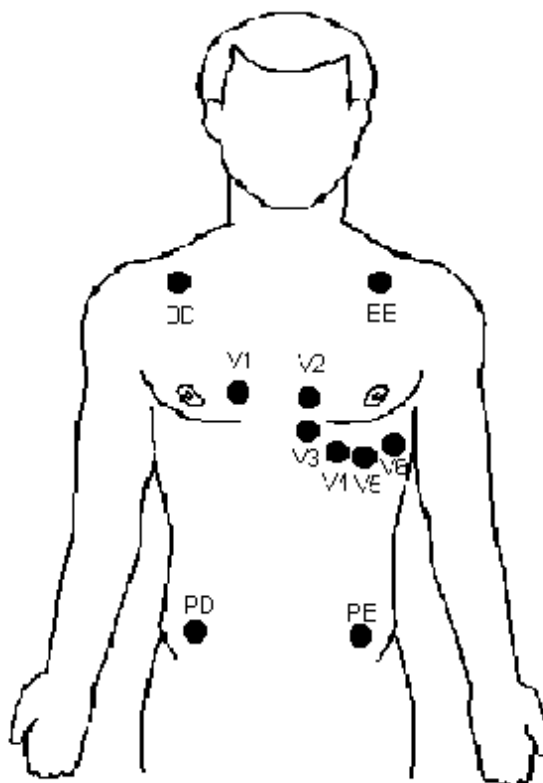

Preparo para 3 Derivações

POSIÇÃO	CÓDIGO	COR
Manúbrio	R – Braço direito	Vermelha
V5	L – Braço esquerdo	Amarela
Perna Esquerda	F – Perna esquerda	Verde
Perna Direita	RF – Perna Direita	Preta
V2	C1	Vermelha

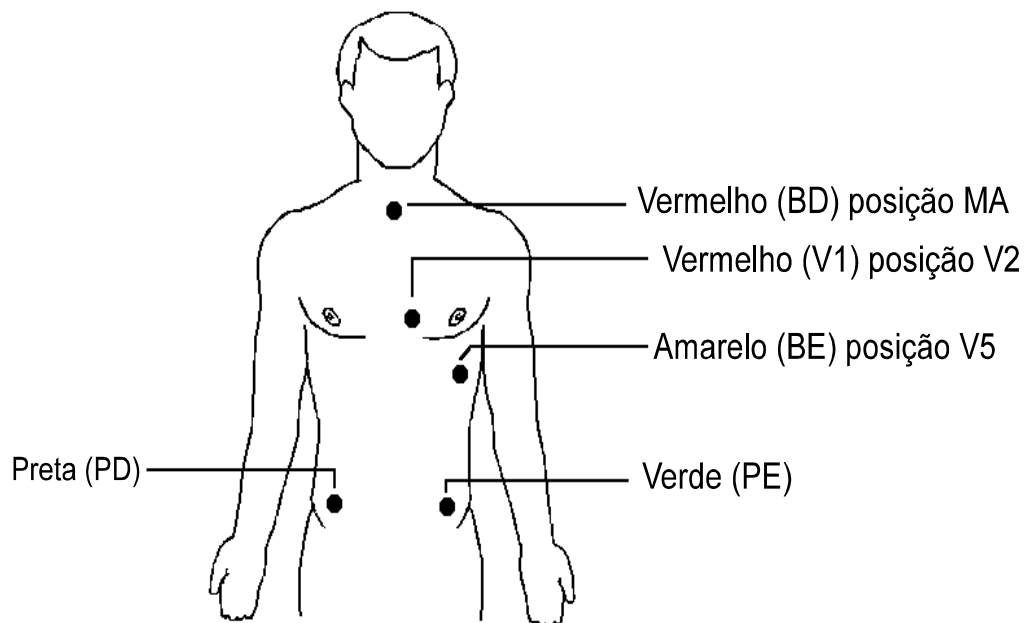

Preparo para ECG de Repouso

O sistema ERGOPC 13 possibilita a execução de eletrocardiogramas de repouso nas doze derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. A monitorização é feita mostrando todas as derivações simultaneamente.

Para este exame devem ser usados somente dez dos onze fios do cabo de ECG (o fio azul do Manúbrio não precisa ser usado, pois não entra na composição de nenhuma das 12 derivações citadas). Posicione os eletrodos (podem ser pinças, pulseiras e ventosas) na pele do paciente.

POSIÇÃO	CÓDIGO	COR
Braço Direito	R – Braço direito	Vermelha
Braço Esquerdo	L – Braço esquerdo	Amarela
Perna Esquerda	F – Perna esquerda	Verde
Perna Direita	RF – Perna Direita	Preta
V1	C1	Vermelha
V2	C2	Amarelo
V3	C3	Verde
V4	C4	Marrom
V5	C5	Preto
V6	C6	Roxo

9. Fazendo o Exame

Ligue o eletrocardiógrafo e abra o Programa ERGOPC 13. Observe que os sinais do paciente já começam a ser monitorados automaticamente.

9.1. ECG de Repouso

O ERGOPC 13 dá ao usuário duas possibilidades de execução do ECG de Repouso. Abaixo descrevemos em linhas gerais quais seriam elas:

Execução do ECG de Repouso independente da realização de um Teste Ergométrico, ou seja, o ERGOPC 13 permite a realização de ECG's em 12 derivações sem que o usuário tenha que preencher a anamnese de uma prova de esforço.

Execução do ECG de Repouso em 12 derivações em qualquer momento de um Teste de Esforço que esteja sendo feito em 12 ou 13 derivações. No caso de um Teste Ergométrico que esteja sendo realizado em 13 derivações, apesar do usuário visualizar o canal CM5, o ECG é impresso apenas nas 12 derivações convencionais.



O equipamento não irá realizar nenhum exame caso a bateria esteja com a carga abaixo do nível mínimo crítico. O Software irá avisar ao usuário sobre a impossibilidade de execução de um exame quando a bateria estiver nesta condição. Abaixo de 5% da capacidade da bateria o software irá bloquear o início de qualquer exame.

Iniciando o ECG de Repouso

A partir da tela PACIENTE, seja cadastrando um novo paciente ou iniciando um novo exame de um paciente já cadastrado, clique no ícone  para que o exame se inicie.

A opção ECG DE REPOUSO permite que seja realizado apenas o exame de ECG em Repouso, portanto será inabilitada a opção de mudança de fase. A manobra será configurada, automaticamente, para DEITADO.

Registrando os sinais

Os registros devem ser realizados manualmente. Para isto, clique em REPOUSO, a partir da área de REGISTROS da tela, ou pressione a tecla F7 para efetuar um registro de 12 derivações onde o canal de ritmo é o DII. Essa ação também enviará o registro para a impressão, caso esteja selecionada a opção IMPRESSÃO ON LINE, na área CONTROLES da tela.

Observações: Ao entrar na tela do ERGOPC 13 a monitorização dos sinais cardíacos é iniciada automaticamente. Para a execução das demais funções do ERGOPC 13, expostas na tela principal, siga as orientações relativas a cada uma delas descritas neste manual e apresentadas a seguir em TESTE DE ESFORÇO.

9.2. Teste de Esforço

Preenchendo a Guia Anamnese

Na janela de Anamnese devem ser inseridos os dados da avaliação. Os campos constam na tabela a seguir:

Nome	Descrição
Peso	O peso deve ser informado, para que o sistema realize os cálculos em Kg. Clicar no campo de referência e digitar o valor, se necessário, usando vírgula.
Estatura	A estatura deve ser informada em cm. Não deixe de informar este dado. Clicar no campo de referência e digitar o valor.
IMC	Índice de Massa Corpórea – calculado pelo sistema em função do peso e da altura do paciente.
Condicionamento	Ao clicar na seta para baixo você poderá optar pelo tipo de condicionamento: Sedentário, Ativo, Atleta ou Cardiopata.
FcMáx	O valor da Frequência Cardíaca máxima é calculado, automaticamente, pela fórmula: $FcMáx = 220 - Idade$.
FcSub	O valor da Frequência Cardíaca Submáxima é calculado, automaticamente, pela fórmula: $FcSub = FcMáx \times 0.85$.
VVM	O valor da Ventilação Voluntária máxima para homens é calculado automaticamente pela fórmula: $VVM = ((0,04301 \times altura(cm)) - (0.029 \times idade) - 2.492) \times 37,5$ O valor da Ventilação Voluntária máxima para mulheres é calculado automaticamente pela fórmula: $VVM = ((0.03953 \times altura(cm)) - (0.025 \times idade) - 2.604) \times 37,5$
Data	Data de realização da avaliação. Este campo é preenchido automaticamente.
Hora	Hora da realização da avaliação. Este campo é preenchido automaticamente.
Número	Número da avaliação. Este campo é preenchido automaticamente.
Convênio	Campo para identificação da fonte pagadora da avaliação. Clicar na seta lateral do campo e selecionar o CONVÊNIO na listagem. Para cadastrar um CONVÊNIO, siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual
Responsável	Responsável pela avaliação, este é o nome que aparecerá no local da assinatura do laudo. Clicar na seta lateral do campo e selecionar o nome do RESPONSÁVEL na listagem. Para cadastrar um RESPONSÁVEL, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual
CRM	Campo para inserção do número do CRM do médico responsável. Clicar no campo de referência e digitar o número.

Solicitante	Solicitante da avaliação. Clicar na seta lateral do campo e selecionar o nome do SOLICITANTE na listagem. Para cadastrar um SOLICITANTE, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual
Indicação Clínica	Permite inserir frases com a indicação clínica da prova de esforço. Clicar na seta lateral do campo e selecionar a INDICAÇÃO CLÍNICA na listagem. Para cadastrar uma INDICAÇÃO CLÍNICA, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual

Observação: A Anamnese deve ser detalhada, pois é a partir dela que o sistema determina o valor do VO2MÁX previsto. Com uma Anamnese precisa, o médico poderá determinar os valores mais indicados para o paciente, tornando possível a sua intervenção durante a prova e definir valores mais adequados.

Preenchendo a guia de Antecedentes

Após preencher os campos de Anamnese clique na guia ANTECEDENTES e preencha os dados do paciente. Ao finalizar o preenchimento, clicar em OK, para salvar as alterações e fechar a tela de ANAMNESE, ou em CANCELAR para cancelar a ação. Em ANTECEDENTES, devem ser selecionados os dados:

Assintomático	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Revasc. Miocard.	Revascularização Miocárdica. Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Infarto do Miocárdio	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Valvopatia	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Precordialgia	Permite a escolha entre NENHUMA, ATÍPICA ou TÍPICA apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Cinecoronariografia	Permite a escolha entre SIM e NÃO apenas clicando na seta lateral e selecionando uma das opções.
Avaliação Clínica Inicial	Campo para a entrada da avaliação clínica inicial. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo. Para cadastrar uma AVALIAÇÃO, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual
Medicamentos	Permite a escolha de uma frase pré-gravada de medicamentos. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo. Para cadastrar um MEDICAMENTO, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual
Diabete	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Hipertensão	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.

Obesidade	Permite a escolha entre as opções OBESIDADE, SOBREPESO e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Tabagismo	Permite a escolha entre as opções TABAGISTA, EX-TABAGISTA e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Dislipidemia	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Estresse	Permite a escolha entre as opções SIM e NÃO, clicando na seta lateral do campo.
Risco Familiar	Permite a escolha de uma frase pré-gravada de risco familiar. Clique dentro do campo e digite a informação ou escolha uma informação a partir da seta lateral do campo. Para cadastrar um RISCO FAMILIAR, siga as instruções siga as instruções do item 9.2.3.1 deste manual

Cadastrando Frases na Biblioteca de Frases da Anamnese

A principal função das frases pré-gravadas é a de diminuir o tempo do exame, pois as frases mais comuns estão disponíveis com um clique do mouse, evitando a digitação.

Você poderá cadastrar as expressões cujo uso se repete muitas vezes na execução de Provas de Esforço.

O sistema de frases pré-gravadas agiliza a realização do exame uma vez que as frases recorrentes podem ser cadastradas uma única vez e posteriormente serem utilizadas em uma infinidade de exames.

Para cadastrar uma frase siga os procedimentos a seguir:

1. Clique no menu “Anamnese” e na guia “Dados do exame” clique em “Indicações” ou na guia “Antecedentes” clique em “Avaliação”, “Medicamentos” ou “Risco Familiar”. Abaixo, as imagens;

The screenshot shows the 'Anamnese' application window with the 'Dados do exame' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Dados do paciente:**
 - Nome: Dr. William Bowen
 - Prontuário: PAT004
 - Data de nascimento: 07/08/1956
 - Sexo: Masculino
 - RG: [Empty]
 - CPF: [Empty]
- Idade:** 60 anos
- Peso:** 80 kg
- Estatura:** 175 cm
- IMC:** 26.12
- Condicionamento:** Sedentário
- FCmáx:** 160 bpm
- FCsub:** 135 bpm
- VWM:** 123.6 l/min (with a 'Recalcular' button)

Dados do exame:

- Data: 22/03/2017
- Hora: 09:03
- Número: 1
- Convênio: [Empty]
- Responsável: [Empty]
- CRM: [Empty]
- Solicitante: [Empty]
- Solicitantes: [Empty]

Indicação clínica:

- [Empty text box]
- [Empty dropdown menu]
- [Empty 'Indicações' button]

Buttons at the bottom: OK, Cancelar.

2. Clique no botão “Inserir”. Observe que aparece um novo tópico conforme a figura a seguir:

3. Digite o mnemônico, ou seja, a palavra que identificará a frase;
4. Clique no campo Frase e digite o texto para a frase;
5. Para inserir outra frase para a Avaliação Inicial clique novamente em Inserir e repita o procedimento anterior;
6. Clique na guia Medicamentos e repita o procedimento anterior;
7. Clique em Fatores de Risco Familiar e repita os procedimentos anteriores;
8. Clique em Indicação Clínica e repita os procedimentos;

Observações: O procedimento de cadastro de frase no ErgoPC 13 é padrão, ou seja, em todos os formulários que apresentam campos para preenchimento existe o botão ao lado do respectivo campo que possibilita o acesso à tela de cada frase.

Excluindo frases na biblioteca

Para excluir uma frase:

1. Clique sobre o botão do item cuja frase se deseja excluir;

2. Selecione a frase que deseja excluir, clicando com o mouse sobre o mnemônico correspondente;
3. Clique no botão DELETAR;
4. A frase será deletada automaticamente;
5. Clique em Sair;

Alterando dados da Anamnese

Mesmo após a realização do exame é possível alterar os dados da Anamnese, pois caso se verifique que determinado dado foi inserido de forma errada é possível fazer a correção.

1. Clique na opção Abrir e Selecione o paciente desejado;
2. Clique sobre o botão Abrir Exame;
3. Clique no botão Anamnese;
4. Altere os dados necessários;
5. Clique em OK.

Cadastrando Convênios, responsáveis e solicitantes

O Sistema ErgoPC 13 permite ao usuário cadastrar convênios e médicos incluídos em bibliotecas que estão acessíveis no momento da digitação, economizando tempo na execução da avaliação. Para acessar as bibliotecas destes cadastros basta clicar sobre o botão ao lado do campo a ser preenchido para visualizar todos os convênios e médicos cadastrados.

Os botões disponíveis na tela de anamnese para cadastro na biblioteca são Convênios, Solicitantes e Responsáveis, destacados na imagem abaixo.

Anamnese

Dados do exame | Antecedentes

Dados do paciente

Nome: Paciente Teste | Prontuário: 1234 | Data de nascimento: 02/04/1985 | Sexo: Masculino

Idade: 30 anos | Peso: kg | Estatura: cm | IMC: | Condicionamento: Sedentário | FCmáx: 190 bpm | FCsub: 161 bpm | VVM: /min | Recalcular

Dados do exame


Data: 25/11/2015 | Hora: 11:25 | Número: 2 | Convênio: Convênios | Responsável: Responsáveis

CRM: | Solicitante: Solicitantes

Indicação clínica: | Indicações

OK | Cancelar


Para introduzir novos itens na biblioteca basta clicar sobre o botão do campo a ser preenchido que aparecerá uma janela que permite o cadastramento das mesmas.

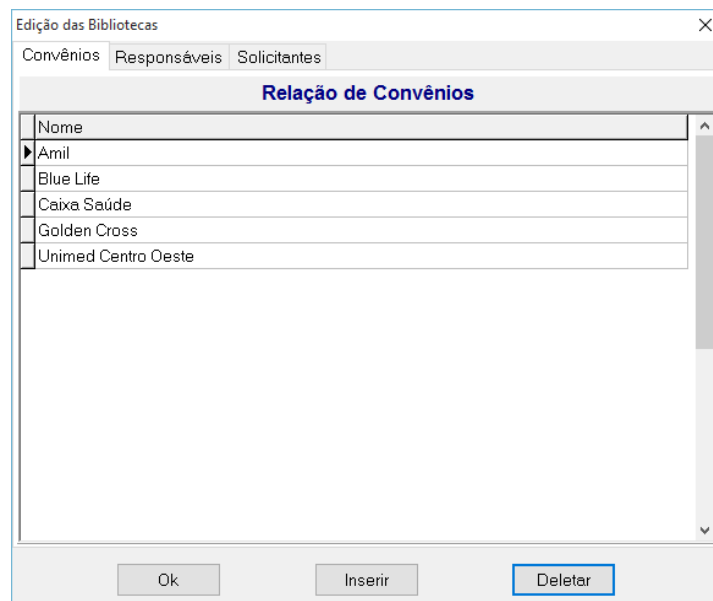


Em todas as janelas de bibliotecas é possível inserir ou apagar um campo. Vamos ver um exemplo para inserir convênios:

1. Clique sobre o botão “Convênios”;
2. Clique sobre o botão “Inserir”;
3. Digite o nome do Convênio;
4. Clique no botão “Inserir” na parte inferior da tela;
5. Digite o nome do Próximo convênio que deseja Inserir;
6. Repita o procedimento anterior para incluir outros convênios;
7. Clique em OK;

Para inserir a lista de Responsáveis clique na guia Responsáveis e, em seguida, no botão inserir. Na tela de Cadastro de Responsável, digite o nome do responsável e respectivo CRM.

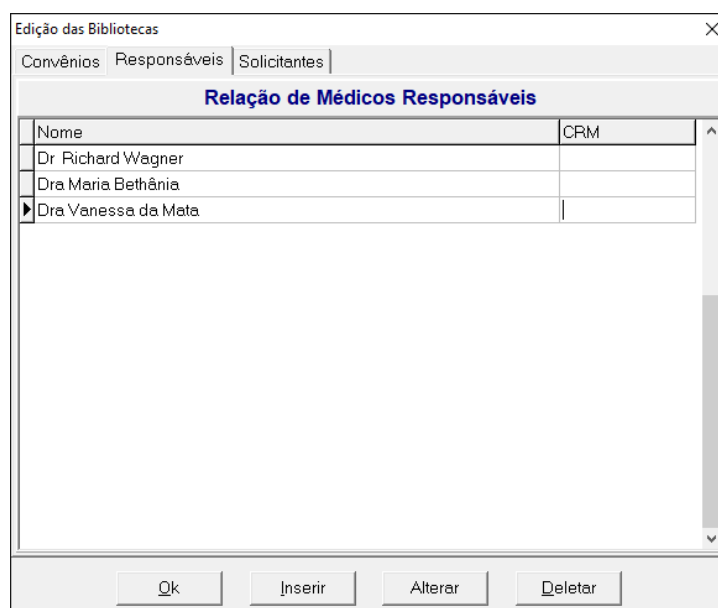


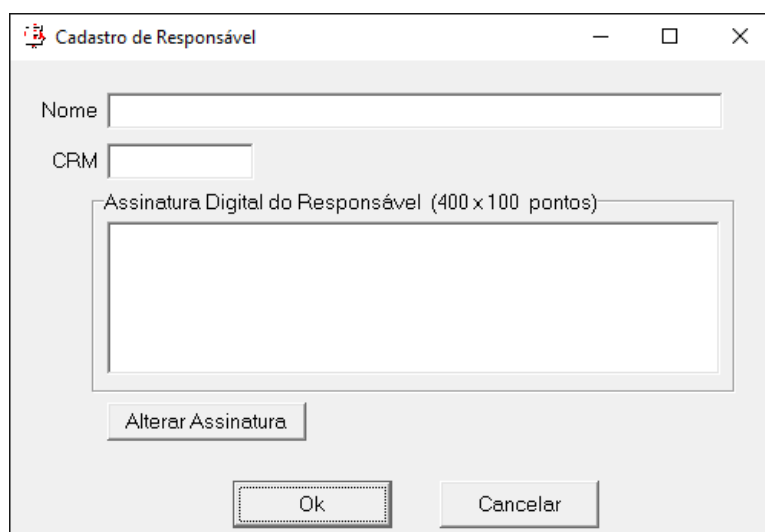


Caso queira, pode ser adicionada a assinatura do Responsável também, clicando em alterar assinatura, que deve ser uma imagem de no máximo 400x100 pontos de tamanho.

Para apagar um item:


1. Clique sobre o item a ser deletado;
2. Clique sobre o botão DELETAR;
3. Irá aparecer a tela abaixo. Clique em “Sim” para prosseguir a ação ou em “Não” para cancelar a ação.

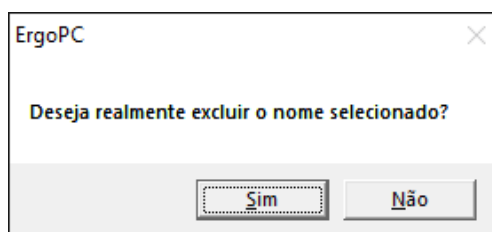

4. Caso o responsável já tenha sido utilizado em algum exame, não será possível ser deletado.

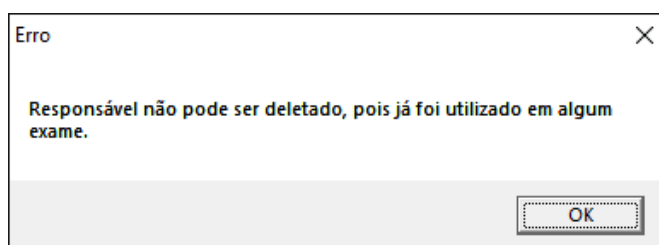


Para inserir a lista de Solicitantes, clique na guia Solicitantes e, em seguida, no botão inserir. O nome do solicitante pode ser digitado diretamente na linha criada.

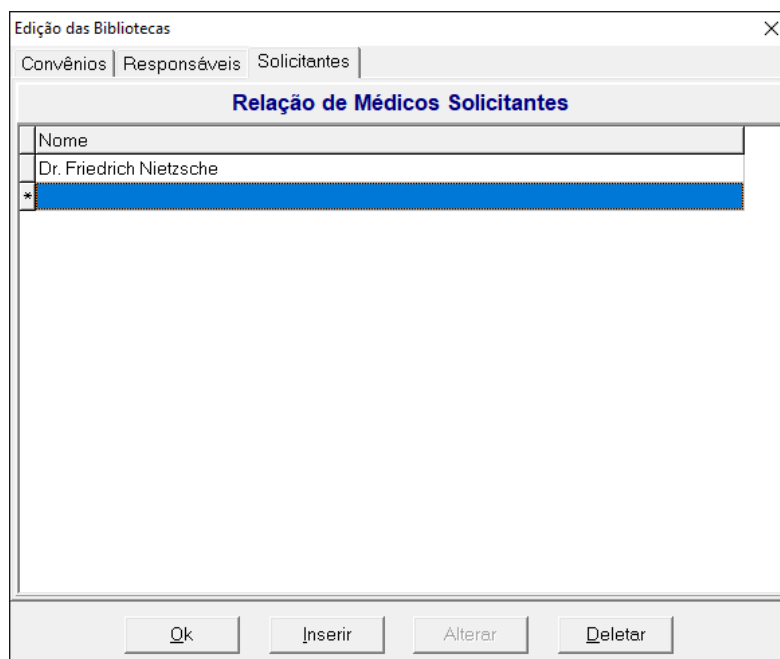

Para apagar um item:

1. Clique sobre o item a ser deletado;
2. Clique sobre o botão DELETAR;
3. Irá aparecer a tela abaixo. Clique em "Sim" para prosseguir a ação ou em "Não" para cancelar a ação.

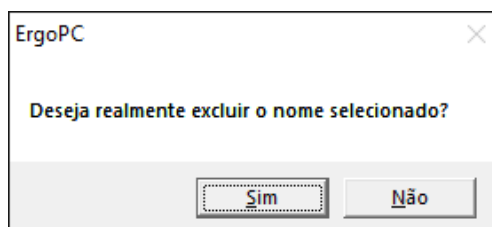

Agora que os dados de convênios, responsáveis e solicitantes foram incluídos, basta clicar na seta ao lado do item e selecionar os valores desejado para o exame corrente.

Anamnese

Dados do exame | Antecedentes

Dados do paciente

Nome: NJSMWELRFGTH Prontuário: Data de nascimento: 07/06/1984 Sexo: Masculino

RG: CPF: VVM: 139 l/min Recalcular

Idade: 31 anos Peso: 87 kg Estatura: 165 cm IMC: 31,96 Condicionamento: Sedentário FCmáx: 189 bpm FCsub: 160 bpm

Dados do exame

Data: 14/03/2016 Hora: 15:34 Número: 242 Convênio: Responsável: Responsáveis

CRM: Solicitante: Solicitantes: Numero de Acesso: 20180223_162231

Indicação clínica

Indicações

OK Cancelar

9.3. Definindo a aparência da Tela

Antes de inicializar um exame no ErgoPC 13 você poderá definir o tipo de visualização que deseja trabalhar, mas existe a opção de modificar o tipo de visualização do sistema no decorrer do exame.


Para selecionar o tipo de visualização no decorrer do exame:

1. Clique na opção Exibir da Barra de Menu;
2. Clique sobre o modo de visualização desejado: "Tendência", "Medidas", "Médias" e "Ventilometria (opcional)".


Outra maneira de selecionar o modo de visualização é clicando nos botões:




Visualizações

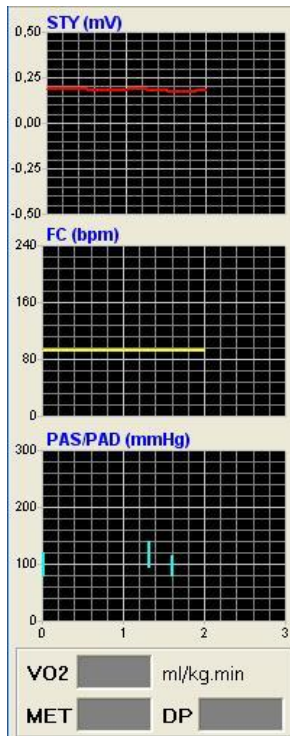


Tendências – Permite a visualização dos gráficos e o acompanhamento da variação dos fatores STY, FC, PAS/PAD. Os gráficos são atualizados após cada registro.

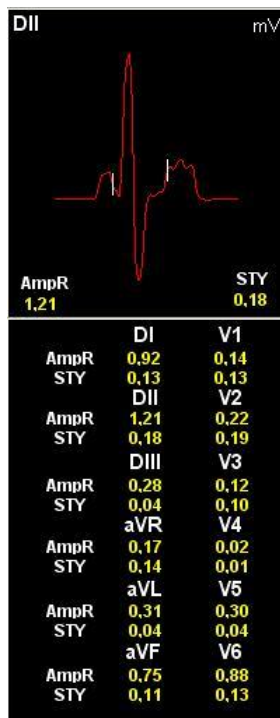

Medidas – Esta tela permite a visualização de todos os traçados, a média de CM5 ou do canal de ritmo - quando em 12 derivações, bem como, os valores das medidas selecionadas na opção CONFIGURAÇÃO → AMBIENTE.

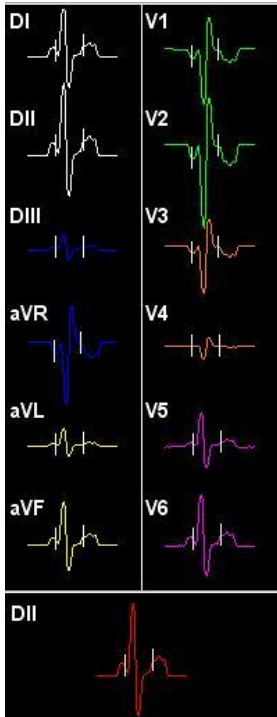

Médias – Esta tela permite a visualização de todas as médias, possibilitando ao médico se concentrar nas derivações que lhe interessam e fazer o acompanhamento das demais. Exibe as médias de todas as derivações.

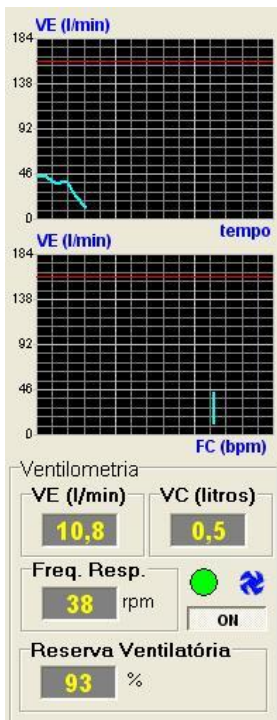


Ventilometria: esta tela permite a visualização dos gráficos de VE(l/min)/tempo e VE(l/min)/FC(bpm), assim como os valores de VE; VC; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA e RESERVA VENTILATÓRIA. Ao passar da fase de PRÉ-ESFORÇO para a de ESFORÇO, automaticamente inicia-se a ventilometria. O botão indicador passa da cor cinza para a verde. A ventoinha gira à medida que o paciente expira e fica parada quando este inspira. Ao clicar no ícone ON, este passará para a posição OFF e a ventilometria é parada.

Observação: Como no decorrer do exame pode haver necessidade da visualização de diferentes parâmetros, o ERGOPC 13 permite alternar de um modo de visualização para outro apenas clicando nos seus ícones: TENDÊNCIA, MEDIDAS E MÉDIAS, VENTILOMETRIA

Personalizando a tela de apresentação dos traçados.

Posicione o cursor sobre a tela de apresentação dos traçados e clique com o botão direito do mouse. A caixa de configuração, demonstrada na figura, irá abrir. Para alterar a cor de fundo da


tela, clicar em ALTERAR COR DE FUNDO. Selecione a cor desejada e clique em OK. Para ADICIONAR FILTRO DE 60 HZ ou MUSCULAR ou, ainda, alternar entre AJUSTAR VELOCIDADE PARA 50mm/seg ou 25mm/seg – clicar sobre as opções desejadas.

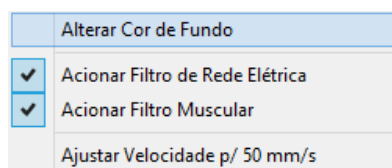

Personalizando o traçado

O sistema ERGOPC 13 permite a personalização do traçado através do botão que corresponde a cada derivação. Clique sobre o botão da derivação que se deseja configurar. A caixa de configuração, demonstrada na figura, irá abrir. Clicar em ALTERAR, para definir a cor que se deseja do TRAÇADO NA TELA e/ou NA IMPRESSÃO. Selecione a cor desejada e clique em OK.


Para optar entre as 3 possibilidades de SENSIBILIDADE, clicar na seta lateral do campo referente e selecionar clicando no valor desejado. Para DEFINIR COMO CANAL BÁSICO PARA MEDIDA DE FC MÉDIA, clicar no seu botão de referência. Clicar em OK, para salvar as alterações e sair da caixa de configuração, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

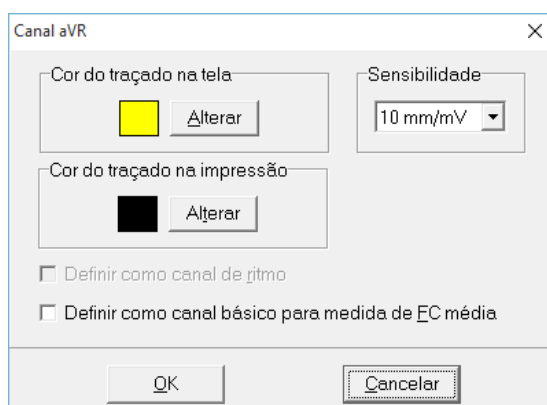

Outra forma de alterar a cor do traçado é através da área de PARÂMETROS na tela. Conforme a figura abaixo. Selecione a cor desejada clicando na caixa de sua referência e, em seguida, clique em OK.



Após selecionar a cor, clique sobre o ícone com a lata de tinta. A caixa de configuração, abaixo, irá abrir. Selecione a opção desejada, clicando no botão de referência e em OK para salvar a alteração. Para cancelar a ação, clicar em OK.

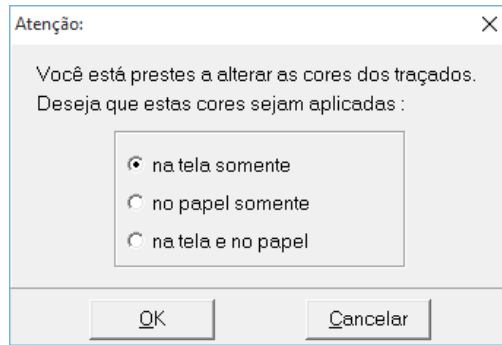

9.4. Identificando os Parâmetros do Paciente


Quando se inicia o Exame é possível acompanhar os parâmetros do paciente através dos dispositivos da tela de monitorização em DETALHES na BARRA DE FERRAMENTAS.



O equipamento não irá realizar nenhum exame caso a bateria esteja com a carga abaixo do nível mínimo crítico. O Software irá avisar ao usuário sobre a impossibilidade de execução de um exame quando a bateria estiver nesta condição. Abaixo de 5% da capacidade da bateria o software irá bloquear o início de qualquer exame.



Frequência cardíaca do paciente.

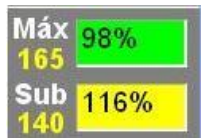

Frequência cardíaca máxima e submáxima que já foram atingidos no teste. No campo FC Máx, a barra de evolução fica vermelha quando a prova atinge o valor máximo. No campo de FC Sub Máx, essa barra ficará amarela ao ser atingido o valor submáximo.



Nome da Derivação que está medindo a FC.



Indicação da velocidade dos traçados. Para selecioná-los ou desmarcá-los basta clicar sobre o botão de referência.




Inicia ou encerra o ECG. Basta clicar sobre o nome MONITORIZAÇÃO para iniciar ou encerrar um teste. Caso clique para encerrar, a caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para dar sequência, ou em NÃO, para cancelar a ação.



Mostra se houve ou não eventos de saturação de alguma derivação. Se houver saturação, o fundo verde muda para vermelho e é mostrada uma contagem dos episódios de saturação.



Mostra o percentual da carga da bateria do Eletrocardiógrafo. O fundo permanece em verde enquanto a bateria não atinge o nível de 50%. Abaixo de 50% o fundo fica amarelo. Abaixo de 10% o fundo fica vermelho.

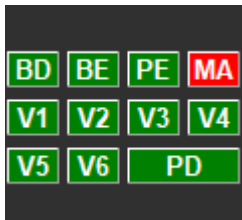

Indica se um eletrodo está solto, eletrodo conectado ao paciente ficará na cor verde, se um eletrodo soltar ficará na cor vermelha.

9.5. Pré-Esforço


Antes de iniciar a prova de esforço é importante registrar os parâmetros iniciais, ou seja, do pré-esforço. No campo PROTOCOLO você poderá, mais uma vez, definir o protocolo desejado. Para definir o tipo de manobra, clicar nas setas laterais do campo MANOBRA e escolha entre as 5 opções: DEITADO; EM PÉ; APNÉIA INSPIRATÓRIA; APNÉIA EXPIRATÓRIA e HIPERPNÉIA.



Caso o Protocolo utilizado seja um protocolo do tipo CONTROLE MANUAL, ao iniciar o exame e solicitar a alteração de FASE, o campo PROTOCOLO irá se alterar para CONTROLE MANUAL DA ESTEIRA, conforme figura abaixo. Clique nas setas para cima ou para baixo, tanto em VELOCIDADE como em INCLINAÇÃO, para aumentar ou diminuir os valores dos campos referentes.



Ao mudar novamente de FASE e passar para recuperação, o campo CONTROLE MANUAL DA ESTEIRA irá se alterar para RECUPERAÇÃO, conforme figura abaixo. Para alterar os valores de VELOCIDADE e INCLINAÇÃO, clique nos campos referentes e digite os novos valores. Para parar o teste, clique em PARAR.

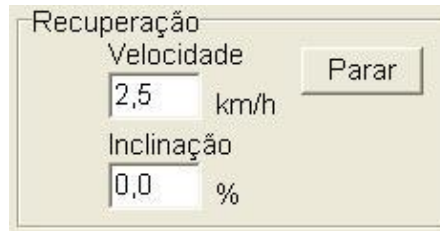

9.6. Controles


Para selecionar os controles desejados, caso queira utilizar um protocolo diferente do já definido em Configurações Gerais você poderá fazê-lo através da área CONTROLES.

Antes de fazer qualquer registro, é possível ver a calibração do sinal através do pulso de 1mV. Clicar no seu botão de referência para que o pulso de calibração seja emitido. Para zerar a linha de base e facilitar a estabilização do sinal, clicar em BASE. Para congelar a imagem dos traçados, clicar em CONGELAR. O sinal congelado pode ser registrado a qualquer momento, sendo que o canal de ritmo permanece monitorizado. Para descongelá-los, clicar em DESCONGELAR. Para ativar ou desativar o REGISTRO AUTOMÁTICO e/ou IMPRESSÃO ON LINE, clicar em seus botões de referência.



Ao clicar em CONTROLES, a caixa de configuração, abaixo, irá abrir. Clicar em BEEP DE BATIMENTO ACIONADO, para acionar o beep ou desligá-lo. Para definir o protocolo a ser utilizado:


1. Clicar em ESCOLHER PROTOCOLO. A caixa de CONFIGURAÇÕES GERAIS irá abrir.
2. Clicar em OK para salvar as alterações.

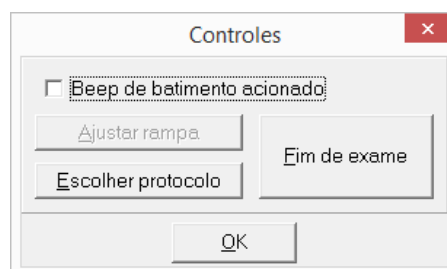

Caso necessite alterar os valores pré-determinados no Protocolo de Rampa, durante o exame, clique em AJUSTAR RAMPA. A caixa de ajuste, abaixo, irá abrir. Você poderá alterar os valores em DESEJADAS nas áreas de VELOCIDADE e/ou INCLINAÇÃO. Para isto, clique nos campos referentes e digite os novos valores. Clique em OK, para salvar as alterações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.




Para finalizar a prova, clicar em FIM DE EXAME. A caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para finalizar, ou em NÃO, para cancelar a ação.

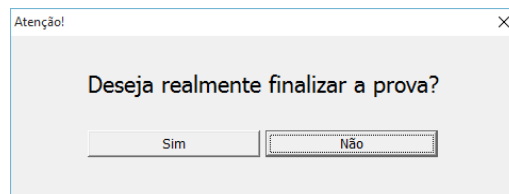


Mudando de Fase

Ao lado da área PROTOCOLO, é possível identificar a fase que está sendo realizada na prova de esforço e que pode assumir as seguintes etapas: Pré-Esforço, Esforço e Pós-Esforço.

O botão FASE (F5), da área CONTROLES, permite a mudança de fase, após ser acionado, será solicitada uma confirmação, conforme figura abaixo. Clique SIM para iniciar a próxima fase ou em NÃO para continuar na fase atual.

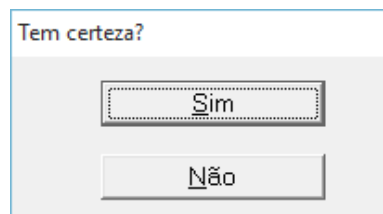


Caso o VVM do paciente não esteja com valor positivo ou o campo esteja em branco, a caixa de mensagem, abaixo, irá abrir. Clicar em OK e inserir o valor no campo referente na caixa ANAMNESE que será aberta.

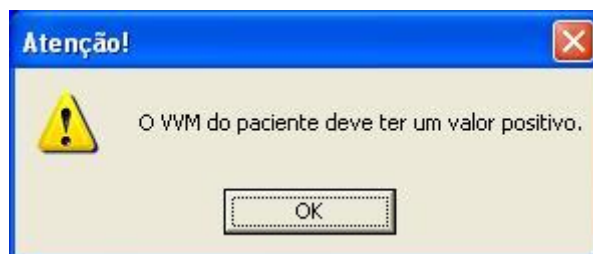


Observe que a fase se altera para **ESFORÇO**.

Caso, na configuração, seja definido que não haverá controle automático da Esteira, o sistema apresentará o controle.




Quando o controle automático da esteira não é acionado o usuário poderá avançar no estágio, manualmente, através da seta .

Caso o sistema seja configurado para realizar o controle automático, as caixas, abaixo, serão apresentadas para as fases, respectivamente, de ESFORÇO e RECUPERAÇÃO - neste último, se desejar, basta clicar e digitar os valores nos respectivos campos ou clicar em PARAR, para parar a esteira.

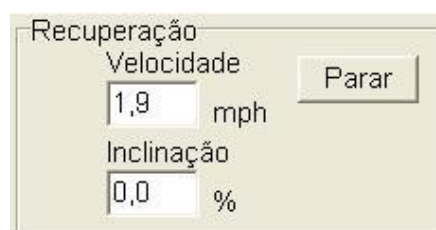

Ao clicar em ESTEIRA, a caixa de configuração, abaixo, irá abrir. Clicar em AVANÇAR ESTÁGIO, para passar para o próximo estágio. Clicar em ZERAR DISTÂNCIA para zerar a marcação da distância. Clicar em LIMITAR para que o esforço seja limitado ao estágio atual. Clicar em VELOCIDADE DE REPOUSO, para que seja selecionada a velocidade do estágio de repouso. Clicar em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de configuração.

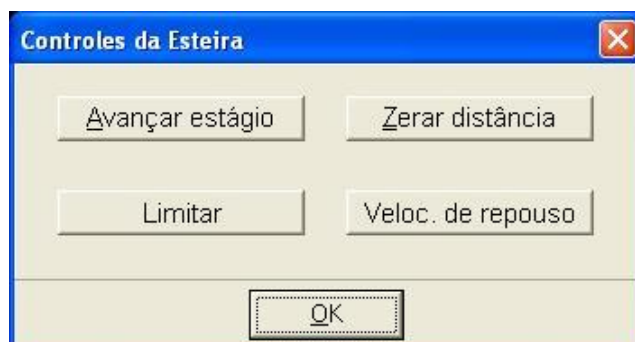

Para que o programa controle automaticamente a esteira, é necessário que o sistema seja configurado. Deve-se clicar na opção CONFIGURAÇÃO e selecionar ERGÔMETRO e posicionar o controle automático como SIM. Esta configuração deve ser realizada antes do início do exame.


9.7. Pressão Arterial



Agora que todos os controles foram definidos, faça a medida da pressão do paciente clicando nas setas laterais referentes aos campos PAS (Pressão Arterial Sistólica) e PAD (Pressão Arterial Diastólica) ou clicando dentro deste campo e digitando os valores. Os valores são: de 0 mmHg a 300 mmHg, para ambas as marcações. Para registrar a pressão, clicar em PRESSÃO ou pressionar a tecla F6 do teclado. O ERGOPC 13 permite um número infinito de registros de pressão. A partir desses valores registrados é criado o gráfico de pressão.

Observações: Lembre-se que para registrar o valor da pressão é necessário acionar o botão PRESSÃO(F6), caso contrário o valor não será registrado. Para que o sistema faça a impressão automática é necessário fazer a CONFIGURAÇÃO do item IMPRESSÃO, ativando o item IMPRIMIR PRESSÃO JUNTO COM O REGISTRO DE ECG.

9.8. Registros eletrocardiográficos

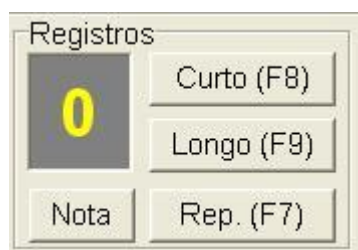

Os registros podem ser realizados automaticamente ou manualmente, basta ser configurado em CONFIGURAÇÕES GERAIS → AMBIENTE.

Caso esteja configurado para registro automático, o programa fará um registro ao final de cada estágio. Na fase de Pós-Esforço, serão feitos registros automáticos em 1, 2, 4, 6, 8 e 10 minutos, e assim por diante, ou de acordo com o intervalo estabelecido na configuração.

Para registrar os sinais cardíacos manualmente deve-se clicar nos seguintes botões - ou utilizar a tecla de referência do teclado:


CURTO (F8) – Salva o registro curto das derivações com a duração de 3,4 segundos por canal a 25 mm/s ou 1,7 segundos por canal a 50 mm/s. Estas informações são para esforço em 13 ou 12 canais. Já em 3 canais os registros são de 4,68 segundos por canal a 25 mm/s e 2,34 segundos por canal a 50 mm/s.

LONGO (F9) – Envia para a impressora um registro longo das derivações com a duração de 2,8 segundos por canal a 25 mm/s ou 1,4 segundos por canal a 50 mm/s. Este registro só pode ser feito em 13 ou 12 derivações não estando disponível na opção 3 derivações. O registro consta de todas as derivações.

REPOUSO (F7) – Envia para a impressora um registro de 12 derivações e o canal de ritmo sendo o DII.

Para que o sistema envie o registro direto para a impressora online, ou seja, faça a impressão simultânea ao exame, é necessário habilitar a opção IMPRESSÃO AUTOMÁTICA(impressão online) ← IMPRESSÃO ← CONFIGURAÇÃO.

O botão NOTA permite a entrada de uma nota de até 60 caracteres que será enviada para a impressora junto com o próximo registro. Esta opção permite inserir qualquer observação no momento do registro. Ao clicar no seu botão de referência, a caixa de inserção de notas, abaixo, irá abrir. Digite a informação desejada no campo referente e clique em OK, para salvar a nota, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

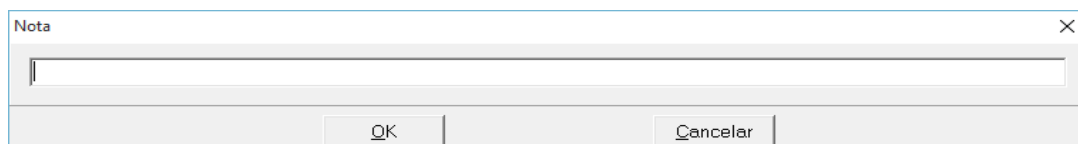


9.9. Pontos Fiduciais

A tela de ajuste dos pontos fiduciais é utilizada para indicar a localização do ponto isoeletrico, do ponto J e do ponto Y. Para ajustar, exiba a tela de ERGOPC 13 com Medidas ou Médias e clique sobre a derivação na qual deseja alterar os pontos fiduciais. A tela de ajuste, abaixo, irá abrir.

A tela de ajuste dos pontos fiduciais permite o controle do Zoom, isto significa que é possível alterar o tamanho do sinal utilizando a caixa de combinação ZOOM. Para escolher o tamanho da média clique na seta da opção ZOOM e selecione o tamanho que desejar. Este recurso facilita o ajuste dos pontos manualmente. Também é possível nesta tela definir a distância do ponto Y-J clicando em uma das opções: R-R SOBRE 16, R-R SOBRE 8 ou 80 ms.

Para alterar a localização do ponto isoeletrico ou ponto J, clique sobre o cursor referente ao ponto que se deseja alterar e arraste-o até o local desejado. Ao movimentar o ponto desejado o sistema apresenta no quadro de localização o valor atingido por ele.

Para salvar as alterações e fechar a tela de ajuste, clique em OK. Para cancelar a ação e fechar a tela de ajuste, clique em CANCELAR.

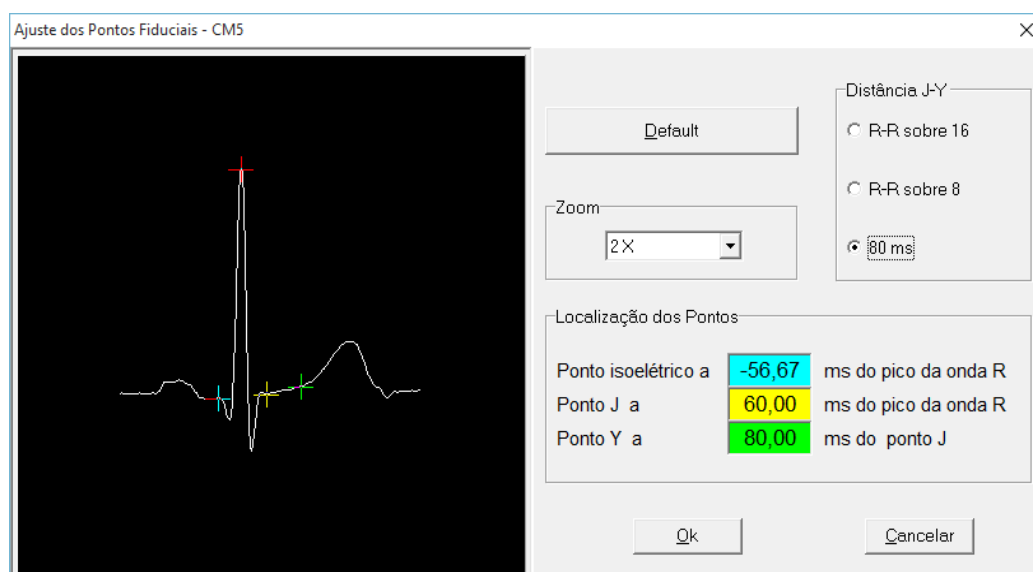

Observação: O pico da onda R é automaticamente estabelecido pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário.

9.10. Cronômetro

Com o cronômetro é possível acompanhar o tempo de prova. Os valores são mostrados em minutos e segundos - MM:SS - e o valor máximo é de 99:99 min . Para iniciar a contagem do tempo, ou seja, marcar o início da prova clique sobre o botão: INICIAR (F1) ou aperte a tecla F1. Ao ser clicado, o texto do botão se altera para PARAR (F1). De acordo com a configuração feita pelo usuário, o cronômetro de estágios terá comportamento crescente ou decrescente.




Para **PARAR** o cronômetro pressione, novamente, a tecla **F1** ou clique no botão **PARAR**.

Para **ZERAR** o cronômetro clique no botão **ZERAR** ou pressione a tecla **F4**.

9.11. Salvando o Exame

Se, após realizar o exame, você preferir guardá-lo para uma posterior análise, você terá que salvá-lo clicando em BARRA DE MENU → PACIENTE → SALVAR ou no ícone abaixo:

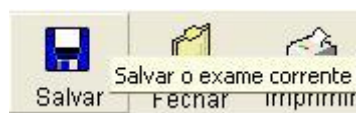

O procedimento de salvar um exame permite a criação de uma base de dados de todos os pacientes da clínica, possibilitando, assim, um controle efetivo de todas as provas realizadas pelo paciente.

Ao salvar o exame, o usuário poderá optar por salvar o ritmo. Isto implica em uso de muito espaço em disco.

A opção de salvamento do canal de ritmo deve ser apenas em caso de o laudo ser emitido posteriormente ou quando existem arritmias importantes que mereçam uma análise mais detalhada.

Observação: Um exame realizado sem registros não poderá ser salvo. O botão **Salvar** permanece desativado.

9.12. Analisando os Resultados do exame

O sistema ERGOPC 13 possibilita a criação do laudo em qualquer momento do exame permitindo uma flexibilidade com relação à rotina da prova. Determinadas clínicas adotam a rotina de realizar o exame e emitir o laudo posteriormente. Neste caso, o exame deve ser salvo após o seu término e em outro momento deverá ser aberto para que se possa emitir o laudo. Esta característica permite ainda que, caso o usuário tenha uma rede instalada na clínica, o laudo

poderá ser emitido de outro computador. O procedimento para se trabalhar em rede será explicado no Apêndice B.

9.13. Tabela de Resultados

Após finalizar o exame, é possível verificar os parâmetros através das tabelas de resultados, pois estas permitem a visualização dos valores registrados durante a prova de esforço.

Para visualizar uma tabela, através da barra de menu, clique em RESULTADOS → TABELAS DE



RESULTADOS ou clique no ícone **Tabelas** na BARRA DE FERRAMENTAS. A caixa de TABELA DE RESUMO DE REGISTROS, abaixo, irá abrir. Após analisar os registros e/ou editá-los, clicar em OK para salvar as alterações e fechar a tela.

A caixa de diálogo 'Tabela de Resumo dos Registros' possui uma aba 'Registros de ECG' selecionada. Abaixo do título, há uma tabela com os seguintes dados:

Estágio	Tempo	FC	STJ	STY	IncST	AmpR	VO2	MET
Em Pé	14:16	70	0,05	0,13	1,06	2,63		
1,7 mph 10,0 %	02:55	70	0,05	0,13	1,06	2,63	13,67	3,90

Na parte inferior da caixa, há dois botões: 'Editar o registro selecionado' e 'Deletar o registro selecionado', além de um botão 'OK' centralizado.


Em REGISTROS DE ECG, para EDITAR O REGISTRO SELECIONADO, clicar neste botão de referência após a seleção do registro. A caixa de edição, abaixo, irá abrir. Clicar e digitar os valores desejados nos respectivos campos. Em seguida, clicar em OK, para salvar as alterações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

A caixa de diálogo 'Editando Registro de ECG' mostra a seguinte tabela para edição:


Estágio	Tempo	FC	STJ	STY	IncST	AmpR	VO2	MET
Em Pé	14:16	70	0,05	0,13	1,06	2,63		

Na parte inferior da caixa, há dois botões: 'OK' e 'Cancelar'.


Para DELETAR O REGISTRO SELECIONADO, clicar neste botão de referência após a seleção do registro. A caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para excluir o registro, ou em NÃO, para cancelar a ação.

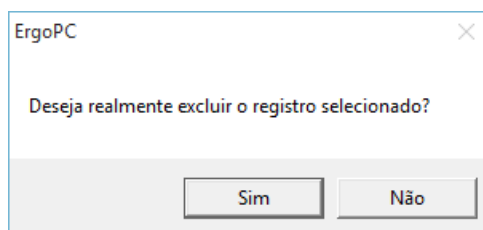

Em REGISTRO DA PRESSÃO, para EDITAR O REGISTRO SELECIONADO, clicar neste botão de referência após a seleção do registro. A caixa de edição, abaixo, irá abrir. Clicar e digitar os valores desejados nos respectivos campos. Em seguida, clicar em OK, para salvar as alterações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

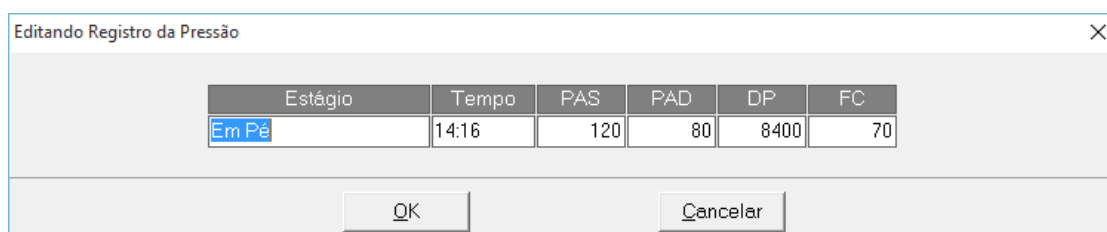


Para DELETAR O REGISTRO SELECIONADO, clicar neste botão de referência após a seleção do registro. A caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para excluir o registro, ou em NÃO, para cancelar a ação.

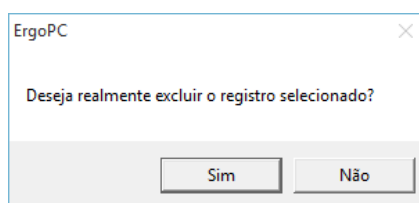


9.14. Analisando os Cálculos

Além das tabelas, os resultados podem ser analisados a partir dos valores calculados pelo sistema.

Para visualizar os cálculos, através da barra de menu, clique em RESULTADOS → CÁLCULOS ou

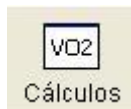

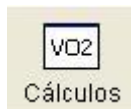clique no ícone  na BARRA DE FERRAMENTAS. A caixa de CÁLCULOS, abaixo, irá abrir. Após analisar os cálculos e/ou editá-los, clicar em OK para salvar as alterações e fechar a tela.

Básicos

Todos os cálculos são feitos em função do último registro tirado durante o esforço. Portanto, é muito importante registrar o eletrocardiograma no pico de esforço. Caso isto não seja feito, os cálculos serão feitos em função do último registro feito durante o esforço.

Ergômetro	Contém o nome do Ergômetro utilizado na prova. Campo não editável.
Campo Protocolo	Contém o nome do protocolo utilizado para realizar a prova. Campo não editável.
VO2 Máximo	Contém o valor de VO2 Máximo em ml/(Kg.min) no momento do registro do pico do esforço. Campo não editável.
Duração Prova	Contém a duração da Prova de Esforço. Campo não editável.
FC Max	Contém a Frequência Cardíaca do registro feito no pico de esforço. Campo não editável.
PAS Max	Contém a Pressão Arterial Sistólica Máxima do último estágio da Prova de Esforço (caso o usuário tenha pressionado F6 ou feito um registro no momento de pico de esforço). Campo não editável.
PS Pré-Esf	Contém a Pressão Arterial Sistólica do Pré Esforço. Campo não editável.
Distância Percorrida	Campo para a entrada da distância percorrida na Prova de Esforço. Caso a esteira esteja sendo controlada pelo ERGO PC 13, a distância será preenchida automaticamente. Para preencher manualmente, clique no campo e digite a informação.

Aptidão	<p>Quadro para a classificação da Aptidão Cardiorrespiratória. O computador irá proceder automaticamente à classificação em função do VO2 Máximo e da idade.</p> <p>Caso o médico não concorde com a classificação, o sistema permite alterar o resultado clicando na seta lateral e selecionando a informação desejada. Neste caso, se houver necessidade de voltar ao valor calculado pelo sistema, basta clicar sobre o botão CLASSIFICAR.</p> <p>OBS: As tabelas de Aptidão Cardiorrespiratória presentes no ErgoPC contemplam faixas de idade e sexo. Caso o paciente do exame esteja fora das faixas etárias, o programa deixa para o usuário a ação de classificar a aptidão.</p>
Tabela	<p>Demonstra a Tabela utilizada na Prova de Esforço. Campo não editável.</p>
Grupo Funcional (NYHA)	<p>Quadro para a classificação do Grupo Funcional de acordo com a tabela da New York Heart Association. O computador irá proceder à classificação, automaticamente, em função do VO2. Até 10 ml/Kg/min grupo 4, de 10 a 16 grupo 3, de 16 a 22 grupo 2 e acima de 22 grupo 1.</p>
Resposta PAS	<p>Quadro para a classificação do tipo de resposta pressórica da PAS. Esta classificação deve ser feita manualmente clicando na seta lateral do campo e selecionando a informação desejada na listagem.</p>
Resposta PAD	<p>Quadro para a classificação do tipo de resposta pressórica da PAD. Esta classificação deve ser feita manualmente clicando na seta lateral do campo e selecionando a informação desejada na listagem</p>

Estendidos

X

Cálculos

Básicos
Estendidos
Esforço máximo
Escores
Prescrição de Exercícios

MVO2 máx.
 (ml O2 100g VE/min)

Déficit Aeróbico do Miocárdio - MAI
 %

Déficit funcional de VE
 %

Déficit cronotrópico
 %

Variação da PAS
 mmHg/MET

Reserva cronotrópica
 bpm

Déficit Aeróbico Funcional - FAI
 %

Variação da PAD
 mmHg/MET

	Avaliado	Previsto	%	Unidades
FC máxima	70	160	43,8	bpm
Débito cardíaco	9,9	16,3	60,8	l/min
Débito sistólico	141,49	90,22	156,8	ml/sístole
DP máximo	8400	32759	25,6	bpm mmHg
MET máximo	4,08	8,89	45,9	MET

MVO2 Máximo	Contém o valor de MVO2 Máximo em ml de O2 100g VE/ min). Campo não editável.
Déficit Cronotrópico	Contém o valor do Déficit Cronotrópico em %. Campo não editável.
Reserva Cronotrópica	Contém o valor da Reserva Cronotrópica em bpm. Campo não editável.
Déficit Aeróbico do Miocárdio - MAI	Contém o valor do Déficit Aeróbico do Miocárdio – MAI em %. Campo não editável.
Déficit Aeróbico Funcional - FAI	Contém o valor do Déficit Aeróbico Funcional - FAI em %. Campo não editável.
Déficit Func. de VE	Contém o valor do Déficit Funcional de Ventrículo Esquerdo em %. Campo não editável.
Variação da PAS	Contém o valor da variação da PAS em mmHg/MET. Campo não editável.
Variação da PAD	Contém o valor da variação da PAD em mmHg/MET. Campo não editável.
FC Máxima	Contém o valor da Frequência Cardíaca Máxima alcançada e prevista. Campo não editável.
Débito Cardíaco	Contém o valor do Débito Cardíaco alcançado e previsto. Campo não editável.

Débito Sistólico	Contém o valor do Débito Sistólico alcançado e previsto. Campo não editável.
DP Máximo	Contém o valor do Duplo Produto Máximo alcançado e previsto. Campo não editável.
MET	Contém o valor do número de METs máximo alcançado e previsto.

Esforço Máximo

Nesta tela o usuário pode alterar valores que tenham sido captados de forma errada pelo software. Isso é especialmente útil, pois em casos como a Frequência Cardíaca ou mesmo a PAS ou PAD do momento do pico de esforço estarem erradas o usuário pode alterar os valores aqui e os cálculos serão refeitos pelo ErgoPC 13.

The screenshot shows a software window titled 'Cálculos' with a close button (X) in the top right corner. It has five tabs: 'Básicos', 'Estendidos', 'Esforço máximo' (which is selected), 'Escores', and 'Prescrição de Exercícios'. Below the tabs is a section titled 'Parâmetros editáveis para cálculos' containing several input fields arranged in a grid:

- Duração da prova: 00:03:06 hh:mm:ss
- Velocidade máxima: 1.70 mph
- Inclinação máxima: 10 %
- FC pré-esforço: 70 bpm
- FC máx.: 70 bpm
- Tabela: AHA (dropdown menu)
- PAS pré-esforço: 120 mmHg
- PAS máx.: 120 mmHg
- PAD pré-esforço: 80 mmHg
- PAD máx.: 80 mmHg



An 'OK' button is located at the bottom center of the window.



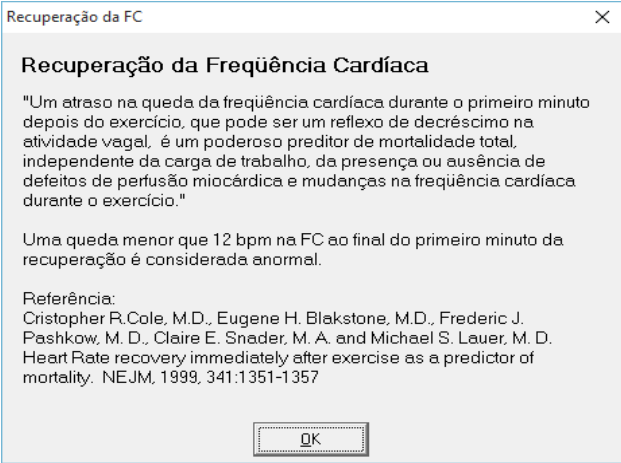
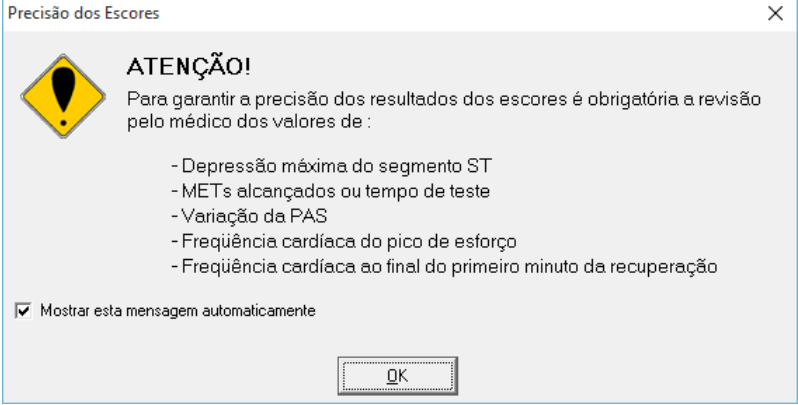
Duração da Prova	Contém a duração da Prova de Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
FC Pré-Esforço	Mostra a frequência cardíaca no Pré-Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
PAS Pré-Esforço	Contém a Pressão Arterial Sistólica do Pré Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
PAD Pré-Esforço	Contém a Pressão Arterial Diastólica do Pré Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Velocidade Máxima	Contém o valor da velocidade Máxima. Clicar no campo e digitar o valor desejado.

FC Max	Contém a Frequência Cardíaca Máxima do último registro da Prova de Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
PAS Max	Contém a Pressão Arterial Sistólica Máxima do último registro da Prova de Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
PAD Max	Contém a Pressão Arterial Diastólica Máxima do último registro da Prova de Esforço. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Inclinação Máxima	Mostra o valor da inclinação Máxima. Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Tabela	Permite a seleção da tabela de Cooper ou AHA. Clicar na seta lateral e selecionar a tabela desejada na lista.

Escores


ESCORE DE DUKE	
Nº de METs Alcançado	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Depressão Máxima do Seg. ST	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Angina Esforço-Induzida	Clicar no botão referente à informação desejada.

Escore de Duke	Valor gerado automaticamente. Campo não editável.
Classificação de risco de DAC	<p>Classificação gerada automaticamente. Campo não editável. Para se obter detalhes a respeito do escore, clicar no ícone . A caixa de informação abaixo, irá abrir. Clicar em OK para fechá-la.</p> <div data-bbox="608 483 1299 1037" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">X</p> <p>Escore de Duke</p> <p>O Escore de Duke aplica-se ao teste ergométrico executado no protocolo de Bruce e tem valor prognóstico e diagnóstico. O tempo de teste refere-se ao tempo de esforço físico. Quando utilizado com outro protocolo, é substituído pelo número de METs alcançado. A depressão máxima do ST refere-se ao esforço ou à recuperação.</p> <p style="text-align: center;">Escore >= 5 → Baixa probabilidade de DAC 5 > Escore > -11 → Moderada probabilidade de DAC -11 >= Escore → Alta probabilidade de DAC</p> <p>Referência: Mark DB, Hlatky MA, Harrell FE Jr, et al. Exercise treadmill score for predicting prognosis in coronary artery disease. Ann Intern Med 1987;106:793-800</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="OK"/></p> </div>
ESCORE DO VA MEDICAL CENTER	
Nro de METs Alcançado	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Depressão Máxima do Seg. ST	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Varição da PAS (mmHg)	Clicar no botão referente à informação desejada.
Insuficiência Cardíaca ou Uso de Digoxina	Clicar no botão referente à informação desejada.
Escore do VA	Valor gerado automaticamente. Campo não editável.
Classificação de risco de DAC	<p>Classificação gerada automaticamente. Campo não editável. Para se obter detalhes a respeito do escore, clicar no ícone . A caixa de informação, abaixo, irá abrir. Clicar em OK para fechá-la.</p>

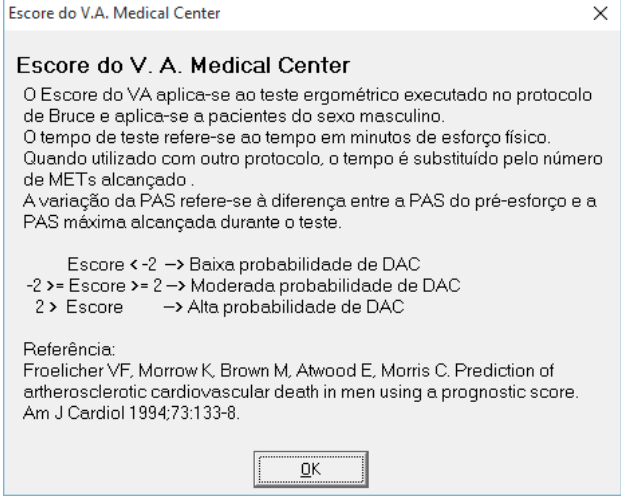
	 <p>Escore do V. A. Medical Center</p> <p>O Escore do VA aplica-se ao teste ergométrico executado no protocolo de Bruce e aplica-se a pacientes do sexo masculino. O tempo de teste refere-se ao tempo em minutos de esforço físico. Quando utilizado com outro protocolo, o tempo é substituído pelo número de METs alcançado. A variação da PAS refere-se à diferença entre a PAS do pré-esforço e a PAS máxima alcançada durante o teste.</p> <p>Score < -2 → Baixa probabilidade de DAC -2 >= Score >= 2 → Moderada probabilidade de DAC 2 > Score → Alta probabilidade de DAC</p> <p>Referência: Froelicher VF, Morrow K, Brown M, Atwood E, Morris C. Prediction of atherosclerotic cardiovascular death in men using a prognostic score. Am J Cardiol 1994;73:133-8.</p> <p>OK</p>
RECUPERAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA	
FC do Pico de Esforço	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
FC ao Final do 1º min da Recuperação	Clicar no campo e digitar o valor desejado.
Avaliação	<p>Para obter informações sobre a RECUPERAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, clicar no ícone . A caixa de informação, abaixo, irá abrir. Clicar em OK para fechá-la.</p>  <p>Recuperação da FC</p> <p>Recuperação da Frequência Cardíaca</p> <p>"Um atraso na queda da frequência cardíaca durante o primeiro minuto depois do exercício, que pode ser um reflexo de decréscimo na atividade vagal, é um poderoso preditor de mortalidade total, independente da carga de trabalho, da presença ou ausência de defeitos de perfusão miocárdica e mudanças na frequência cardíaca durante o exercício."</p> <p>Uma queda menor que 12 bpm na FC ao final do primeiro minuto da recuperação é considerada anormal.</p> <p>Referência: Christopher R. Cole, M.D., Eugene H. Blakstone, M.D., Frederic J. Pashkow, M. D., Claire E. Snader, M. A. and Michael S. Lauer, M. D. Heart Rate recovery immediately after exercise as a predictor of mortality. NEJM, 1999, 341:1351-1357</p> <p>OK</p>
Precisão dos Escores	 <p>Precisão dos Escores</p> <p>ATENÇÃO!</p> <p>Para garantir a precisão dos resultados dos escores é obrigatória a revisão pelo médico dos valores de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depressão máxima do segmento ST - METs alcançados ou tempo de teste - Variação da PAS - Frequência cardíaca do pico de esforço - Frequência cardíaca ao final do primeiro minuto da recuperação <p><input checked="" type="checkbox"/> Mostrar esta mensagem automaticamente</p> <p>OK</p>

Prescrição de Exercícios

No campo PADRÃO DE PRESCRIÇÃO, clique na seta lateral e selecione o padrão que desejar na lista. Na tabela de Zona, abaixo, você poderá ordenar as linhas da tabela selecionando a desejada e clicando em MOVER PARA CIMA ou MOVER PARA BAIXO. A linha, automaticamente, será mudada de posição conforme o comando dado. Para adicionar uma linha, clicar em ADICIONAR LINHA. Ela surgirá na última posição da tabela. Para preencher os dados, basta clicar dentro de cada célula e digitar as informações. Nas células de REFERÊNCIA, clicar duas vezes e uma seta lateral abrirá. Selecione entre as 4 opções existentes – LVI; LVII; FC PICO; FC MAX – clicando sobre o seu nome. Para remover uma linha, clicar em REMOVER LINHA.

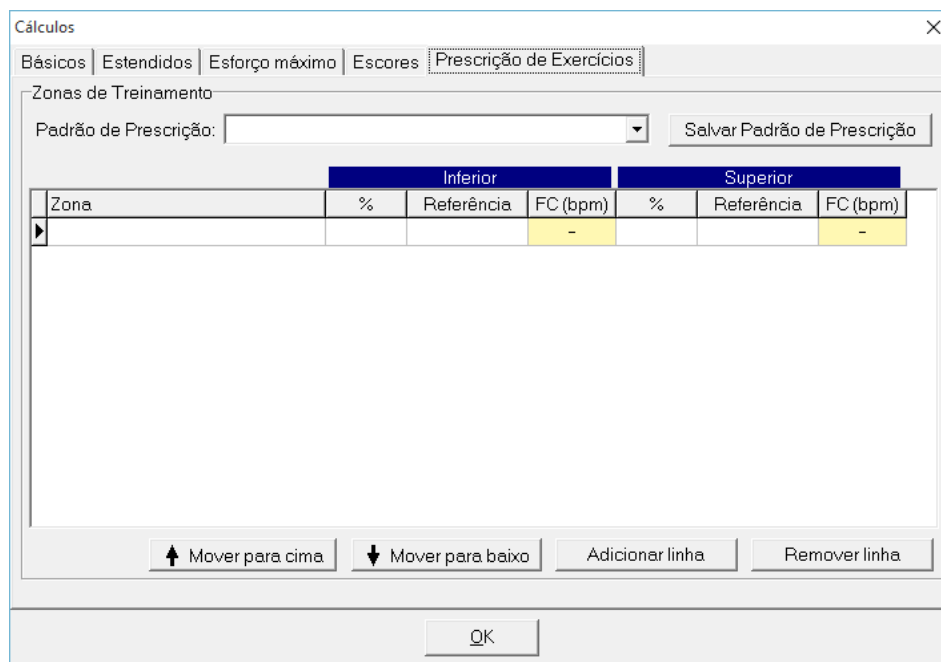

Para SALVAR PADRÃO DE PRESCRIÇÃO, clicar neste botão de referência. A caixa de configuração, abaixo, irá abrir. Escolha o padrão que desejar na listagem clicando sobre seu nome. Se quiser inserir um NOVO PADRÃO DE PRESCRIÇÃO, clicar neste botão de referência e digitar o nome no referente campo. Clicar em OK, para salvar as alterações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

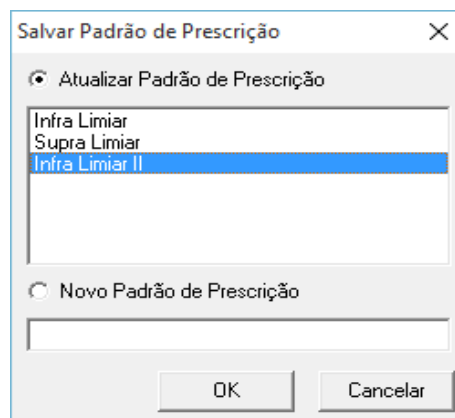


Gráficos

Para visualizar os gráficos, clique em BARRA DE MENU → RESULTADOS → GRÁFICOS ou clique




no ícone **Gráficos** na BARRA DE FERRAMENTAS. A caixa de GRÁFICOS, abaixo, irá abrir. Após analisar os gráficos de esforço e/ou marcar os limiares, clicar em OK, para salvar as alterações e fechar a tela, ou em CANCELAR, para cancelar a ação e fechar a tela.

- Em ESFORÇO, pode-se visualizar 4 gráficos referentes a:
- FC – Frequência Cardíaca (bpm)
- PAS/PAD – Pressão Arterial Sistólica e Pressão Arterial Diastólica
- STY – Segmento STY (mV)
- DP – Duplo Produto (bpm mmHg)

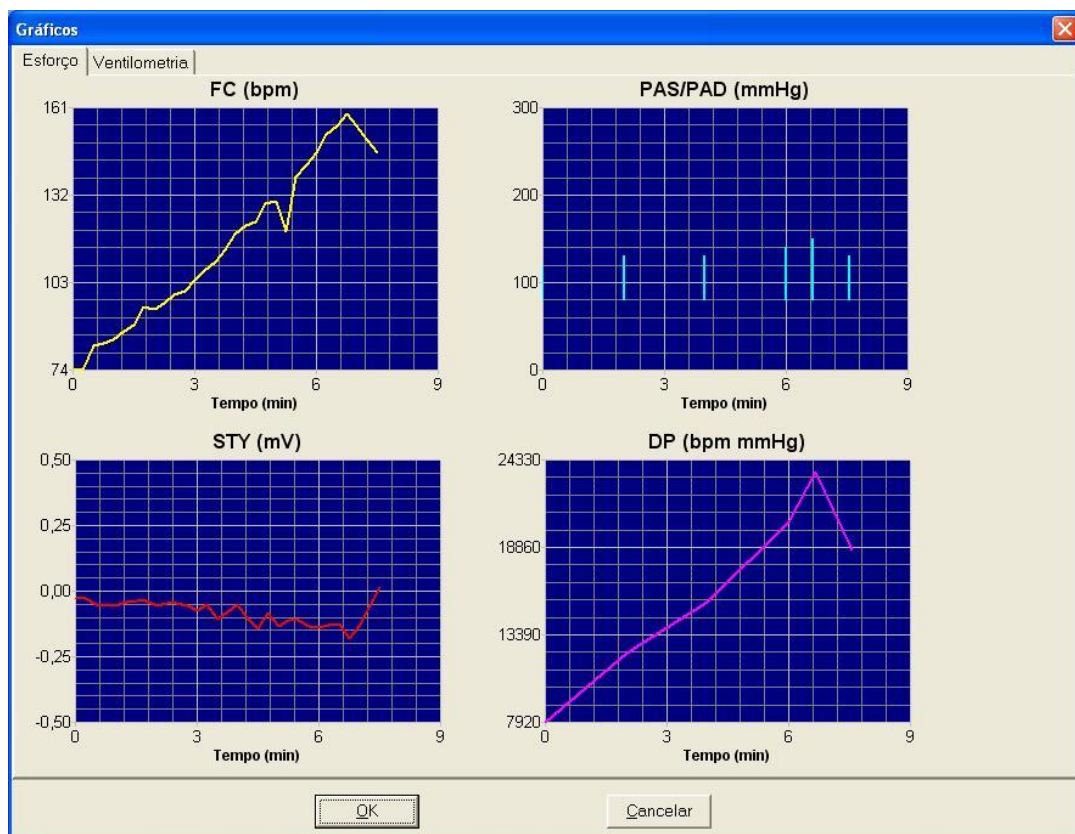

Em VENTILOMETRIA, pode-se optar pela visualização dos limiares também nos gráficos menores, para isso basta clicar no botão EXIBIR LIMIAR NOS GRÁFICOS MENORES. Para visualizar um gráfico em tamanho maior, clicar sobre a sua apresentação no tamanho menor e, automaticamente, ele passará a ser visualizado na posição do gráfico maior. Para selecionar ou desmarcar: MARCAR LV I, MARCAR LV II e/ou EXIBIR RÉGUA – clicar nos seus respectivos botões. A MÉDIA pode ser escolhida clicando na seta lateral do seu campo e selecionando uma das opções existentes: SEM MÉDIA ou 2,3 ou 4 AMOSTRAS. Para ajustar as régua auxiliares,


mantenha a tecla SHIFT pressionada enquanto arrasta as linhas da régua. Para ajustar o limiar, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto arrasta as linhas de marcação dos limiares.

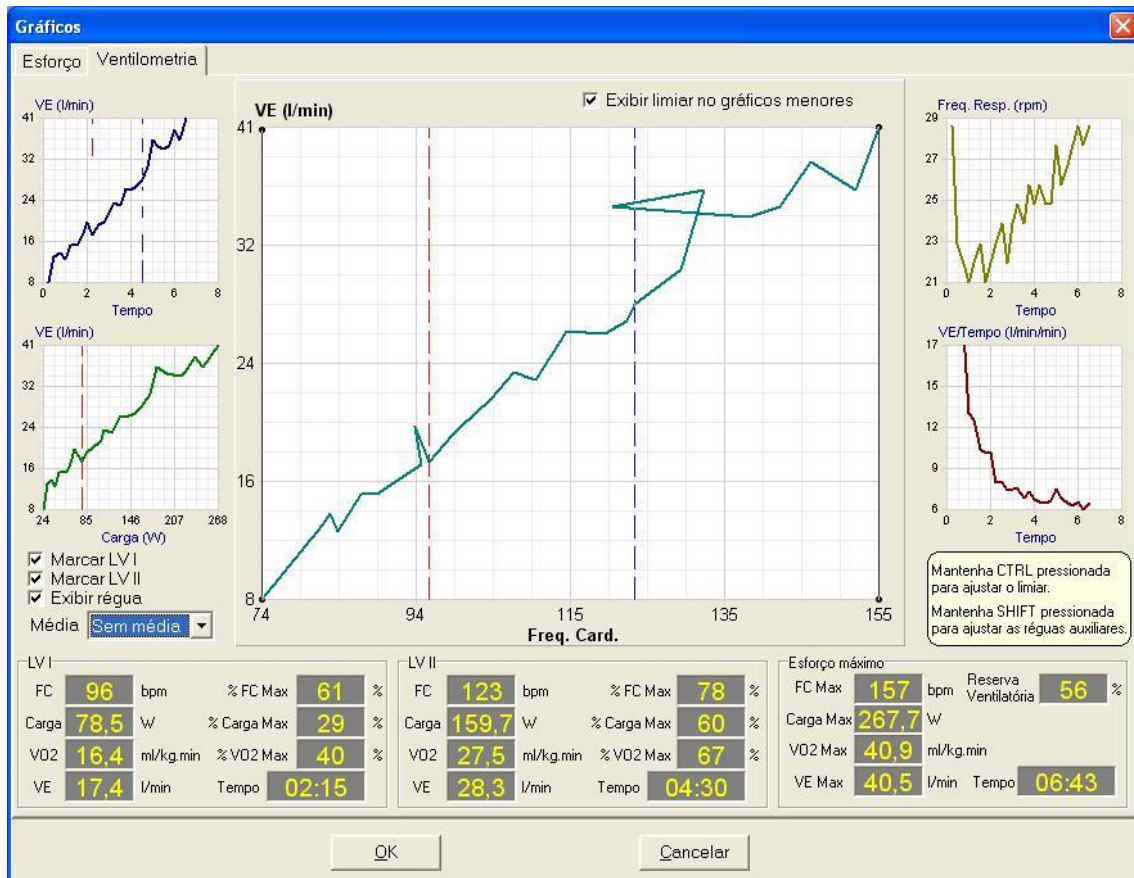






9.15. Registros

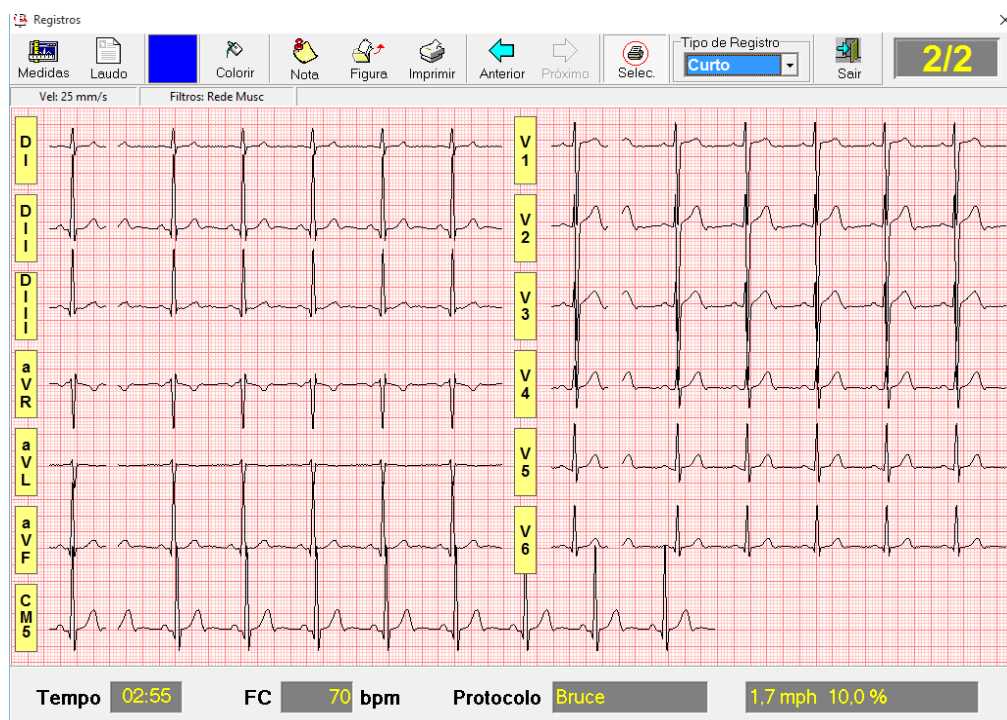Este ícone só estará disponível se houver registros gravados. Para visualizar os registros, através

da barra de menu, clique em RESULTADOS → REGISTROS ou clique no ícone  na BARRA DE FERRAMENTAS. A caixa de REGISTROS, abaixo, irá abrir.


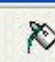


DESCRIÇÃO DA TELA

 Medidas	Verifica ou refaz as medidas automáticas.
 Laudo	Editor de laudos. Para abri-lo basta clicar neste ícone.
 Colorir	Configurar a cor do traçado. Clique sobre a caixa de cor e selecione a cor desejada. Em seguida, clique sobre o ícone com a lata de tinta e clique sobre o traçado que deseja alterar a cor.
 Nota	Incluir um comentário sobre o traçado. O comentário fica exposto abaixo da BARRA DE FERRAMENTAS. Ao clicar neste ícone a caixa de inserção de comentário, abaixo, irá abrir. Digite a informação desejada e clique em OK, para salvar a nota, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.
 Figura	Exportar o traçado como uma imagem BMP ou GIF. Clicar neste ícone escolher o destino no qual deseja salvar a imagem. Observação: O exame também poderá ser exportado como '.ERG', isto significa que poderá ser visualizado em outro computador que esteja com o ERGOPC 13 instalado.



Imprimir os registros. Ao clicar neste ícone, a caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Selecione a opção desejada clicando no seu botão de referência e, em seguida, clique em OK, para dar sequência, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

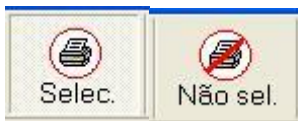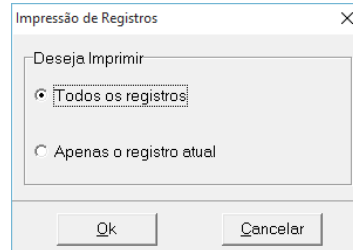

Seleciona os registros que deseja imprimir. Para isto, clicar sobre o ícone SEL ou NÃO SEL para que o registro atual, em tela, seja enviado para impressão.



Ícones para avançar ou recuar nos registros. Clicar sobre eles.



Demonstra o número do registro atual, em exibição na tela, e o número total de registros.




Define o tipo de registro: CURTO; LONGO; REPOUSO. Clicar sobre a seta lateral e selecionar o tipo de registro clicando sobre o seu nome na lista. Este ícone só é ativo para os registros de 12 e 13 derivações.



Para sair da tela de Medidas, clicar sobre este ícone.



Mostra o tempo em que o registro foi efetuado.

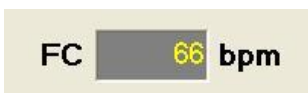


Mostra a Frequência Cardíaca do registro. Para editar o valor basta clicar no campo e digitar.




Demonstra o Protocolo utilizado e o seu Estágio. Para editar o estágio clicar no seu campo e digitar a informação desejada.


Medidas




Para realizar medições em qualquer derivação, clique no ícone . A janela de configuração das medidas, abaixo, irá abrir.

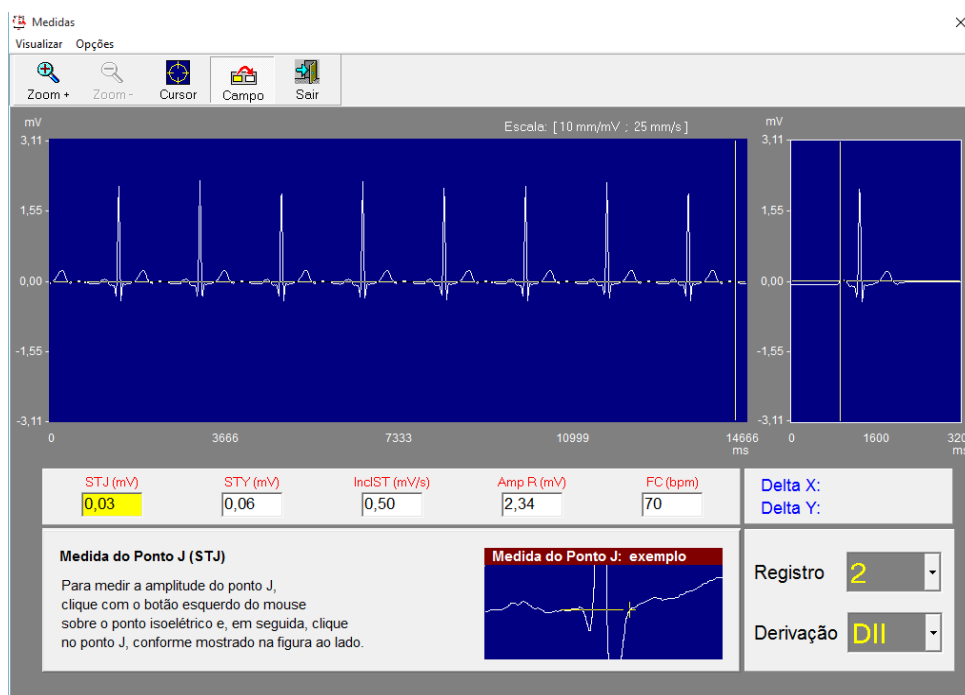


Para editar a medida de tempo após o PONTO J, através da barra de menu clique em OPÇÕES → TEMPO APÓS PONTO J e selecionar, clicando em cima do nome, entre as 3 opções existentes: TEMPO R-R SOBRE 16; TEMPO R-R SOBRE 8 e 80 ms.

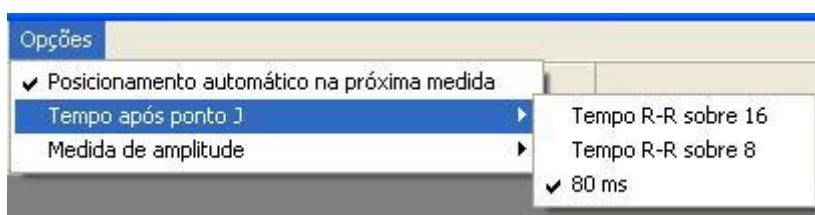


Para editar a medida de amplitude, através da barra de menu clique em OPÇÕES → MEDIDA DE AMPLITUDE e selecionar, clicando em cima do nome, entre as duas opções existentes: mV e mm.

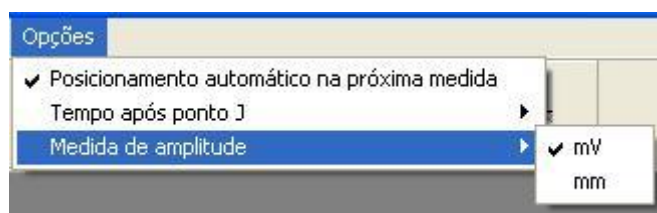

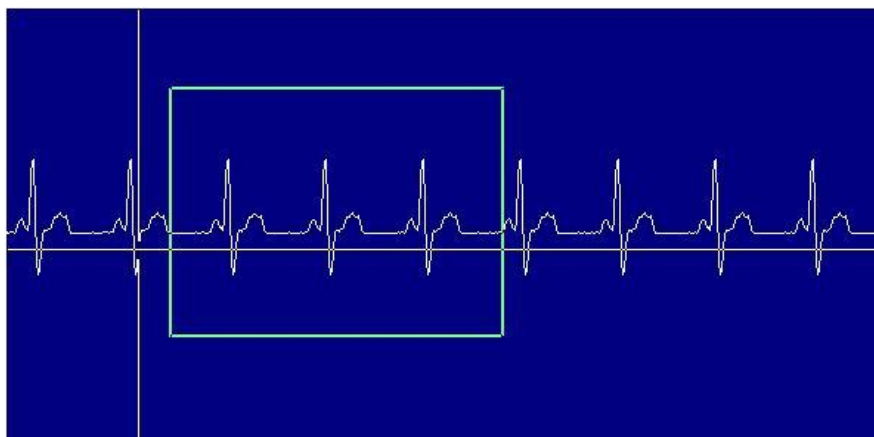

Para uma melhor visualização de trechos do traçado, clicar sobre este ícone, ou ativá-lo, a partir da barra de menu, em VISUALIZAR → MAIS ZOOM, e selecionar na tela de demonstração do traçado, no mínimo 3 batimentos completos.

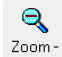


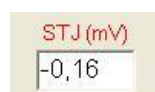
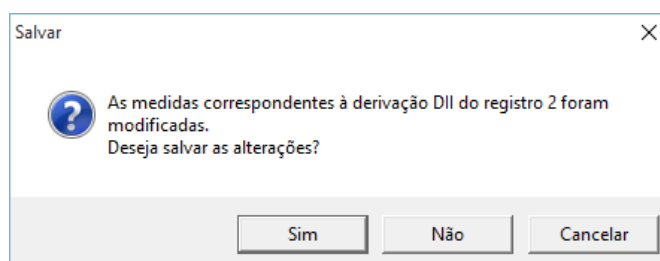
Observação: Em níveis de Zoom muito grandes é completamente normal que o sinal comece a apresentar uma distorção. Isto ocorre devido ao fato do sinal ser composto por um número finito de pontos e, portanto, ao se ampliar exageradamente, a onda vai tendendo a ser ligada por pequenas retas e não mais curvas. Entretanto a esse nível de zoom não existem aplicações práticas para as medidas que são possíveis nesta tela.

Para reduzir a imagem ampliada dos traçados, clicar sobre este ícone  ou ativá-lo, a partir da barra de menu, clicando em VISUALIZAR → MENOS ZOOM.

Selecionar o cursor para as medidas. Ao ir clicando neste ícone , ele irá alternar entre os 6 tipos diferente de cursores existentes.

Para ativar a mudança automática de campo de medição. Ao clicar neste ícone , ou ativá-lo, a partir da barra de menu, clicando em OPÇÕES → POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO NA PRÓXIMA MEDIDA, sempre que uma medida for efetuada, o próximo campo de medida já estará ativado para registro.

Sair da tela de MEDIDAS. Clicar sobre este ícone  ou ativá-lo, a partir da barra de menu, clicando em VISUALIZAR → SAIR. Ao clicar para SAIR, a caixa de mensagem, abaixo, irá abrir para que se confirme as alterações efetuadas. Clicar em SIM, para salvar as alterações e fechar a tela MEDIDAS. Clicar em NÃO, para não salvar as alterações e fechar a tela MEDIDAS, ou em CANCELAR, para voltar à tela de MEDIDAS.



Campo de marcação da medida STJ(mV). Ao ser marcado o ponto no traçado, o valor é gerado, automaticamente, ou, ainda, pode ser digitado diretamente neste campo. Para medir

a amplitude do ponto J, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto isoelétrico e, em seguida, clique no ponto J, conforme figura abaixo.



STY (mV)
-1,74

Campo de marcação da medida STY(mV). Ao ser marcado o ponto no traçado, o valor é gerado, automaticamente, ou, ainda, pode ser digitado diretamente neste campo. Para medir o segmento de ST e a inclinação de ST, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto isoelétrico e, em seguida, no ponto J, conforme mostrado na figura abaixo. Ao final deste procedimento, o campo InclST também será preenchido.



InclST (mV/s)
25,50

Campo de marcação da medida InclST(mV/s). Ao ser marcado o ponto no traçado, o valor é gerado, automaticamente, ou, ainda, pode ser digitado diretamente neste campo. Para medir a inclinação de ST e segmento de ST, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto isoelétrico e, em seguida, no ponto Y, conforme mostrado na figura abaixo. Ao final deste procedimento, o campo ST também será preenchido.



Amp R (mV)
2,71

Campo de marcação da medida Amp R(mV). Ao ser marcado o ponto no traçado, o valor é gerado, automaticamente, ou, ainda, pode ser digitado diretamente neste campo. Para medir a amplitude da onda R, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto isoelétrico da curva e, em seguida, clique sobre o pico da onda R, conforme figura abaixo.



FC (bpm)

Campo de marcação da medida FC (bpm). Ao ser marcado o ponto no traçado, conforme instrução, o valor será gerado, automaticamente, ou, ainda, pode ser digitado diretamente neste campo. Para medir a FC a partir do traçado, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a onda R e mova o cursor até o pico da segunda onda R consecutiva, conforme figura abaixo.



Delta X: 4090 ms
Delta Y: 2,71 mV

Demonstra os pontos de marcação do traçado em X:ms e Y:mV ou mm.

Registro

Demonstra o número do atual registro para marcação das medidas. Clicar na seta lateral e no número do registro que deseja editar as medidas.


Derivação

Demonstra a atual derivação para marcação das medidas. Clicar na seta lateral e no nome da derivação que deseja editar as medidas.


9.16. Ritmo

A tela de ritmo é utilizada para a visualização do canal de ritmo gravado durante todo o exame. Estes dados de ritmo são independentes do registro, funcionando como um Holter, ou seja, este canal de ritmo é gravado durante todo o esforço e recuperação e não somente quando da realização dos registros.




Para visualizar o RITMO, clique no ícone  ou abra RESULTADOS → TRAÇADO DE RITMO, a partir da barra de menu.


JANELA DE RITMO DE 1 DERIVAÇÃO

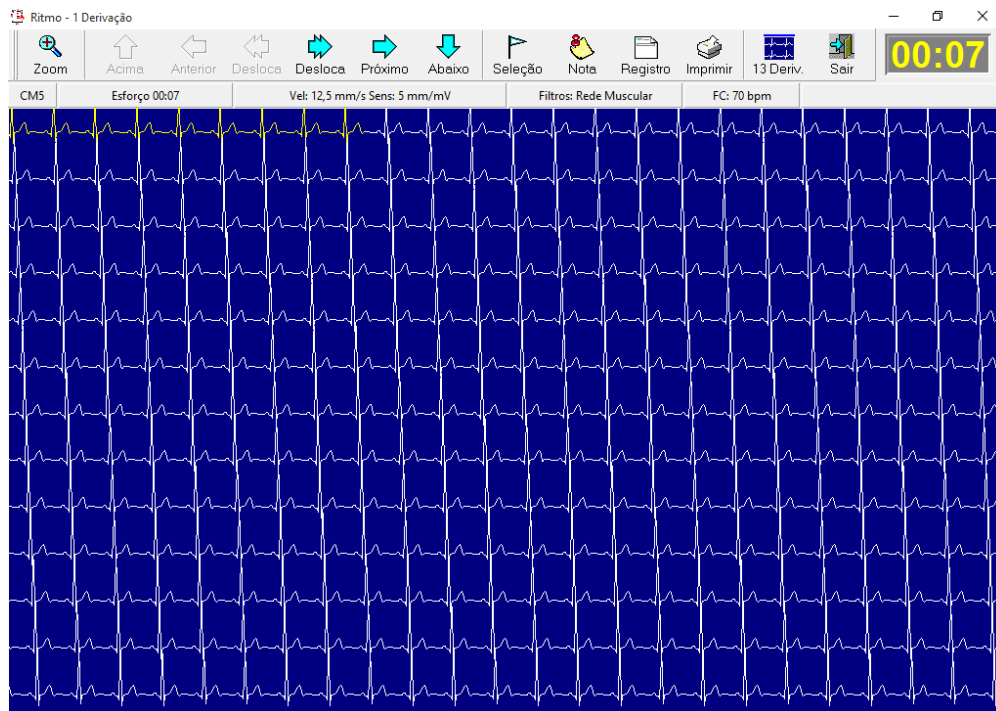


JANELA DE RITMO DE 3 DERIVAÇÕES

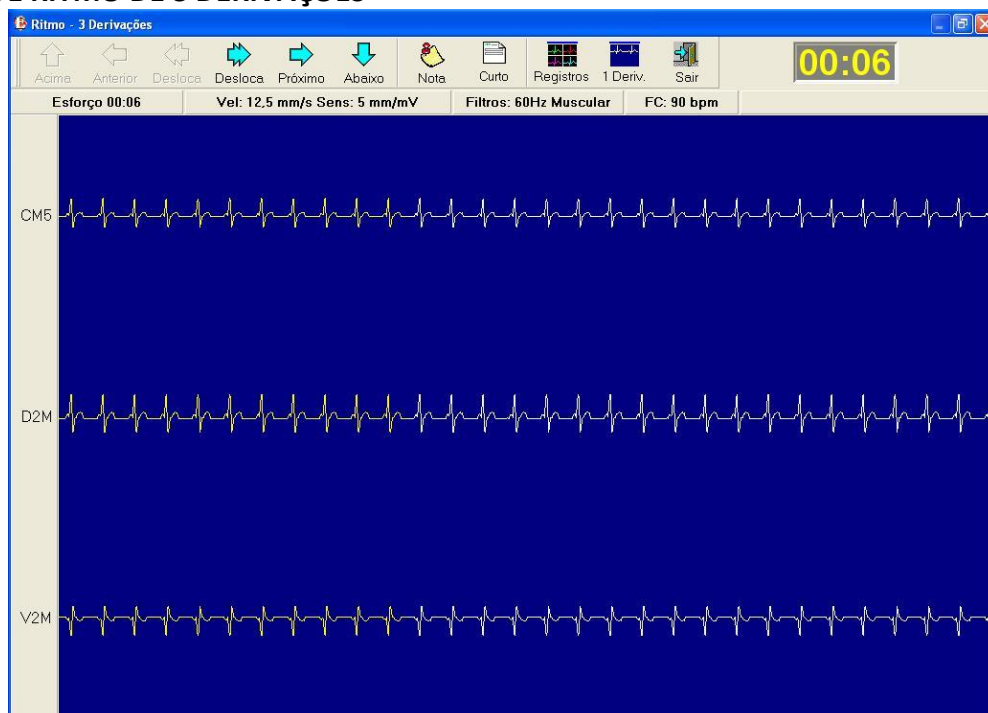


JANELA DE RITMO DE 12 DERIVAÇÕES

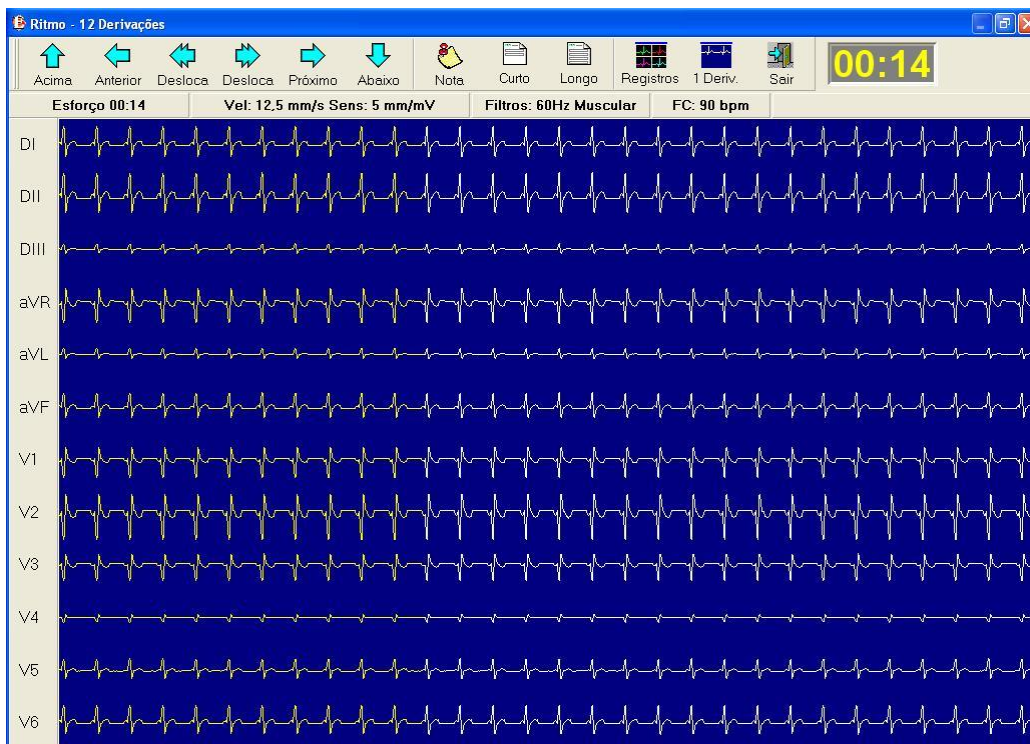

JANELA DE RITMO DE 13 DERIVAÇÕES

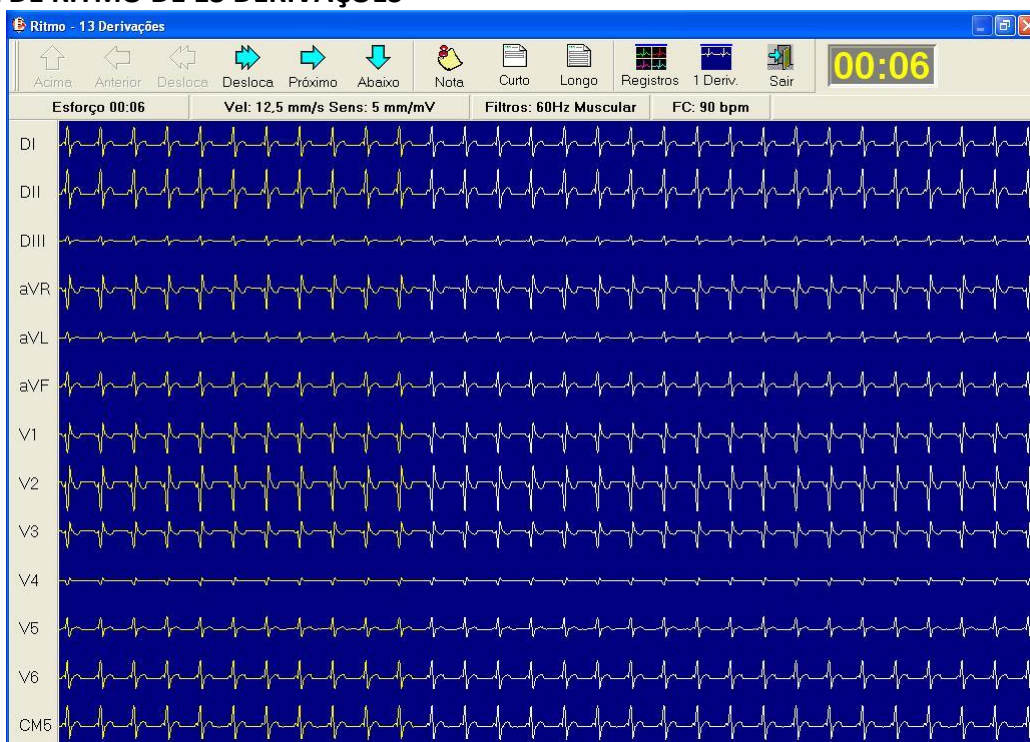

Ampliar para uma melhor visualização um trecho selecionado através das setas de navegação. Ao clicar no ícone ZOOM, a caixa de ampliação do traçado, abaixo, irá abrir. Clicar no ícone SAIR, para fechar a ampliação. Este ícone só aparece na tela de Ritmo em 1 Derivação.

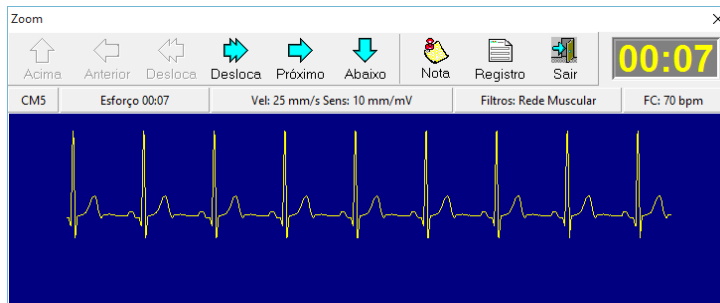

Desloca para a página anterior. Clicar no ícone.



Deslocar para o trecho anterior. Clicar no ícone.



Deslocar um trecho selecionado 1 ponto para esquerda ou 1 ponto para direita. Clicar no ícone referente à direção que deseja deslocar o ponto selecionado.




Deslocar para o próximo trecho. Clicar no ícone.




Deslocar para a próxima página. Clicar no ícone.

Definir o início e o fim de um trecho. Clique no ícone e no ponto inicial e no ponto final do trecho desejado. O trecho será marcado por duas bandeirolas vermelhas, conforme figura abaixo. Este ícone só aparece na tela de Ritmo em 1 Derivação.

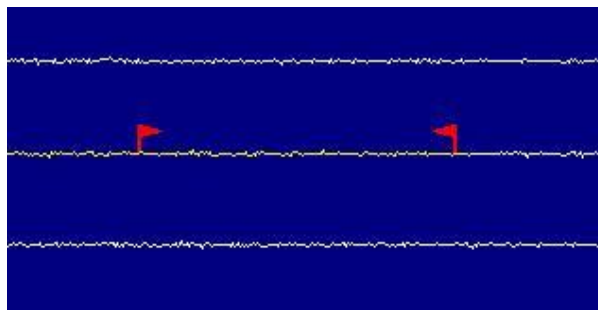

Caso selecione o ponto final em um valor menor do que o inicial, a caixa de aviso, abaixo, irá abrir. Clicar em OK e corrigir a marcação:

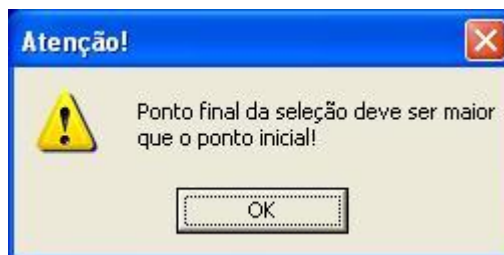

Efetuar um comentário sobre o traçado. Ao clicar neste ícone a caixa de inserção de comentário, abaixo, irá abrir. Digite a informação desejada e clique em OK, para salvar a NOTA, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.




Efetuar o registro em 1 derivação do trecho em destaque. Clicar no ícone. Este ícone só aparece na tela de Ritmo em 1 Derivação.



Efetuar um registro CURTO ou LONGO do trecho em destaque, caso esteja visualizando todas as derivações. Clicar no ícone referente ao registro desejado. Este ícone só aparece nas telas de Ritmo em 3, 12 e 13 Derivações.



Chamar a tela de seleção de impressão de ritmo. Ao clicar no ícone, a caixa de seleção, abaixo, irá abrir. Selecione o botão do tipo de impressão que deseja: TRECHO DO RITMO – para imprimir somente o trecho selecionado; RITMO COMPLETO – para imprimir todo o ritmo (apenas em 1 derivação); REGISTROS DO RITMO – para imprimir todos os registros do ritmo. Em seguida, clique em IMPRIMIR, para executar a impressão, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

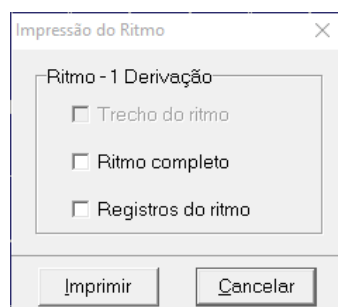

Esses botões aparecem de acordo com o número de derivações definidas para a prova. Ao clicar nesse ícone de derivação ele troca para a opção



e muda a visualização.



Registros

Ir para a tela de REGISTROS. Clicar no ícone. Este ícone só aparece nas telas de Ritmo em 3, 12 e 13 Derivações.




Sair

Sair da tela de RITMO. Clicar no ícone



Demonstra o tempo do trecho selecionado.

Observações: Ao final da prova o sistema questiona se deseja salvar o ritmo, veja figura abaixo. Salvar o ritmo significa guardar todo o traçado do paciente. Um exame ocupa, em média, 1 MB/minuto de espaço em disco, caso o ritmo seja salvo. Use essa opção apenas caso haja real necessidade. Se desejar salvar, clicar em SIM, caso não desejar guardar o ritmo da prova, clicar em NÃO.

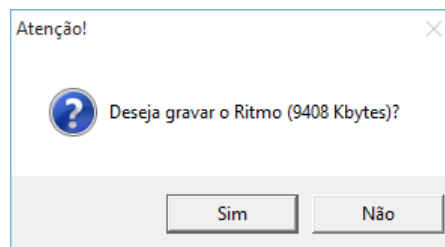

9.17. Laudo

O ERGO PC 13 permite a emissão de laudos de forma rápida e fácil. Ele possui um Editor de Laudos, no qual as informações de rotinas podem ser registradas e salvas para que, sempre que necessário, sejam apenas selecionadas no banco de dados e incluídas no laudo a ser emitido.



Para visualizar o editor de LAUDO, clique no ícone ou abra, a partir da barra de menu, clicando em LAUDO → LAUDO.

Revisão de Cálculos

Resposta da PA sistólica

Resposta da PA diastólica

Aptidão cardiorespiratória: Muito fraca

Tabela: AHA

FC máx.: 0 bpm

PAS máx.: 0 mmHg

PAD máx.: 0 mmHg

Atenção!
Esta tela serve como um atalho para a revisão/alteração de dados que mudam vários cálculos do Teste Ergométrico. Use com atenção.

Apresentar sempre esta tela


Confirmar Fechar

Será aberta automaticamente a caixa de Revisão de Cálculos onde poderá ser feita alterações ou confirmar os cálculos feitos anteriormente. Se não desejar que esta tela seja aberta todas as vezes que entrar na opção de LAUDO, desmarque a caixa APRESENTAR SEMPRE ESTA TELA.

A caixa de LAUDO, abaixo, irá abrir. O Editor tem, basicamente, as mesmas funções do Editor de Texto Microsoft Word e lhe permite criar FRASES ou GRUPOS DE FRASES. O Editor de Laudos se divide em dois campos:

Árvore de Frases: Banco de dados onde serão incluídas e salvas as FRASES e GRUPOS DE FRASES, assim como laudos inteiros, para a utilização sempre que necessário, evitando a redigitação de frases e a perda de tempo com a emissão de laudos.

Laudos Completo: é o corpo do laudo em si. Campo onde pode-se digitar, diretamente nele, as informações desejadas - como em um editor de textos comum- assim como, inserir frases já registradas na ÁRVORE DE FRASES.

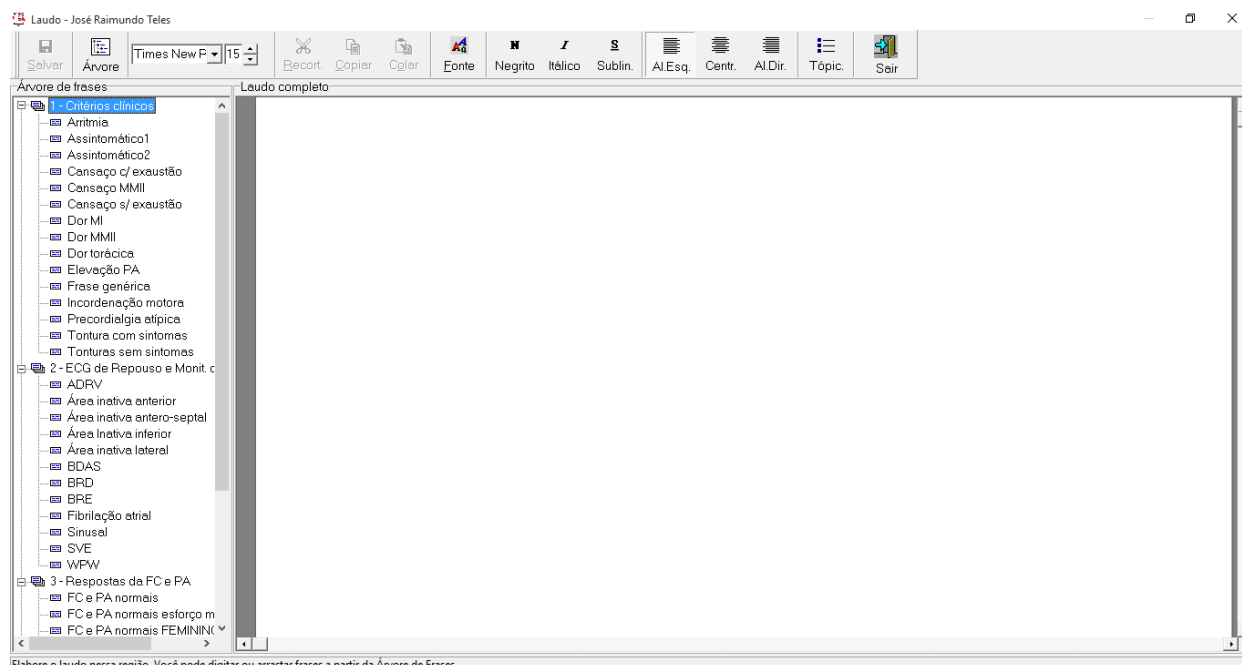


Este sistema de banco de dados do ERGOPC 13 lhe permite a criação ilimitada de Grupos de Frases e Frases. E para a sua utilização entenda-se por:


Grupo de Frases: local para a inserção de frases relacionadas a um mesmo assunto. Por exemplo: RITMO

Frases: informações inseridas em um GRUPO DE FRASES e relativas ao mesmo assunto a que este se refere. Por exemplo: Grupo de Frases: Ritmo >> Frases: Ritmo Sinusal; Taquicardia.


Criando um novo Grupo de Frases



1. Clicar no ícone . O menu rápido de opções, abaixo, irá abrir.
2. Clicar em CRIAR NOVO GRUPO DE FRASES.

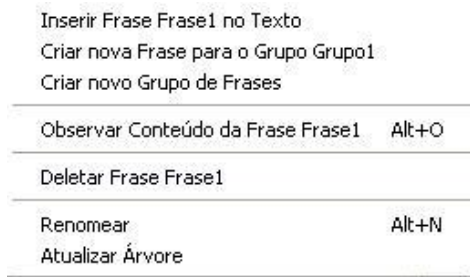

3. Automaticamente, um grupo chamado GRUPO 1 surge no campo ÁRVORE DE FRASES.

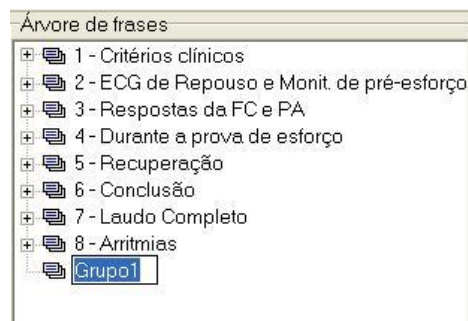


Observação: Sempre que necessitar criar um Grupo de Frases, siga este procedimento.

Renomeando um Grupo de Frases

Para renomear este grupo pode-se seguir um dos seguintes caminhos:

1. Clicar com o botão direito em cima do seu nome e, em seguida, clicar em RENAMEAR;


2. Selecionar o seu nome e clicar em  e depois em RENAMEAR;

3. Selecionar o seu nome e pressionar as teclas ALT + N.

4. Em ambos os casos, digite o novo nome desejado e tecle ENTER.




5. Caso insira um nome de Grupo que já exista, a caixa de aviso, abaixo, irá abrir. Clicar em OK e inserir um outro nome ao Grupo.

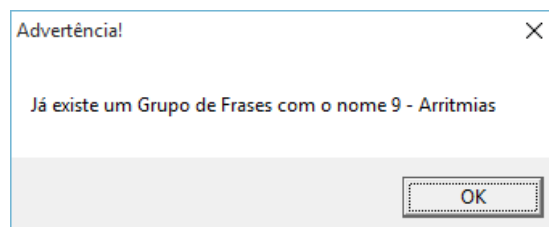

Excluindo um Grupo de Frases

Para excluir um Grupo de Frases, selecione o Grupo clicando sobre o seu nome e, em seguida, siga umas das seguintes opções:

1. Pressione a tecla DELETE do seu teclado;

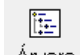2. Clique sobre o ícone  Árvore;


3. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome selecionado.

4. Nas duas últimas opções, a caixa de menu rápido irá abrir. Clicar em DELETAR GRUPO(nome do Grupo).

Observação: A exclusão, em todas as opções, será automática, ou seja, não terá caixa de confirmação para deletar. Caso o Grupo de Frases tenha Frases inseridas, estas devem ser excluídas antes da exclusão do seu Grupo.

Criando uma Frase

Selecione o Grupo de Frases, no qual deseja inserir uma Frase, clicando sobre o seu nome uma vez com o botão esquerdo do mouse e siga um dos seguintes caminhos:

1. Clicar em  e depois “CRIAR NOVA FRASE PARA O GRUPO (nome do Grupo escolhido)”;
2. Clicar com o botão direito do mouse sobre o nome selecionado e, em seguida, em CRIAR NOVA FRASE PARA O GRUPO (nome do Grupo escolhido).
3. O Subgrupo “Frase 1” surgirá logo abaixo do nome do GRUPO DE FRASES.




Observação: Sempre que necessitar criar uma Frase, siga este procedimento.

Renomeando uma Frase

Para renomear a FRASE, siga uma das seguintes opções:

1. Dar um duplo clique sobre o seu atual nome;
2. Clicar com o botão direito em cima do seu nome e, em seguida, clicar em RENAMEAR;

3. Selecionar o seu nome e clicar em  e depois em RENAMEAR;

4. Selecionar o seu nome e pressionar as teclas ALT + N.

5. Em ambos os casos, digite o novo nome desejado e tecle ENTER.




Inserindo informações em uma FRASE

Para inserir as informações desejadas na frase selecionada, siga uma das seguintes opções:



1. Clique no ícone .
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o seu nome.
3. Dê um duplo clique sobre o seu nome ou as teclas ALT + O do seu teclado.
4. Nas duas primeiras opções, a caixa do menu rápido irá abrir. Clicar em OBSERVAR CONTEÚDO DA FRASE(nome da Frase)”.

Em todas as opções, a caixa de um mini-editor de textos, abaixo, irá abrir. Digite as informações que desejar. Assim como em um editor de textos comum, selecionando as palavras ou o texto pode-se editá-los, como preferir, de acordo com as opções: Estilo da Fonte; Tamanho da Fonte; Negrito; Itálico; sublinhado; Alinhado à Esquerda; Alinhado ao Centro; Alinhado à Direita; Tópicos. Na opção “Variáveis” é possível inserir variáveis como: “Nome do paciente”, “RG”, “CPF”, “Idade”, entre outras em suas frases de laudo. Após finalizar, clique em OK, para salvar as informações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

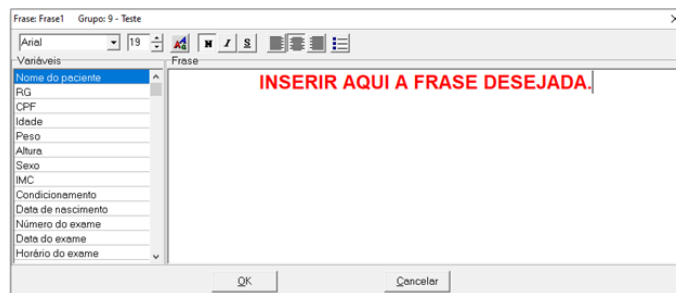


Excluindo uma Frase

Para excluir uma Frase, selecione a frase clicando sobre o seu nome e, em seguida, siga uma das seguintes opções:

1. Pressione a tecla DELETE do seu teclado;




2. Clique sobre o ícone .
3. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome selecionado.
4. Nas duas últimas opções, a caixa de menu rápido irá abrir. Clicar em “DELETAR FRASE (nome da Frase)”.
5. Em todas as opções, a caixa de confirmação, abaixo, irá abrir. Clicar em Sim, para deletar a frase, ou em Não, para cancelar a ação.

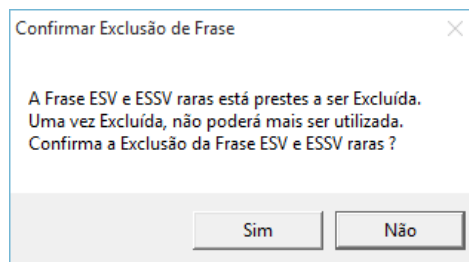

Visualizando o conteúdo de uma Frase

Para visualizar as informações inseridas em uma FRASE selecionada, siga uma das seguintes opções:




1. Clique no ícone ;
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o seu nome;
3. Dê um duplo clique sobre o seu nome;
4. Pressione as teclas ALT + O do seu teclado.
5. Nas duas primeiras opções, a caixa do menu rápido irá abrir. Clicar em OBSERVAR CONTEÚDO DA FRASE (NOME DA FRASE). Em todas as opções, a caixa do mini-editor de textos irá abrir. Observe e/ou edite as informações que desejar. Após finalizar, clique em OK, para salvar as informações, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.



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
Inserindo o conteúdo de uma Frase no Laudo

Além de inserir frases já prontas do banco de dados, você poderá inserir o texto que desejar diretamente no corpo do laudo. Para isto, clique no campo LAUDO COMPLETO e digite as informações.

Para inserir a Frase selecionada no texto - a partir do banco de dados, ou seja, no corpo do LAUDO COMPLETO, siga umas das seguintes opções:




1. Clicar no ícone .
2. Clicar com o botão direito do mouse sobre o nome da frase selecionada.
3. Em ambas as opções, a caixa de menu rápido irá abrir. Clicar em INSERIR FRASE (nome da Frase) no texto. Automaticamente, a frase já registrada no banco de dados será inserida no campo LAUDO COMPLETO.

	Seta para Cima - Sobe na Árvore;
	Seta para Baixo - Desce na Árvore;
	Seta para a Direita sobre um Grupo de Frases - Abre um Grupo de Frases;

←	Seta para a Esquerda sobre um Grupo de Frases - Fecha um Grupo de Frases;
→	Seta para a Direita estando sobre uma frase - Insere a Frase no Laudo. Para isso é necessário estar sobre a frase e ao dar a seta para a direita a mesma irá automaticamente ser inserida na parte de baixo do laudo.

Atualizando a Árvore

Para atualizar a Árvore de Frases, siga uma das seguintes opções:

1. Clicar no ícone  **Árvore**
2. Clicar com o botão direito do mouse na área **ÁRVORE DE FRASES**.
3. Em ambas as opções, a caixa do menu rápido irá abrir. Clicar em **ATUALIZAR ÁRVORE**. Automaticamente, a área da Árvore de Frases se organiza, demonstrando os nomes do Grupo em ordem Alfanumérico.

Formatando um Texto no Laudo

Assim como em um editor de textos comum, suas informações digitadas no laudo poderão ser editadas de acordo com as ferramentas apresentadas no **MENU DE FERRAMENTAS**. Para a edição, selecione o texto que deseja alterar pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando-o do início ao fim do texto que será editado. Siga as opções seguintes:



Para selecionar o tipo e o tamanho da Fonte desejados, clique nas setas laterais dos referentes campos e selecione o que se deseja na listagem.



Recorta o texto selecionado. Para isto, clique sobre este ícone.




Cola o texto recortado ou copiado. Para isto, posicione o cursor no local onde se deseja colar o texto e clique sobre este ícone.



Transforma o texto selecionado em negrito. Para isto, clique sobre este ícone. Siga o mesmo procedimento para tirar o negrito do texto.



Transforma o texto selecionado no formato itálico. Para isto, clique sobre este ícone. Siga o mesmo procedimento para tirar o formato itálico do texto.

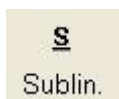

Sublin.

Sublinha o texto selecionado. Para isto, clique sobre este ícone. Siga o mesmo procedimento para tirar o sublinhado do texto.



Al.Esq.

Alinha o texto selecionado à esquerda. Para isto, clique sobre este ícone.



Centr.

Alinha o texto selecionado ao centro. Para isto, clique sobre este ícone.



Al.Dir.

Alinha o texto selecionado à direita. Para isto, clique sobre este ícone.




Tópic.

Transforma os parágrafos do texto selecionado em tópicos. Para isto, clique sobre este ícone. Siga o mesmo procedimento para tirar o formato de tópicos do texto.




Fonte

Abre a caixa de edição do texto. Para isto, clique sobre este ícone. A caixa de edição, abaixo irá abrir. Nela pode-se encontrar todas as mesmas ferramentas dispostas no MENU DE FERRAMENTAS e descritas uma a uma acima. Para salvar as alterações, clicar em OK. Para cancelar a ação, clicar em CANCELAR.

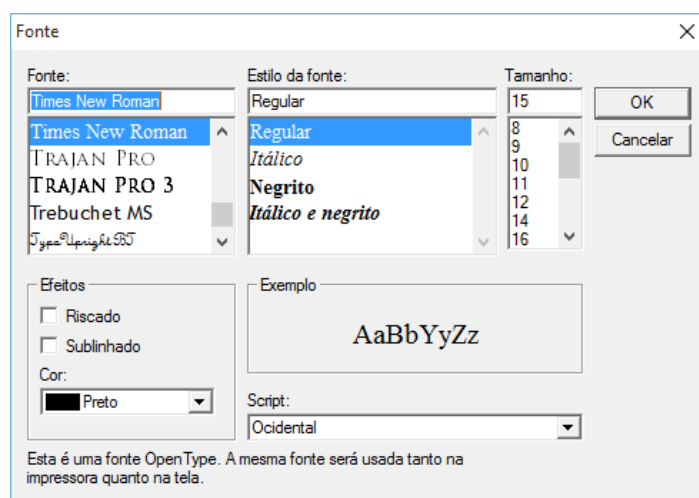

Salvando o Laudo


Sempre que fizer uma alteração no editor de Laudo, clicar no ícone  para que suas alterações sejam registradas no sistema.

Sempre que reabrir o editor de laudos, o último laudo emitido estará visível.

Saindo do Editor de Laudos




Para sair do Editor de Laudos, clicar no ícone . Caso tenha feito alguma alteração e não tenha salvado, a caixa de aviso, abaixo, irá abrir. Clicar em SIM, para salvar e fechar o editor. Clicar em NÃO, para não salvar e fechar o editor. Clicar em CANCELAR, para voltar ao editor.

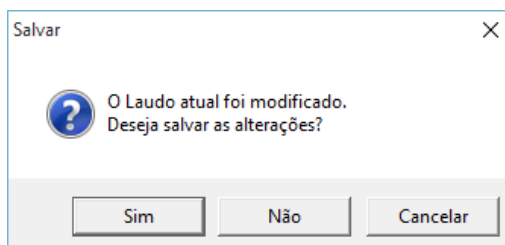

9.18. Imprimindo os Resultados

Após concluir a análise dos resultados, bem como a emissão do laudo, pode-se determinar o que se deseja imprimir. O sistema possibilita a impressão parcial, ou seja, é possível escolher os parâmetros que serão impressos – caso não deseje a impressão completa - onde todos os dados referentes ao exame corrente serão impressos.


Antes de enviar o comando de impressão, é importante verificar se a impressora está configurada corretamente, a partir da barra de menu, em PACIENTE → CONFIGURAR IMPRESSORA. A caixa de configuração padrão, abaixo, irá abrir. Configure de acordo com o que desejar e clique em OK, para salvar a configuração e fechar a caixa, ou em CANCELAR, para cancelar a ação e fechar a caixa.

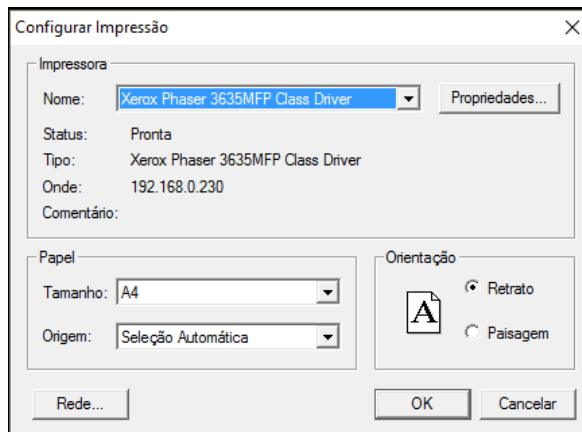

Para imprimir o exame, siga uma das opções a seguir:


1. Clique no ícone ;
2. Clique, a partir da barra de menu, em “Paciente” → “Imprimir Exame”.

Em ambas as opções a caixa de Impressão, abaixo, irá abrir. Selecione apenas os itens que deseja imprimir clicando em seus botões de referência – ou desmarque as opções que não serão impressas com o mesmo procedimento. Clique em IMPRIMIR, para efetuar a impressão, ou em CANCELAR, para cancelar a ação.

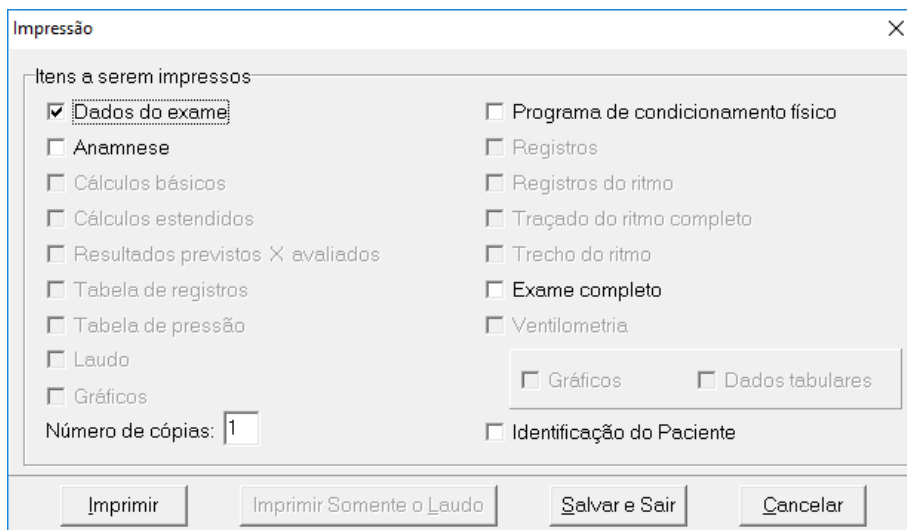

Observação: As configurações selecionadas acima serão utilizadas também para gerar as imagens **DICOM** que são enviadas para o servidor, excetuando o campo **Identificação do Paciente**, este nunca compõe a imagem **DICOM**. Após selecionar, basta clicar no botão “Salvar e Sair”.

Observação: Caso não seja selecionado algum item na configuração de impressão acima, ao imprimir será informado erro ao usuário por não ter nada para imprimir.

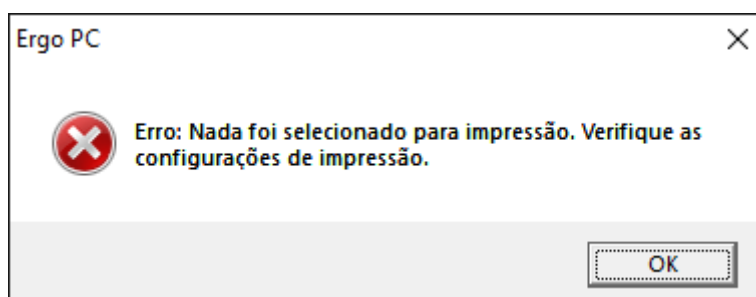

10. Módulo DICOM


Configurando a Licença DICOM

Para configurar o ErgoPC 13 na utilização do Protocolo DICOM é necessário que o Eletrocardiógrafo esteja habilitado para tal finalidade. Certifique-se de que seu Eletrocardiógrafo esteja habilitado para DICOM na Micromed.


Para configurar o Protocolo DICOM, clique no Menu “Configuração/DICOM” para abrir a guia DICOM. Para obter/renovar a licença DICOM é necessário clicar em “Obter ou renovar licença”. O Sinal do Traçado deve estar passando em tela para que o Número de Série do Eletrocardiógrafo seja lido.

Obter ou renovar licença

Após a obtenção/renovação da Licença DICOM ser concluída é necessário que o Software ErgoPC 13 seja reiniciado. Clique em “OK” para a mensagem e em “OK” para a guia “DICOM” e reinicie o Software ErgoPC 13.

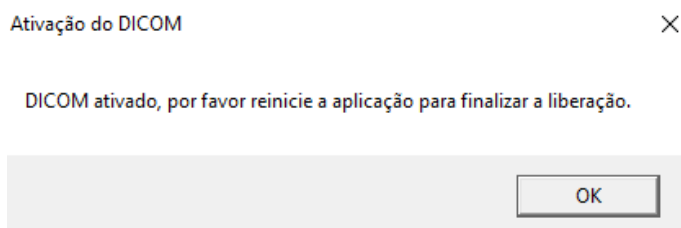

Ao ser reiniciado, abra novamente a aba “DICOM” no Menu “Configuração/DICOM” para colocar os dados do “Servidor Worklist” e do “Servidor de Envio de Dados” de acordo com a configuração de seus respectivos Servidores. Note que nesta aba serão mostrados o Número de Série do Eletrocardiógrafo conectado e a validade da Licença de uso de DICOM dele.

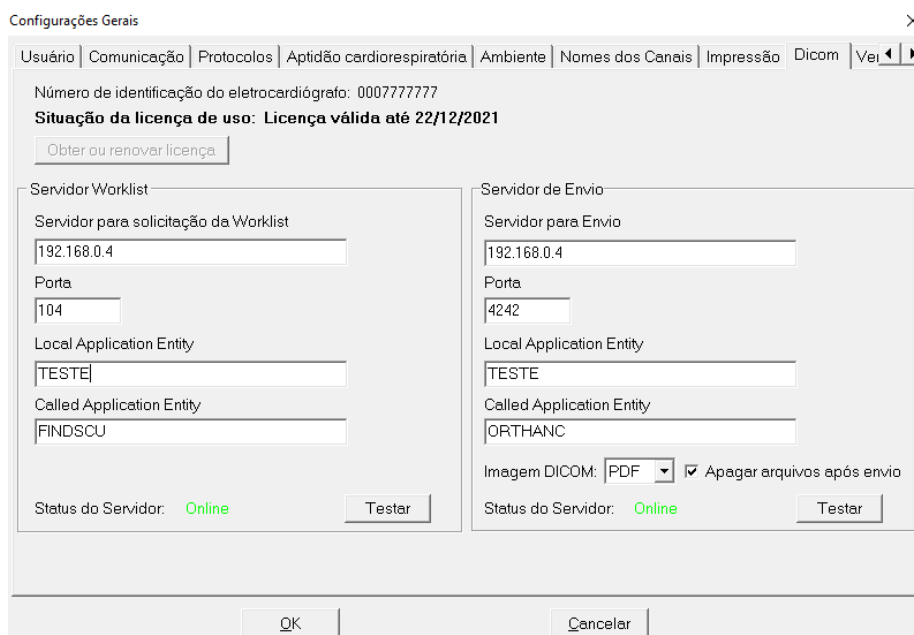


Exemplo de configuração dos Servidores de Worklist e de Envio de Dados

Após os Servidores serem configurados corretamente, clicar nos botões “Testar” de cada Servidor. Se o Status de um ou dos dois Servidores estiver “Offline”, as configurações dele(s) deve(m) ser revista(s). Se o Status dos Servidores estiver “Online”, um exame DICOM poderá ser iniciado.

Executando exame a partir de um Worklist

Assim que o ErgoPC 13 for iniciado e configurado corretamente o usuário poderá iniciar um Exame pela Worklist. Para isso é necessário clicar no botão “Worklist” na tela de Traçado do ErgoPC 13.

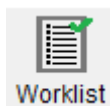

Preencha os Filtros e clique no botão “Pesquisar” para encontrar o nome do Paciente agendado. Nesta tela mostrará Nome de Paciente, Sexo, Data Nascimento, Study Instance UID, Registro Clínico, Modality, Data do Exame, Hora do Exame e Accession Number.

Worklist Dicom

Worklist

Status do Servidor: **Online**

Nome	Sexo	Data Nascimento	Study Instance UID	Reg. Clínico	Modality	Start Date	Start Time	Accession Number
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.105	PAT004	MR	18/09/1997	13:00:00	125
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.104	PAT004	CT	18/09/1997	16:00:00	125
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.106	PAT004	US	20/10/1997	14:00:00	125
Miss Emma Smith	F	03/06/1948	1.2.826.0.1.3680043.11.103	PAT003	RF	01/01/2001	08:20:00	126
Miss Liz Evans	F	19/07/1971	1.2.826.0.1.3680043.11.122	PAT017	CT	20/12/2005	16:00:00	141
Miss Mary Davies	F	27/05/1929	1.2.826.0.1.3680043.11.107	PAT005	MR	07/11/2005	15:00:00	127
Miss Sarah Thomas	F	15/09/1960	1.2.826.0.1.3680043.11.110	PAT008	MR	01/03/2006	12:00:00	130
Miss Sarah Thomas	F	15/09/1960	1.2.826.0.1.3680043.11.111	PAT008	CT	01/03/2006	14:00:00	131
Mr Andrew Philips	M	17/12/1944	1.2.826.0.1.3680043.11.116	PAT012	NM	15/01/2006	10:30:00	135
Mr Burt Ward	M	14/10/1941	1.2.826.0.1.3680043.11.124	PAT019	US	17/02/2006	11:30:00	143

Filtros

Nome: Reg. Clínico: Study Instance UID: Modality: Start Date: Accession Number:

Pesquisar

A fazer
 Em andamento
 Realizado

Exames em Andamento

Nome	Data Nascimento	Registro Clínico	Study Instance UID	Data Exame	Hora Exame	Status Exame
Miss Sarah Thomas	15/09/1960	PAT008	1.2.826.0.1.3680043.11.110	06/02/2018	09:25:27	Iniciado


Retirar Exame Associar Exames Enviar Todos




Lembre-se de que sempre quando um exame for iniciado, o Eletrocardiógrafo deve estar conectado para que o Número de Série do Eletrocardiógrafo seja lido pelo Software ErgoPC 13.

Para iniciar um exame, clicar duas vezes no Paciente desejado, preencher os dados necessários para início de um exame no ErgoPC 13, nas telas de “Dados de Paciente” e “Anamnese” descritos no “Item 9” e executar o exame normalmente.

Para que o exame seja enviado é necessário tirar pelo menos um **Registro**, **Finalizar o Exame** e clicar no botão “Enviar”.

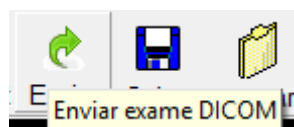

Assim que o Exame DICOM for enviado, o ErgoPC 13 dará a mensagem que “As imagens foram exportadas com sucesso.” e um novo exame poderá ser iniciado.

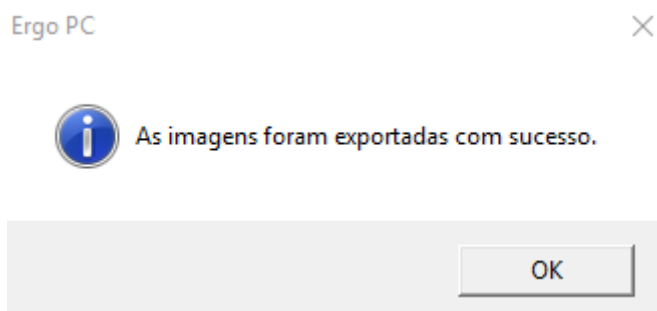


Se o exame não for enviado neste momento, o usuário poderá abri-lo novamente para enviar o DICOM clicando em “Worklist”, e então no Paciente desejado que está listado em “Exames em Andamento”.

Nome	Data Nascimento	Registro Clínico	Study Instance UID	Data Exame	Hora Exame	Status Exame
Miss Sarah Thomas	15/09/1960	PAT008	1.2.826.0.1.3680043.11.110	06/02/2018	09:25:27	Iniciado

Retirar Exame Associar Exames Enviar Todos

Identificando o Status do Exame

Na listagem do Worklist o Exame pode ter os seguintes Status:

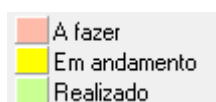

A fazer: A listagem dos Pacientes agendados estarão na cor **Rosa**.

Em andamento: A listagem dos Pacientes que estão com Exame em andamento estarão na cor **Amarela**.

Realizado: A listagem dos Pacientes que já realizaram Exame estarão na cor **Verde**.

Se o software ErgoPC 13 estiver configurado para funcionar utilizando o protocolo DICOM, todos os exames realizados irão aparecer na tela de Worklist no campo “Exames em Andamento”, independentemente se nasceram da seleção de exame agendado do Worklist ou a partir da opção de novo exame.

Executando um exame sem Worklist

Existe a possibilidade de realização de um exame no ErgoPC 13 sem Worklist, mas que pode ser associado futuramente a um exame do Worklist e dessa forma ser enviado ao servidor de Envio de Dados. Essa funcionalidade é opcional e para ser habilitada é preciso entrar em contato com o Suporte da Micromed.


Caso seja habilitada a execução de exames se Worklist para posterior associação, todos os exames realizados normalmente, ou seja, não pela via da janela de Worklist, ficarão marcados como exames DICOM e serão mostrados na janela de Worklist como “Exame sem Worklist”. Para o seu correto envio ao servidor DICOM, o exame precisa ser associado a algum exame do Worklist.

Nome	Sexo	Data Nascimento	Study Instance UID	Reg. Clínico	Modality	Start Date	Start Time	Accession Number
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.105	PAT004	MR	18/09/1997	13:00:00	125
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.104	PAT004	CT	18/09/1997	16:00:00	125
Dr William Bowen	M	07/08/1956	1.2.826.0.1.3680043.11.106	PAT004	US	20/10/1997	14:00:00	125
Miss Emma Smith	F	03/06/1948	1.2.826.0.1.3680043.11.103	PAT003	RF	01/01/2001	08:20:00	126
Miss Liz Evans	F	19/07/1971	1.2.826.0.1.3680043.11.122	PAT017	CT	20/12/2005	16:00:00	141
Miss Mary Davies	F	27/05/1929	1.2.826.0.1.3680043.11.107	PAT005	MR	07/11/2005	15:00:00	127
Miss Sarah Thomas	F	15/09/1960	1.2.826.0.1.3680043.11.110	PAT008	MR	01/03/2006	12:00:00	130
Miss Sarah Thomas	F	15/09/1960	1.2.826.0.1.3680043.11.111	PAT008	CT	01/03/2006	14:00:00	131
Mr Andrew Philips	M	17/12/1944	1.2.826.0.1.3680043.11.116	PAT012	NM	15/01/2006	10:30:00	135
Mr Burt Ward	M	14/10/1941	1.2.826.0.1.3680043.11.124	PAT019	US	17/02/2006	11:30:00	143


Nome	Data Nascimento	Registro Clínico	Study Instance UID	Data Exame	Hora Exame	Status Exame
Juarez Vieira Perrut	21/04/1959		Exame sem Worklist	06/02/2018	09:40:41	Iniciado
Miss Sarah Thomas	15/09/1960	PAT008	1.2.826.0.1.3680043.11.110	06/02/2018	09:25:27	Iniciado

Associando um exame sem Worklist

Para associar um exame realizado sem Worklist, deve ser clicado o botão “Worklist”.

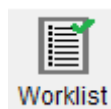

A tela com os exames agendados e os já executados será mostrada e após selecionar os exames que se deseja associar, o botão “Associar Exames” deve ser clicado.

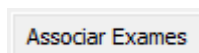

Se o paciente do Exame do Worklist não existir ainda no ErgoPC 13, a tela de cadastrar paciente será aberta.

Paciente

Dados

Nome

Sexo Data de nasc. Prontuário

RG CPF

Endereço

Cidade Telefone (res.)

Estado Telefone (trab.)

CEP

Após o cadastro, será perguntado se realmente deseja fazer a associação.

Atenção!

Deseja realmente associar **Juarez Vieira Perrut** com **Dr William Bowen**?



Lembre-se de que essa ação não poderá ser desfeita. O exame realizado em nome do paciente anterior, será transferida para o paciente cadastrado no Worklist.

Após a associação, o exame realizado sem Worklist recebe todos os dados do exame do Worklist associado.

Nome	Data Nascimento	Registro Clínico	Study Instance UID	Data Exame	Hora Exame	Status Exame
Miss Sarah Thomas	15/09/1960	PAT008	1.2.826.0.1.3680043.11.110	06/02/2018	09:25:27	Iniciado
Dr William Bowen	07/08/1956	PAT004	1.2.826.0.1.3680043.11.105	06/02/2018	09:40:41	Iniciado


Retirar Exame **Associar Exames** Enviar Todos

Retirando um exame da lista de envio

Existe a possibilidade de se retirar da lista de envio de exames DICOM os exames selecionados. Para isso, basta selecionar o exame a ser retirado e clicar no botão “Retirar Exame”.

Retirar Exame

Antes de desmarcar o exame para envio, será pedida uma confirmação do procedimento.

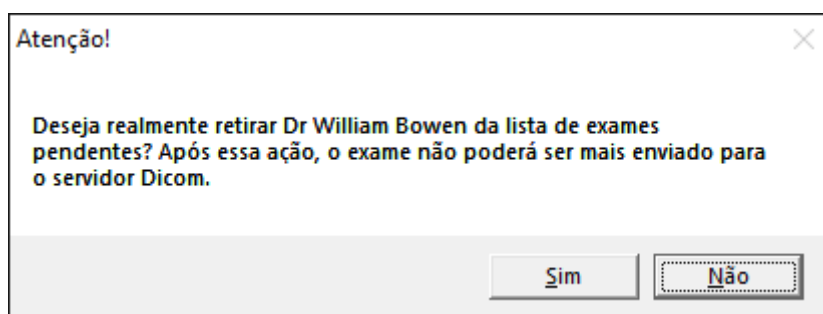

Essa ação não exclui o exame, apenas desmarca ele da lista de envio de exames para o servidor DICOM. Não há como reverter a ação, após solicitada.

Enviando todos os exames pendentes

Os exames classificados como “Exames em Andamento” podem ser enviados todos de uma vez só, pressionando o botão “Enviar Todos”.

Enviar Todos

Apêndice A – Termo de Garantia

A MICROMED assegura ao proprietário do produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora oferecida aplica-se somente a produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da data da instalação do produto.

Equipamentos da área de Cardiologia

• Eletrocardiógrafo Micromed (ECG Digital) Modelos: Wincardio, ErgoPC 13, ErgoPC Elite	2 anos*
• Esteira Centurion 300	1 ano*
• Gravador de Holter Ambulatorial Nomad	1 ano*
• Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial Modelo: ABPM-04	2 anos*

Softwares

• Wincardio, ErgoPC 13, ErgoPC Elite	1 ano*
• Hyperview	1 ano*
• Nomad	1 ano*

Ergoespirometria

• Analisador de Gases Respiratórios Modelo: Metalyzer 3B e Metamax 3B	1 ano*
• Fonte de Alimentação	1 ano*
• Software Metastudio	1 ano*
• Software Metasoft	1 ano*
• Turbina (Metalyzer / Metamax)	6 meses*
• Linha de Ar (Metalyzer / Metamax)	6 meses*
• Célula (Metamax)	6 meses*
• Célula (Metalyzer)	3 meses*
• Máscaras e cabeçais	3 meses*

Acessórios

• Carregador Wireless MEWD-100	2 anos*
• Fonte de alimentação do eletrocardiógrafo	1 ano*
• Fonte de alimentação do analisador de gases	1 ano*
• Peras de sucção, cardioclipes, Belt Clip e eletrodos	3 meses*
• Bolsa, Cinto, Cartão SD e Alças	3 meses*
• Cabo de paciente	3 meses*

* já incluído o prazo da garantia legal (90 dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor).

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o Suporte Técnico da Micromed através dos telefones 4005-1899 ou 0800 5910-178 ou consultar o site da Micromed para obter informações sobre a [Rede Credenciada Autorizada Micromed](#).

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia oferecida se aplica:

- À mão-de-obra e equipamentos fornecidos pela MICROMED, que, em caso de problema comprovadamente causado por defeitos de fabricação, compromete-se a reparar ou substituir, a seu exclusivo critério, o produto ou peça defeituosa.

A Garantia oferecida NÃO se aplica a:

- Danos causados por instalação elétrica em desacordo com as normas MICROMED;
- Lucros cessantes, decorrentes da ausência do equipamento para reparos;
- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça (gabinete), displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da MICROMED;
- Danos causados por mau uso entendido como, mas não limitando a manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- Alterações, abertura, manutenção, substituição, modificações e/ou reparos de peças realizadas por terceiros que não são oficialmente credenciados pela MICROMED como Assistência Técnica Autorizada;
- Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais ou homologados pela MICROMED.
- Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais.
- Utilização de softwares ou instalação de interfaces e/ou periféricos que não sejam expressamente autorizados pela MICROMED;
- Modificações na configuração dos equipamentos ou instalações sem prévia anuência da MICROMED;
- Deficiências na embalagem ou transporte inadequado, quando este transporte for realizado pelo cliente ou por empresas autorizadas pelo cliente, inclusive quando este transporte for em virtude de reparos cobertos por esta garantia;
- Danos decorrentes de tumulto, guerra, fenômenos da natureza ou conturbações civis;
- Introdução de vírus de computador devido à instalação de programas (softwares) realizada por pessoas não autorizadas pela MICROMED.

A MICROMED não se obriga a atualizar ou modificar seus produtos após a venda e estas modificações não serão, obrigatoriamente, comunicadas ao cliente, embora normalmente sejam.

ATENÇÃO:

A MICROMED recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos arquivos (backup).

Caso ocorra problema no banco de dados e sua recuperação não for possível, a única alternativa será recorrer ao Backup, que minimiza a perda de dados.

É necessário ressaltar que, não havendo nenhum Backup, a única solução será apagar toda a base de dados corrompida e criar uma nova completamente vazia e que **TODOS OS EXAMES FEITOS NESSA BASE, ATÉ ENTÃO, SERÃO PERDIDOS!**

A MICROMED não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes quando da atualização de software.

Apêndice B - Uso Avançado do ERGOPC 13

Emissão de laudos durante o exame

O ERGOPC 13 permite a emissão ou definição de laudos em qualquer fase da prova, tornando flexível o procedimento de registro do parecer médico. Fica a critério do usuário o momento da emissão do laudo.

Utilizando o ERGOPC 13 em Rede

Uma das principais características do sistema ERGOPC 13 é a possibilidade de disponibilizar os exames realizados através da rede de computadores. Isto significa que o exame poderá ser visualizado por outros computadores integrantes da rede, permitindo uma flexibilidade na rotina da clínica. Um exemplo seria a realização do exame na sala de prova e a análise e impressão na sala do médico (após o encerrar e salvar do exame).

Procure o suporte técnico da Micromed para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos quanto à utilização do ERGOPC 13 Air em rede.

Utilizando o Protocolo de Rampa

A escolha do protocolo adequado é de suma importância para que se possa exercitar os pacientes ao máximo de sua capacidade aeróbica. Em ergometria, há necessidade do respeito ao princípio da individualidade biológica, devendo o método ser adaptado ao paciente. No caso do método do protocolo de rampa, existem três vantagens que justificam a sua utilização:

Curvas com comportamento ideal – A maioria dos protocolos são caracterizados pelo incremento de velocidade e elevação em intervalos pré-determinados, o que causa uma oscilação no comportamento das curvas. Ao contrário dos demais, o protocolo de rampa é linear, ou seja, as variáveis crescem sem sobressaltos permitindo um bom comportamento de todas as curvas fornecidas pelo equipamento e garantindo que a prova será realizada em um tempo ideal.

Predeterminação do tempo de prova - Com o protocolo de rampa é possível pré-determinar o tempo de prova do paciente, tornando o protocolo personalizado.

Possibilidade de atingir o esforço máximo caminhando – Outra vantagem deste tipo de protocolo é a possibilidade de fazer com que qualquer pessoa atinja o esforço máximo na caminhada, tornando o eletro de melhor qualidade.

A possibilidade de intervenção do médico, em qualquer parte da prova para alteração dos parâmetros, é uma vantagem oferecida pelo sistema, ou seja, em qualquer momento da prova, com base no comportamento mecânico do paciente e nas curvas dos gráficos, o médico poderá influenciar na inclinação e /ou velocidade da esteira.

O protocolo de rampa é utilizado no sistema ErgoPC 13 quando a esteira permite o controle automático.

Ao iniciar um novo exame (veja instruções no Capítulo 5) e, a partir da área CONTROLE, clicar em FASE → SIM, uma tela com os parâmetros calculados com base nos dados da ANAMNESE, mostrada abaixo, abrirá. Para alterar os valores clique e digite nos campos referentes ou clique

no botão desejado, quando necessário. Em seguida, clique em OK para que as alterações sejam salvas.

Velocidade Inicial - O sistema determina que o valor da Velocidade Inicial é de: 3 Km/h - considerando caminhada e 8 Km/h - considerando corrida. O médico poderá alterar esses valores caso julgue necessário.

Velocidade Final - O valor da Velocidade Final será calculado pelas fórmulas:

Caminhada $\Leftarrow \text{VO}_2 = \text{Velocidade} * 1.675 + 0.3015 * \text{Velocidade} * \text{Inclinação} + 3.50$

Corrida $\Leftarrow \text{VO}_2 = \text{Velocidade} * 3.35 + 0.15075 * \text{Velocidade} * \text{Inclinação} + 3.50$

A princípio, o valor da inclinação é considerado zero - caso o a esteira atinja a sua velocidade máxima, esse valor é compensado pelo valor da inclinação, até que VO₂ previsto seja atingido.

Razão velocidade - É o incremento da velocidade por minuto em função do tempo de teste determinado.

Inclinação Inicial – O sistema considera a inclinação inicial como sendo zero. O médico poderá alterar este valor.

Inclinação Final - O valor da inclinação será calculado com base na fórmula descrita acima, de forma a compensar os valores da velocidade para se atingir o VO₂ Máximo.

Razão Inclinação - É o incremento da Inclinação em função do tempo de teste determinado.

VO₂ Máximo Previsto – é calculado segundo a fórmula:

Homens $\Leftarrow \text{VO}_2\text{Máx} = 1.11 * (60 - 0.55 * \text{idade})$

Mulheres $\Leftarrow \text{VO}_2\text{Máx} = 1.11 * (48 - 0.37 * \text{idade})$

VO₂ Máximo a ser atingido – Se o médico alterar os valores de velocidade e inclinação finais o valor de VO₂ Máximo será recalculado.

Tipo de Exercício – Esta opção mostra o tipo de exercício ideal com base nos cálculos. O sistema sempre tentará ajustar os valores para caminhada, mas o médico poderá alterar esta opção, caso considere necessário.

Tempo de Teste – O tempo de teste inicialmente estabelecido pelo sistema é de 10 minutos, mas caso o médico julgue conveniente poderá alterar este valor. Caso este valor seja alterado, os valores da razão da velocidade e da inclinação serão alterados automaticamente.

A duração do exame não é necessariamente a estipulada. Caso o esforço máximo não tenha sido atingido dentro do tempo determinado, o exame continuará com as mesmas razões calculadas.

Utilizando o Recurso de Gravação de Ritmo

Uma das grandes facilidades do Sistema ERGOPC 13 é a possibilidade de gravar todo o traçado sem que o médico tenha que se preocupar com o registro. Com o sistema de Gravação de Ritmo do teste de esforço é possível, após o exame, selecionar os trechos do traçado que melhor retratam o estado do paciente. Este recurso permite que o médico não se preocupe com a operação do sistema, detendo a sua atenção única e exclusivamente no comportamento do examinado.

O sistema grava todo traçado de esforço e recuperação. O médico poderá optar por tirar registros do trecho que julgar conveniente e, também, poderá salvar todo o ritmo do paciente para posterior avaliação e/ou impressão.

A gravação de ritmo inicia-se automaticamente assim que o cronômetro, no teste de esforço, é acionado. Isto possibilita que o médico possa, ao final da prova, rever todo o traçado - ampliando trechos para uma melhor análise e adicionar notas, assim como retirar registros dos pontos críticos.

Outra flexibilidade oferecida pelo sistema é a possibilidade de na tela de ritmo optar por registro curto ou longo determinando assim o tipo de impressão.

Utilizando as Médias

A utilização das Médias na realização do teste de esforço se fundamenta nos seguintes tópicos:

1. Eliminar as interferências como ruído muscular intenso.
2. Permitir uma maior precisão das medidas automáticas, uma vez que o sistema se baseia na média para realização das medidas automáticas.
3. A utilização da Visualização de todas médias permite que o médico se concentre nas derivações que mais lhe interessam e acompanhe as demais derivações através das médias.

É importante ressaltar que as médias somente são válidas quando não contaminadas por artefatos como extra-sístoles constantes e ruídos. Quando houver interferências na média, deve-se considerar o traçado real e, neste caso, utiliza-se o recurso de impressão sem as médias. Após a realização do exame é importante conferir as medidas significativas, uma vez que elas se baseiam nas médias que podem estar contaminadas por ruídos.

Observações: A correção dos pontos fiduciais (J Isoelétrico e Y) é crucial para a fidedignidade dos cálculos gerados nas médias. Essa correção pode ser feita on-line, em qualquer momento do exame, quantas vezes o médico julgar necessário.

Utilizando a Telemedicina

Com o recurso da telemedicina o médico poderá enviar para qualquer parte do mundo os parâmetros de um exame através da Internet ou utilizando o modem. Com este recurso é possível visualizar o resultado de um teste ergométrico (traçados e medidas) e emitir o laudo remotamente (à distância) ou pedir segunda opinião.

Exportando Exames

Os exames do ERGOPC podem ser exportados e visualizados em outro computador da rede. Para visualizar um exame exportado do ERGOPC 13 é necessário que o computador, que irá abrir o exame, possua o ERGOPC 13 instalado. Para exportar o exame siga os procedimentos:

1. Abra o exame que deseja exportar;
2. Clique, a partir da barra de menu, em PACIENTE ➔ EXPORTAR EXAME;
3. Escolha o local de destino, em sua máquina ou na rede, onde deseja salvar o exame exportado. Caso tenha salvo em outra máquina, na rede, esta deverá ter instalado o

sistema ERGOPC 13 para que possa visualizar o exame. Para enviar o exame pela internet, utilize e-mail e o sistema de anexar arquivo.

Apêndice C - Fórmulas

Aqui estão dispostas todas as fórmulas utilizadas no Sistema ERGOPC 13 e as fontes utilizadas como referência.

Frequência Cardíaca Máxima Prevista (Bpm)

$$FC \text{ MÁXIMA} = 220 - \text{IDADE}$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Frequência Cardíaca Sub Máxima Prevista (Bpm)

$$FC \text{ SUB MÁXIMA} = FC \text{ MÁXIMA} \times 0,85$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Débito Cardíaco Previsto (L / Min)

$$Q \text{ (HOMENS)} = 26,5 - (0,17 \times \text{IDADE})$$

$$Q \text{ (MULHERES)} = 15,0 - (0,071 \times \text{IDADE})$$

Hossak e cols. , 1980

Débito Cardíaco Avaliado (L / Mim)

$$Q \text{ (HOMENS)} = (\text{VO}_2 \text{ MÁX} \times \text{PESO} \times 0,0046) + 5,31$$

$$Q \text{ (MULHERES)} = (\text{VO}_2 \text{ MÁX} \times \text{PESO} \times 0,00407) + 4,72$$

$$Q \text{ (CARDIOPATAS)} = (\text{VO}_2 \text{ MÁX} \times \text{PESO} \times 0,0046) + 3,10$$

Hossak e cols., 1980

Débito Sistólico Previsto (L / Min X Bpm)

$$\text{DÉBITO SISTÓLICO PREVISTO (HOMENS)} = 112 - (0,363 \times \text{IDADE})$$

$$\text{DÉBITO SISTÓLICO PREVISTO (MULHERES)} = 74 - (0,172 \times \text{IDADE})$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Débito Sistólico Avaliado (L / Min X Bpm)

$$DS = 1000 \times \frac{Q}{FC \text{ MÁX}}$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Duplo Produto Máximo Previsto (Mmhg X Bpm)

$$DP \text{ MÁXIMO PREVISTO} = 360 - (0,54 \times \text{IDADE}) \times 100$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Duplo Produto Máximo Avaliado (Mmhg X Bpm)

$$DP \text{ MÁXIMO AVALIADO} = \text{PAS} \times FC \text{ MÁXIMA}$$

Ellestad, Prova de Esforço 2ª Ed. Editora Cultura Médica Ltda.

Número De Met Máximo Previsto (Met)

HOMEM SEDENTÁRIO

$$\text{MET} = \frac{57,8 - (0,445 \times \text{IDADE})}{3,5}$$

HOMEM ATIVO

$$\text{MET} = \frac{69,7 - (0,6142 \times \text{IDADE})}{3,5}$$

MULHER SEDENTÁRIA

$$\text{MET} = \frac{41,2 - (0,343 \times \text{IDADE})}{3,5}$$

MULHER ATIVA

$$\text{MET} = \frac{44,4 - (0,343 \times \text{IDADE})}{3,5}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Vo2 Máximo (ml / (kg Min))

1 - Utilizando o protocolo de BRUCE em esteira são usadas as seguintes fórmulas :

CARDIOPATA

$$\text{VO}_2 = (\text{TEMPO (min)} \times 2,33) + 9,48$$

HOMEM SEDENTÁRIO

$$\text{VO}_2 = (\text{TEMPO (min)} \times 3,29) + 4,07$$

HOMEM ATIVO

$$\text{VO}_2 = (\text{TEMPO (min)} \times 3,78) + 0,19$$

MULHER

$$\text{VO}_2 = (\text{TEMPO (min)} \times 3,36) + 1,06$$

BRUCE E COLS. : American Heart Journal, Vol. 85, page 546, 1973

2 - Utilizando outros protocolos diferentes do de Bruce, o sistema utiliza a equação de Balke, que é válida para qualquer protocolo em esteira.

$$\text{VO}_2 = v \times (0,073 + cc / 100) \times 1,8$$

onde:

cc = inclinação da esteira em percentual

v = velocidade da esteira em metros / min

BALKE, U.S. Armed Forces Med. Journal, 10:675, 1959

3 - Utilizando a Bicicleta como ergômetro é utilizada a seguinte equação:

$$VO_2 = \frac{(12 \times \text{CARGA EM WATTS}) + 300}{\text{PESO}}$$

LEA & FEBIGER : ACSM, 1980

Met Avaliado

$$\text{MET} = \frac{VO_2}{3.5}$$

Mvo2 Máximo (MI X (100 G Ve Min))

$$\text{MVO}_2 \text{ MÁX.} = (\text{DUPLO PRODUTO MÁXIMO} \times 0,0014) - 6,3$$

HELLERSTEIN, H. K. E COLS. : Conference Center Arlie. Virginia , 1972

Déficit Cronotrópico (Bpm)

$$\text{DÉFICIT CRONOTRÓPICO} = 100 \times \frac{\text{FC MÁX PREVISTA} - \text{FC MÁX ALCANÇADA}}{\text{FC MÁX PREVISTA}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Déficit Aeróbico Funcional - Fai (%)

$$\text{FAI} = 100 \times \frac{(\text{VO}_2 \text{ MÁX PREVISTO} - \text{VO}_2 \text{ MÁX OBTIDO})}{\text{VO}_2 \text{ MÁX PREVISTO}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Déficit Aeróbico Do Miocárdio - Mai (%)

$$\text{MAI} = 100 \times \frac{(\text{MVO}_2 \text{ MÁX PREVISTO} - \text{MVO}_2 \text{ MÁX OBTIDO})}{\text{MVO}_2 \text{ MÁX PREVISTO}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Déficit Funcional De Ventrículo Esquerdo (%)

$$\text{D.F.V.E.} = 100 \times \frac{(\text{DP MÁX PREVISTO} - \text{DP MÁX ALCANÇADO})}{\text{DP MÁX PREVISTO}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Reserva Cronotrópica (Bpm)

$$\text{R.C} = \text{FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA} - \text{FREQUÊNCIA CARDÍACA BASAL}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Variação Da Pressão Arterial Sistólica (Mmhg / Met)

$$\text{VAR PAS} = \frac{\text{PAS MÁX} - \text{PAS BASAL}}{\text{MET MÁX}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Varição Da Pressão Arterial Diastólica (Mmhg / Met)

$$\text{VAR PAD} = \frac{\text{PAD MÁX} - \text{PAD BASAL}}{\text{MET MÁX}}$$

Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

QTc

$$\text{QTc} = \frac{\text{QT}}{\sqrt{\text{R} - \text{R}}}$$


Vivacqua & Spagna, 1ª Ed.

Delta Rst (Drst)

$$\text{dRST} = 10 \times [(\text{ST referência} - \text{ST atual}) + (\text{R atual} - \text{R referência})]$$

Apêndice D – Medidas do nível do segmento ST e da amplitude da onda R

O Sistema ERGO PC 13 procede, automaticamente, à medida do nível do segmento ST e, também, da amplitude da onda R. O critério usado para a medida é descrito na figura abaixo:

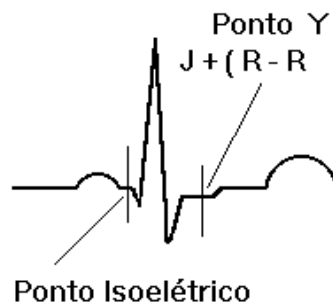

Para que as medidas sejam feitas é necessário o cálculo de uma média dos complexos cardíacos. Esta média tem a função de limpar os ruídos aleatórios que muitas vezes estão presentes na prova de esforço. Estes ruídos são causados pelo deslocamento dos eletrodos sobre a pele do paciente e são mais intensos no pico do esforço. Como estes ruídos são aleatórios, o cálculo da média elimina estas interferências.

As medidas são feitas sobre um complexo que é a média dos últimos dezesseis complexos. A cada dezesseis complexos é feita uma nova média e a anterior é descartada. Isto garante que variações momentâneas no traçado não sejam perdidas, pois a média é constituída somente pelos últimos complexos.

1. Ponto Isoelétrico

O ponto isoeletrico localiza-se sobre o segmento P-Q e é o ponto de voltagem zero, a partir do qual são feitas todas as medidas. Este ponto é pré-determinado a partir do pico da onda R.

$$\text{Ponto Isoelétrico} = \text{Pico da Onda R} - 57 \text{ milissegundos}$$

No traçado o ponto isoeletrico é representado por um traço vertical.

Este ponto pode ser ajustado manualmente, bastando clicar sobre a média.

2. Ponto J

O ponto J é predeterminado a partir do pico da onda R.

$$\text{Ponto J} = \text{Pico da Onda R} + 60 \text{ milissegundos}$$

Este ponto pode ser ajustado manualmente, bastando clicar sobre a média.

3. Amplitude da Onda R

A medida da amplitude da onda R é feita do pico da onda R até o ponto isoeletrico. Os valores são expressos em milivolts ou milímetros.

4. Nível do Segmento ST

A medida do nível do segmento ST é feita comparando o nível do ponto isoelétrico com o nível do Ponto J mais um valor que pode ser 80 ms, R-R/16 ou R-R/8. Os valores são expressos em milivolts.

No método manual de medida normalmente é tomado o ponto J mais 80 milissegundos. No entanto, às vezes, ao ser adotado este critério para a medida automática do nível ST, com o aumento da frequência cardíaca, o ponto da medida sobe na onda T. Isso forneceria um valor de nível ST crescente chegando até à valores que caracterizariam um falso supra desnivelamento.

Tendo em vista este problema foi acrescentado um padrão mundial para medida automática que leva em consideração a variação da frequência cardíaca. Com isto, a medida do nível ST é feita realmente sobre o segmento ST e não sobre a onda T.

$$\text{PONTO Y} = \text{J} + \frac{\text{R} - \text{R}}{16} \quad (\text{meio do segmento ST})$$

ou

$$\text{J} + \frac{\text{R} - \text{R}}{8} \quad (\text{fim do segmento ST})$$

Na tela o ponto da medida do nível ST é representado por um traço vertical.

O Ergo PC 13 continuamente mede o ST do ponto J e do ponto Y, sendo que ambos os valores podem ser mostrados no traçado e na tabela.

Apêndice E – Filtros

O Sistema ERGOPC 13 possui dois filtros: Filtro Muscular e Filtro de Variação de Linha de Base e 60 Hz. Estes filtros estão disponíveis para a execução tanto do ECG de Repouso como do ECG de Esforço.

1. Filtro Muscular

Filtro digital (por processamento digital de sinais), cuja finalidade é diminuir a interferência gerada pelo tremor muscular do paciente no sinal cardíaco. Essa interferência diminui muito a qualidade do exame.

Converse com o paciente pedindo para que ele fique o mais relaxado possível durante a aquisição do sinal. Dessa forma a qualidade será sensivelmente maior.

2. Filtro de Variação de Linha de Base e 60 Hz

Filtro digital (por processamento digital de sinais), cuja finalidade é diminuir a variação da linha de base e também eliminar a presença do ruído gerado pela rede elétrica na frequência de 60 Hz. Na presença de variação de linha de base ou de ruído de 60 Hz, as medidas automáticas não são exatas e, portanto, nestas condições recomendamos o uso dos filtros.

O ruído de 60 Hz advém de interferência causada pela proximidade da fiação da instalação elétrica. Sua ocorrência pode ser atenuada por meio de um aterramento de proteção eficiente da rede de alimentação de energia.

A variação de linha de base ocorre devido a problemas no preparo de pele do paciente. Mesmo utilizando o filtro, dedique atenção especial ao preparo do paciente.

3. Alterações no eletrocardiograma

O uso de filtros implica sempre em uma alteração do sinal adquirido. Por este motivo somente é recomendado o uso dos filtros na presença de ruídos que estejam interferindo no traçado ou nas medidas automáticas. O uso de qualquer filtro deve ser sempre feito levando-se em conta a relação custo/benefício de sua aplicação.

O filtro de Variação de Linha de Base e 60 Hz produz uma alteração no sinal cardíaco que é dependente da frequência cardíaca. Em frequências inferiores à 57 bpm o filtro introduz uma alteração do sinal, proporcional à diminuição da frequência cardíaca. Em frequências acima de 57 bpm a alteração do sinal é somente a retirada do ruído ou da variação da linha de base. Em Provas de Esforço, frequências abaixo de 57 bpm são muito incomuns e nestes casos a alteração no sinal cardíaco é desprezível.

Devido às características da Prova de Esforço - que exige grande movimentação do paciente - e, conseqüentemente, dos eletrodos e, também, devido à presença de suor, a aquisição de um bom traçado muitas vezes depende do uso de filtros. Podemos observar que a alteração no sinal cardíaco é muito menor do que as alterações causadas pelo ruído, justificando plenamente o seu uso.

Apêndice F – Backup

O ERGOPC 13 utiliza-se de um sistema de banco de dados para guardar todos os exames, frases, configurações individuais, etc.

É necessário ressaltar que, não havendo nenhum Backup, a única solução será apagar toda a base de dados corrompida e criar uma nova, completamente vazia. **TODOS OS EXAMES FEITOS ATÉ ENTÃO SERÃO PERDIDOS.**

Frequência do Backup

A rotina de Backup deve ser estabelecida pela clínica dentro de uma discussão sobre quantos exames podem ser perdidos sem comprometer o bom andamento dos trabalhos.

O mais importante nessa discussão é o bom senso. Há algumas perguntas básicas cujas respostas determinam a frequência do Backup:

“Se sua base de dados do ERGOPC 13 (que, exemplificando, já conta com 900 exames) corromper hoje, de forma irremediável, e você necessitar usar o Backup, quando foi feito o último Backup? Quantos exames foram perdidos? Isso gera algum dano à sua clínica?”

Baseado nas respostas a essas perguntas, cada clínica determina de quanto em quanto tempo é feito o Backup.

Alguns clientes escolhem fazer o Backup todos os dias no final do expediente e outros a cada semana.

Qual ferramenta de Backup deve ser usada?

A escolha da ferramenta de Backup é muito particular e depende de vários fatores. Entre outros citamos alguns:

1. Nível de conhecimento de informática por parte do usuário;
2. Existência ou não de um técnico responsável pela informática da clínica;
3. Prévia existência de uma rotina de Backup na clínica;
4. Disponibilidade de mídia para a realização do Backup;
5. Interesse em manter um Backup atualizado;

Se já houver uma ferramenta de Backup em uso na clínica aconselhamos que ela seja usada para a realização do Backup do ErgoPC 13. Caso contrário será necessário implementar uma rotina de Backup criando-se meios para que isso aconteça.

Em caso de não haver nenhuma ferramenta disponível para o Backup sugerimos o programa MS-BACKUP da Microsoft. Esse programa está disponível em todos os instaladores do Windows e pode ser instalado facilmente pelo usuário.

Preste muita atenção ao selecionar o arquivo que deverá ser copiado para o backup. A pasta a ser feito o backup do ERGOPC 13 é a pasta DADOS, disposta no caminho: C: → ARQUIVOS DE PROGRAMAS(X86) → MICROMED → ERGOPC → DB → ErgoPC13.FDB

Para instalar configurar o backup em seu micro consulte o manual do Windows ou o siga os passos recomendados pelo sistema. Caso haja qualquer dúvida consulte um técnico em informática ou ligue para o Suporte Técnico da Micromed.

ATENÇÃO:

A MICROMED recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos arquivos (backup).

Caso ocorra problema no banco de dados e sua recuperação não for possível, a única alternativa será recorrer ao Backup, que minimiza a perda de dados.

É necessário ressaltar que, não havendo nenhum Backup, a única solução será apagar toda a base de dados corrompida e criar uma nova completamente vazia e que **TODOS OS EXAMES FEITOS NESSA BASE, ATÉ ENTÃO, SERÃO PERDIDOS!**

A MICROMED não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes quando da atualização de software.

Como restaurar o Backup

No processo descrito, acima, fizemos o Backup da pasta “Dados”. Dentro dela estão todas as informações de configurações e exames de todos os pacientes. Em caso de perda de uma base de dados, devemos restaurar esta pasta. Para fazer isso siga a seguintes instruções:

1. Delete a pasta DADOS (siga o caminho: C: → ARQUIVOS DE PROGRAMAS(X86) → MICROMED → ERGOPC → DB →).
2. Abra o programa MS-BACKUP.
3. Leia atentamente cada tela e siga as instruções, optando por RESTAURAR BACKUP e não o criar. Ao chegar à tela com a listagem de pastas a serem restauradas, lembre-se de selecionar o arquivo de BACKUP que foi salvo anteriormente (a pasta DB). Ao selecionar a pasta e iniciar o processo de restaurar a base de dados será regravada no seu local original. Aguarde até ser informado de que a operação foi concluída, em seguida, abra o ERGOPC 13 e cheque se sua base de dados abrindo e imprimindo antigos e novos exames.

Apêndice G - Solução de Problemas

Abaixo encontra-se uma tabela com a relação dos defeitos mais comuns e suas possíveis soluções.

Sintoma do Problema	Causas mais prováveis	Possíveis Soluções
Ao abrir o software do ErgoPC 13 aparece a mensagem: "Eletro ausente ou não configurado"	<ol style="list-style-type: none"> 1. O eletrocardiógrafo está desligado; 2. O eletrocardiógrafo não está pareado com o Bluetooth de seu computador 3. O eletrocardiógrafo está fora do alcance do Bluetooth do seu computador 4. O eletrocardiógrafo está com defeito em um de seus canais e a autocalibração inicial não é capaz de corrigir o problema; 5. Algum componente do eletrocardiógrafo está queimado; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue o eletrocardiógrafo e tente novamente; 2. Pareie o eletrocardiógrafo ao Bluetooth do seu computador e tente novamente 3. Certifique-se de que o eletrocardiógrafo não está em uma distância maior do que 10 metros de seu computador 4. Encaminhe o eletrocardiógrafo para a Micromed ou um de seus representantes; 5. Encaminhe o eletrocardiógrafo para a Micromed ou um de seus representantes;
Algumas derivações do eletrocardiograma não são mostradas ou estão muito ruidosas	<ol style="list-style-type: none"> 1. O cabo de paciente e/ou o eletrocardiógrafo estão defeituosos; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se houver um cabo de paciente sobressalente faça a troca e veja se o problema foi resolvido; 2. Se com o cabo sobressalente o problema for sanado, envie o cabo antigo para a Micromed ou um de seus representantes; 3. Se o problema persistir, envie o eletrocardiograma e o cabo de paciente para a Micromed ou um de seus representantes; 4. Se não houver cabo sobressalente para realizar o teste, envie o cabo e o eletrocardiógrafo para a Micromed ou um de seus representantes;
Dúvidas sobre o eletrocardiógrafo	-----	Dúvidas sobre o eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air podem ser sanadas pela leitura deste manual ou em ligação para a Área de Suporte Técnico da Micromed em horário comercial. Uma

		outra forma é a consulta a um dos nossos representantes.
Dúvidas sobre o Software ErgoPC 13	-----	Dúvidas sobre o software ErgoPC 13 podem ser sanadas pela leitura deste manual ou em ligação para a Área de Suporte Técnico da Micromed em horário comercial. Uma outra forma é a consulta a um dos nossos representantes.
Atualização do software ErgoPC 13	-----	Para que seja feita a atualização do software ErgoPC 13, favor entrar em contato com a Área de Suporte Técnico da Micromed.
Emissão do certificado de calibração do Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air	-----	A Micromed pode enviar o Certificado de Calibração do Eletrocardiógrafo ErgoPC 13 Air em dois casos: a). Durante o período de garantia do produto. Neste Caso o certificado tem a data de validade definida até o dia de vencimento de garantia; b) A qualquer momento fora do período de garantia desde que o equipamento venha completo para a Micromed. O mesmo será revisado e, se houver algum reparo a ser feito, um orçamento será enviado ao cliente. Este orçamento incluirá o custo da emissão do novo certificado de garantia. Uma vez aprovado, o Certificado será emitido e enviado juntamente com o equipamento para o respectivo dono.

Apêndice H – Especificações Técnicas e Compatibilidade Eletromagnética

Especificações Técnicas

- Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air com interface Bluetooth;
- Dimensões: Altura – 17,3 mm, Largura – 73 mm e Profundidade – 128 mm;
- 13 derivações simultâneas;
- Derivações: DI, DII, DIII, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aVR, aVL e aVF e CM5
- Faixa de frequências: 0,05Hz a 150Hz (-3dB)
- Conversão analógico-digital: 16 bits@ a 600 amostras/s por canal
- Amplitude máxima do sinal de entrada: 20mVpp
- Potencial de eletrodo máximo antes da saturação: +/- 1000mV
- CMRR: 100dB (mínimo)
- Sensibilidade: 2,6 µV;
- Velocidade de traçado de 25 mm/s e 50 mm/s (+/- 1%);
- Ganhos de amplitude de 5 mm/mV, 10 mm/mV e 20 mm/mV (+/- 5%);
- Filtros digitais para eliminação de flutuação de linha de base, interferência de rede elétrica de 60Hz e interferência muscular.
- Frequências cardíacas de 30 a 240 bpm (+/- 1%);
- Circuito do paciente com terra flutuante com proteção contra descargas de desfibriladores cardíacos.
- Tipo de comunicação: Sem fios, via interface Bluetooth® classe 2, versão 2.1+EDR;
- Potência máxima de transmissão: +4dBm;
- Sensibilidade: -80dBm típica;
- Frequências: 2,402 MHz a 2,480 MHz
- Modulação: FHSS/GFSK, 79 canais em intervalos de 1 MHz;

Armazenamento, Transporte e Conservação do produto

O Eletrocardiógrafo não deve ser exposto ao vapor, poeira, luz solar intensa, fontes de calor, choques mecânicos excessivos, vibrações mecânicas excessivas;

Condições de Operação: O ambiente onde o eletrocardiógrafo funcionará deverá ter umidade entre 10% e 95% sem condensação e temperatura entre -5º C e 55º C;

Condições de Armazenamento e Transporte: Estando embalado em sua caixa original, o eletrocardiógrafo e seus acessórios devem ser armazenados em ambientes que tenham a umidade entre 10% e 95% sem condensação e temperatura entre -5º C e 55º C.

Os conectores do eletrocardiógrafo e de seus acessórios não podem ser mergulhados em nenhum tipo de líquido;

Não derrame líquido de qualquer natureza no eletrocardiógrafo;

Não use abrasivos no eletrocardiógrafo e nem em seus acessórios.


Limpe o cabo de paciente com gaze umedecida em álcool a 70%.

Limpe o gabinete do Eletrocardiógrafo com tecido macio levemente umedecido em água e com sabão neutro, tomando cuidado para que não haja penetração de líquido em seu interior. Seque em seguida.

Compatibilidade Eletromagnética

Emissões Eletromagnéticas		
O Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário garanta que ele seja utilizado em tal ambiente		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético -Diretrizes
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR11	Grupo 1	O Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air utiliza-se de RF para suas funções internas. Portanto, suas emissões são muito baixas e provavelmente não causarão qualquer interferência em equipamentos eletrônicos nas proximidades.
Emissões de RF ABNT NBR CISPR11	Classe B	O Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e aqueles conectados a uma rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimenta edificações para utilização doméstica.
Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Emissões devido à flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Imunidade Eletromagnética ^c			
O Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de ensaio ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético – Diretriz
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz até 80 MHz	3 V	Equipamentos de comunicação de RF portátil ou móvel não deveriam ser usados próximos a qualquer parte do eletrocardiógrafo, incluindo cabos, com distância de separação menor que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de Separação Recomendada: d= 1,17V P

RF Irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz até 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,17 \sqrt{P}$ de 80MHz até 800 MHz $d = 2,33 \sqrt{P}$ de 800MHz até 2,5 GHz Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m) É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção eletromagnética no local, ^a seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência, ^b Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte símbolo: 
-------------------------------	-----------------------------	-------	---

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^a As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissões de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se que seja feita uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o eletrocardiógrafo é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o eletrocardiógrafo deveria ser observado para verificar se sua operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como reorientação ou recolocação do eletrocardiógrafo.

^b Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deveria ser menor que 3 V/m.

^c **Desempenho essencial:** As perturbações eletromagnéticas, quando mantidas dentro dos níveis de ensaio, não causam oscilações no traçado eletrocardiográfico maiores que 50µV – correspondentes a 1mm de deslocamento no traçado com ganho máximo (20 mm/mV), o que corresponde à metade da menor amplitude provável de uma onda P do traçado eletrocardiográfico.

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o eletrocardiógrafo

O eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e o eletrocardiógrafo como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.

Potência máxima nominal de saída do transmissor	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor		
	m		
W	150 kHz até 80 MHz	80 MHz até 800 Mhz	800 Mhz até 2,5 GHz
	$d = 1,17 \sqrt{P}$	$d = 1,17 \sqrt{P}$	$d = 2,33 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,7	11,7	23,3



O uso de cabos e acessórios diferentes daqueles fornecidos pela Micromed pode ocasionar acréscimo de emissões eletromagnéticas ou decréscimo da imunidade eletromagnética do eletrocardiógrafo.



Deve-se evitar o uso do eletrocardiógrafo muito próximo ou empilhado sobre outros equipamentos elétricos, a não ser que estes tenham sido verificados pela Micromed como compatíveis com o uso nesta posição.

Imunidade Eletromagnética – Descargas Eletrostáticas, Perturbações na Rede Elétrica e Campos Magnéticos.			
O Eletrocardiógrafo MEBT-100, modelo ErgoPC 13 Air é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Diretrizes
Descargas Eletrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6kV por contato +/- 8kV pelo ar	+/- 6kV +/- 8kV	Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem recobertos com material sintético, a umidade relativa deveria ser de pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos/Trem de pulsos ("Burst") IEC 61000-4-5	+/- 2kV nas linhas de alimentação +/- 1kV nas linhas de entrada/saída	Não aplicável Não aplicável	A qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	+/- 1kV linha(s) a linha(s) +/- 2kV linha(s) ao terra	Não aplicável	A qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão na linha de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	< 5% U_T (> 95% de queda de tensão em U_T) por 0,5 ciclos. 40% U_T (60% de queda de tensão em U_T) por 5 ciclos. 70% U_T (30% de queda de tensão em U_T) por 25 ciclos < 5% U_T (> 95% de queda de tensão em U_T) por 5 segundos	Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável	A qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o Eletrocardiógrafo exige operação continuada durante interrupção de energia, é recomendado que ele seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta de energia.
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Campos magnéticos na frequência da alimentação devem estar em níveis característicos de um local típico em ambiente hospitalar ou comercial típico.

Apêndice I – Certificação ANATEL

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000.”

Para consulta: www.anatel.gov.br

Modelo: MEBT-100



04231-15-04087

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

Apêndice J – Suporte

Suporte Micromed



Informações sobre o suporte técnico Micromed em seu estado.



O Suporte Técnico Micromed funciona de Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00.



Outras solicitações podem ser feitas através do Fale conosco.

Micromed e o Meio Ambiente

Na Micromed, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Como o Eletrocardiógrafo contém componentes eletrônicos, ele precisa ser descartado separadamente do lixo comum. Para mais orientações sobre o descarte correto e adequado de seu equipamento entre em contato com a Micromed acessando <https://micromed.ind.br/site/contato/>.

ErgoPC^{Air}

A Ergometria mais inteligente do mercado, agora sem fios. Já pensou nisso?



Mais liberdade no consultório para dispor móveis e equipamentos
Muito mais conforto para o paciente
Ambiente mais humanizado, agregando valor ao exame

SAIBA MAIS... +



ErgoPC 13 AIR

Manual do Usuário

